

Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!



IGIENE
&
PROFILASSI



Novembre 2024

Dal 1949 al servizio
della **Comunità
Odontoiatrica**



www.ilicdental.com

CONDIZIONI DI VENDITA

IVAN ILIC' Srl - Via Ludovico Muratori, 46/11 - 20135 Milano
Tel. (+39) 02 55 016 500 - 02 365 12 990 • ilic@ilicdental.com

Prezzi. Sono IVA esclusa e possono, a fronte di situazioni straordinarie, subire variazioni senza preavviso.

A seguito dell'aggiornamento costante dei cataloghi anche i prezzi possono subire variazioni.

Validi salvo errori e/o omissioni di stampa. Informeremo costantemente i nostri clienti su novità e aggiornamenti. I prezzi qui indicati sono validi sino al **30 dicembre 2024** ed annullano e sostituiscono ogni proposta precedente.

Legenda Prezzi. Il prezzo indicato è sempre quello unitario.

Garanzia - Resi - Sostituzioni. Qualora la qualità non corrisponda agli standard dei fabbricanti, o per errato invio, è necessario:

- avvisare l'ufficio assistenza clienti entro 8 giorni dal ricevimento della merce;
- effettuare il reso nell'imballo originale integro;
- allegare il documento di trasporto in originale e la causale del reso con le motivazioni e/o i problemi riscontrati.

Condizioni Generali di Vendita.

Pagamento con:

- Carta di Credito o POS



- Ricevuta Bancaria 30 gg d.f. + € 6,50 Indicare IBAN

- Bonifico Bancario anticipato
Ivan ILIC s.r.l.

IBAN:

IT50N0569601625000003415X03

Ordini superiori a € 140

Nessun contributo spese.

Ordini fino a € 140

- Contributo spese: € 14
- Pagamento anticipato con Carta di credito o POS
- Bonifico Bancario anticipato.

Ordini inferiori a € 75

- Contributo spese: € 15,50
- Pagamento anticipato con Carta di credito o POS
- Bonifico Bancario anticipato.

Nelle zone dove operiamo con agenti, saremo lieti di comunicare il Suo nominativo per fissare un appuntamento.

FaceShield, schermi frontali protettivi	5
Fili interdentali Thornton	37
Floss	37-39
Guanti	4,40
GESTIONE TRAY E CONTENITORI	10
IGIENE DOMICILIARE	33-39
Implacare	14
Ingranditori Keeler	41
Irrigatori gengivali	33
I.S Silver, punte ultrasuoni per impianti	15
Jet Polisher, lucidante	23
LDX 3, lampada per transilluminazione	4
Lingua Fix, più di un aspiratore	9
Mascherine per naso e bocca	3,6,7
Mascherine per occhi	3,6
Merssage, pasta per profilassi	24
Microlux, lampada per transilluminazione	40
Mirror Magic, sistema antiappannante	11
Mr.Thirsty, apribocca aspiratore	9
Nastro codificatore Ez Tape Zirc	11
Natural+, sbiancamento Meodental	27-28
Neody Tips, spungnette assorbenti	8
Nose Cone, manipolo riduttore	25,26
OneGloss Kit, finitura e lucidatura	32
Opal Dam, diga chimica	30
Opalescence, sbiancamento Ultradent	29
Oral BioFilter	7
PASTE E COPPETTE LUCIDANTI	24-26
PerioComfort, drappi anti spruzzi	23
Perio-EyeShield, occhiali protettivi	5
PerioPlak, rivelatore tartaro	12
PerioProx, scovolini Hi-Tech Periodont	34
PerioSmile, copri spazzolini a ventosa	37
Pink Petal, petali aspiranti	9
Plac-O-Tec, rivelatore tartaro	12
Pocket Probe, irrigazione gengivale	33
Polveri per profilassi	19,20
Pressage, pasta lucidante Shofu	24
ProphyCare PRO, pasta per profilassi Directa	25
Prophy+, coppette e spazzolini per profilassi	26
PROTEZIONE	5,7
PT-A, unità per profilassi	17
PUNTE ULTRASUONI PER DETARTRASI	15-19
Qartz, pasta e coppette per profilassi	24
Quick-Ez Polishers, coppette per profilassi	26
Raschietto pulisci lingua	39
ReciProxy, contrangolo reciprocante	26
Rulli di cotone Hi-Tech colorati	8
SBIANCAMENTO	26-30
Scovolini: Den-Brush, PerioProx	33,34
SE Cuschion, spungnette per aspirasaliva	9
Seggiolino a sella di cavallo Bambach	3
SIGILLANTI PER SOLCHI E FOSSETTE	32
Spazzolini da denti	35-37
Specchietti intra orali Crystal	11
STRUMENTARIO	11,12
STRUMENTI ROTANTI PER LUCIDATURA	24-25
SuperBrush, spazzolino rotante	25
SuperSeal, desensibilizzante Dr. C. Cox	31
TipsOne, punte ultrasuoni Periodont Selection	16,17
Transilluminazione	40
Twist, contrangoli reciprocanti	25
Ultradex, sciacquo anti alitosi	34
Ultra Ez, desensibilizzante Ultradent	31
Ultraseal XT Hybrid, sigillante Ultradent	32
Umbrella, apribocca, divaricatore	12
Universal Dental Sealant, desensibilizzante	31
VeriFresh, Linea Igiene Orale	37,39
Visiere protettive	5,6
Visor Loop	40

Come Ordinare

Tel. (+39) 02.36512990
(+39) 02.55016500
(+39) 329 181 8750

ilic@ilicdental.com

e-commerce:

www.ilicdental.com


Acquisto sul Sito la sicurezza nei pagamenti è garantita. La riservatezza delle informazioni e la loro recuperabilità, sotto il profilo della autenticazione, trasferimento e sicurezza, è garantita dai server protetti della banca e nessuna informazione transita nel sistema internet.

© 2020 Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi registrati ® e commerciali ™ appartengono ai legittimi proprietari. Questo volume non può essere riprodotto, archiviato o trasmesso, intero o in parte, in qualunque modo (digitale, elettronico, meccanico o registrato). Fotocopiare le pubblicazioni è vietato dalla legge.



Transilluminazione LDX
pag. 4


fratture carie

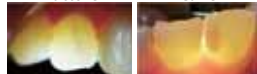

Profilassi pag. 21



Contrangolo reciprocante
pag. 23

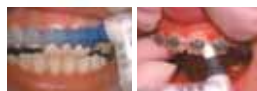

INDICE

CAT. IGIENE PROFESSIONALE E DOMICILIARE

ABLATORI ULTRASUONI E LUCIDATURA	18,22
Anelli codificatori EZ-Ring	11
AP-H PLUSmanipolo Air polishing	18
ASPIRAZIONE E ISOLAMENTO	8,9
Bambach, seggiolino a sella	3
BeautiSealant, sigillante Shofu	32
Bellatrix, schermi protettivi	5
Calculus Solution, Dr. C.Cox	31
CareShield	5
Colorvue, Colorvue Biotype	13
Cassette porta strumenti, EZ Jett	10
CODIFICATORI STRUMENTARIO	11
Coppette e spazzolini rotanti per profilassi	24,25
Crosstex Mascherine Secure Fit	7
Cuffie Safewear	4
D600 Ablatori a ultrasuoni Woodpecker	17
Denbur, linea igiene orale	33
DESENSIBILIZZANTI	31
Detergenti e disinfettanti Verify+	37
DIAGNOSI	3,4
Diga chimica, TopDam, Opal Dam	30
Drappi PerioComfort	23
EMS, igiene profilassi	20-21
Enamelast, vernice al fluoro	25
EZ-Flow, irrigazione interdentale	33



TipONE pag. 14-15

SafeMask® - Tipo IIR e tipo FFPII sono le migliori mascherine ad uso medico che abbiamo selezionato per voi, che garantiscono una protezione affidabile senza scalficare il comfort e la traspirabilità.

Lo strato esterno in tessuto-non-tessuto SpoonBond offre la massima protezione contro la penetrazione dei fluidi grazie agli strati interno ed esterno idrorepellenti.

SafeMask® SofSkin® fog-free tipo IIR prive di lattice, assicurano un impareggiabile livello di comfort e morbidezza risultando ideali per le pelli delicate. La TRASPIRABILITÀ ECCEZIONALE è unica nel settore in quanto supera i requisiti della norma EN 14683:2019.



Medicom
SafeMask®



MASCHERINA SAFEMASK® SofSkin® fog-free IIR

Lenti appannate?

Le mascherine Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free Tipo IIR assicurano un impareggiabile livello di comfort e morbidezza, risultando ideali anche per le pelli delicate. Per i portatori di occhiali è prevista un'esclusiva fascetta "fog-free" posta sull'archetto nasale che previene l'appannamento di lenti e visiere.

SafeMask® SofSkin® fog-free conf. 50 pz. € 18,60			
○ Bianco	53 772159	● Blu	53 772155
● Lavanda	53 772153	● Arancione	53 772162
● Rosa	53 772156	● Verde	53 772158



MASCHERINA SAFEMASK® SofSkin® fog-free IIR

SofSkin fog-free IIR con elastici, auricolari e visiera, EN 14683 Type IIR, DM, classe I, Made in France. Realizzata appositamente per le pelli sensibili, offre una protezione barriera affidabile senza irritare i visi sensibili. Lo strato interno in misto cellulosa, leggero e traspirante, è progettato per morbidersi con l'uso e rimanere fresco sulla pelle. Comoda protezione 2 in 1 con mascherina facciale e schermo oculare combinati. La striscia di flusso integrata impedisce in modo affidabile l'appannamento degli occhiali e della visiera. Protezione aggiuntiva contro gli spruzzi grazie alla classificazione di tipo IIR.

53 7732155 25 pz.

€ 69,00

Medicom
SafeMask®



confezionate singolarmente



MASCHERINA SAFEMASK® FFP2 e IIR

La taglia giusta per tutti, sicurezza!

Questa mascherina respiratoria funge da efficace barriera contro gli aerosol solidi e liquidi per garantire una protezione affidabile dalle malattie infettive (BFE 99,9 %). Il tessuto morbido e leggero assicura massimo comfort ed eccellente respirabilità. Le due fascette elastiche incollate a ultrasuoni consentono alla mascherina di adattarsi perfettamente al viso.

SafeMask® FFP2 (colore bianco) conf. singolarmente 50 pz. € 78,00	
Ⓢ Piccola	53 7722WHS
Ⓜ Media	53 7722WHM
Ⓛ Grande	53 7722WHL



SECURE FIT.
How Safe Feels

Fascia di alluminio sotto il mento, adattamento personalizzato aderente.



Ultra
= extramorbido

- Senza sostanze chimiche

- Interno di cellulosa ipoallergenica



MASCHERINE CHIRURGICHE Crosstex Secure Fit

Il design brevettato riduce significativamente i vuoti sopra, sotto e lateralmente.



1. Applicare sul volto.
2. Stringere la fascia sul naso.
3. Tirare la fascia sotto al mento.
4. Stringere la fascia anteriore.

Secure Fit Ultra Sensitive

ASTM3: protezione elevata

Resistenza ai fluidi 160 mm hg BFE: 99,9% a 3 µm PFE: 99,9% a 0,1 µm

53 572341 Masc.Ultra Secure Fit blu 50 pz. **34,93**

Secure Fit Ultra Sensitive Fog Free

ASTM3: protezione elevata

Resistenza ai fluidi 160 mm hg BFE: 99,9% a 3 µm PFE: 99,9% a 0,1 µm

- Fascia antiapp. sullo strato interno ipoallergenico.

53 572351 Masc.Ultra Secure Fit blu 40 pz. **37,80**

Procedural Secure Fit

ASTM2: protezione media

Resistenza ai fluidi 120 mm hg BFE: 99,9% a 3 µm PFE: 99,7% a 0,1 µm

Delta Pmm H₂O/cm³ < 5,0 strati interno (bianco) ed esterno resistente ai fluidi • Disponibili anche colore rosa e lavanda.

53 572241 Masc.Ultra Secure Fit **25,06** azzurro 50 pz.



Caratteristiche: 10x20 cm

- Rinforzo superiore per una maggiore ergonomia ed aderenza al naso
- Doppio elastico per una perfetta aderenza al viso.

NATHA Mascherina chirurgica classe II

Secondo UNI EN ISO 14683 realizzata ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24/04/2020 n. 27

Utilizzo:

Protezione degli operatori sanitari secondo articolo 34 dl 9 del 2/03/2020.

Performance:

BFE (efficienza di filtrazione batterica 99%*)

* Report del Politecnico di Milano del 22/04/2020

Biocompatibilità:

Nessun rischio biologico Report Eurofin STULV20AA2311-1 del 13/05/2020

Tessuto Hi-tech per ottima traspirabilità e confort sulla pelle

53 272010 Mascherina Natha cl. II, 10 pz. **7,50**



Utilizzabile anche sopra gli occhiali



Adattabilità e comfort
Visibilità 360°

MASCHERINA PROTETTIVA PER OCCHI

Indispensabile dispositivo per la sicurezza e l'igiene degli occhi, evita l'ingresso di liquidi ed aerosol.

Non assorbe umidità ed è dotata di doppio rivestimento anti appannamento.

Leggera, pratica ed elegante, presenta un'imbottitura interna morbida che assicura stabilità e comfort.

Mascherina P-MG-1 € 16,90

Trasparente	Verde	Rosa
53 43220	53 43221	53 43222



Modello per corsi di igiene



Con tasche e gengive trasparente e denti sostituibili.

59 2511
Modello igiene con tasche
€ 175,00



MASCHERINA PROTETTIVA KN95/FFP2 medical-grade masks

Questo modello di mascherina a 5 strati, KN95 (FFP2), è una delle fondamentali protezioni per l'operatore e quindi anche per i pazienti in particolare da polveri, virus e batteri; è efficace per la protezione dal Coronavirus.

Questa maschera protettiva è da usare per prevenire l'inhalazione di particelle non oleose in sospensione Filtration Efficiency $\geq 95\%$

53 372205 Mascherina FFP2 - cf. 5 pz € 4,50

Offerte personalizzate a richiesta

4 strati: 2 cotone 100%
+ 2 poliestere 100%

PERIODENT
Premium



NEW

3 strati con filtro fuso a soffiaggio (2 strati altamente resistenti ai fluidi + 1 in TNT Premium)

Mascherine chirurgiche classe IIR 3 strati (\geq bfe 99) Latex free

- Morbide in tessuto di Qualità premium con filtro fuso a soffiaggio*
- Grande efficienza filtrante
- Adattatore nasale • Elastici in PPE
- Resistenti a fluidi e schizzi
- Confezione Igienica per prevenire contaminazione crociata prima dell'utilizzo.

Dimensioni: **Adulti** 17,0x 9,5cm. - **Bambini** 14,5x8,5 cm.

Mascherina chirurgica IIR adulti, in Clean box, 50 pz.

Codice	Colore	Prezzo
53 372150LI	Lilla	€ 12,50
53 372150BL	Blu	€ 12,50
53 372150RA	Rosa	€ 12,50
53 372150VE	Verde	€ 12,50
53 372150BK	Nero	€ 12,50

Mascherina chirurgica IIR bambini, in Clean box, 50 pz.

53 37215CLI Lilla • 53 37215CBL Blu € 12,50

* Il tessuto filtrante fuso per soffiaggio è un materiale con eccezionali proprietà di filtrazione realizzato al 100% con fibre di polipropilene utilizzando il metodo "melt-blow".



Simply
the best



SAFEWEAR™ PREMIUM Cuffie Universali

SuperComfort per tutto il giorno!

- Realizzato con materiali traspiranti di qualità superiore
- Protezione efficace contro la contaminazione crociata
- Favorisce l'immagine professionale dello studio

Cuffie Premium Universali SafeWear™

Materiale: Viscose 40 g/m², Contenuto: 100 pz. € 47,90

Cuffie Premium Universali SafeWear™	
100 pz. € 47,90	
● 53 316960	● 53 316970



PerioEYESHIELD viene usato per procedure molto lunghe.



Uso con la mascherina chirurgica e gli occhiali da vista.

U.S. Patent 5,297,298
U.S. & Int'l Patents
Pending.

PERIO EYESHIELD PERIODENT

Protezione sicura, efficace e confortevole, degli occhi



- Montature colorate riutilizzabili e lenti con schermatura laterale
- Confortevoli e leggeri per procedure lunghe - meno di 10 g
- Lenti ottiche utilizzabili anche sopra gli occhiali da vista e con la mascherina chirurgica
- Leggeri e riciclabili, disinfettabili o sterilizzabili a freddo
- Conformi alle normative OSHA
- Disponibili anche con lenti anti UV o con lenti scure per la protezione ed il rilassamento del paziente.

- 53 P3250 Perio LIGHTShield, trasparenti, 50 lenti ... € 29,50
- 53 037110 (segue lettera del colore) Perio LIGHTShield, 10 montature ... € 5,90



LENTI PER PAZIENTI

Rilassamento e protezione

Lenti per la protezione dei pazienti.
53 0372LT Perio LIGHTShield 25 pz. € 35,40

con
Lanolina e
Vitamina E

con Lanolina
e
Vitamina E

Medicom SafeTouch® Rejuvenate
Benessere per le tue mani

Guanti senza polvere con punte delle dita testurizzate e una vestibilità estremamente confortevole. Questi guanti medicali offrono una qualità e un comfort eccezionali. Soddisfano tutte le norme di qualità europee in materia di guanti di protezione ad uso medico. L'elevata resistenza e l'eccezionale sensibilità tattile, coniugata all'affidabile protezione dei pazienti, rendono i guanti SafeTouch indispensabili nella pratica medica quotidiana.



Simply
the best



Advanced Rejuvenate™ Nitrile senza polvere 100 pz.				
6-XS	7-S	8-M	9-L	10-XL
53 521SXS	53 521SS	53 521SM	53 521SL	53 521SXL
€ 14,90				

Rejuvenate™ Lattice senza polvere				
6-XS	7-S	8-M	9-L	10-XL
53 520SXS	53 520SS	53 520SM	53 520SL	53 520SXL
€ 14,90				



Benessere per le mani

DAL Aloe Vera PERIODENT AQL 1.0

Disp. Medici a doppia conformità:
sicurezza operatore e paziente

Guanto ruvido in gomma di **lattice naturale** con aloe vera, con il migliore lattice al mondo per le migliori prestazioni. **Senza polvere.** Verde – Polsino salvastrappo – Superficie est. micro ruvida – Rivestim. Int. in Aloe Vera **100 pz**

- Peso taglia M **6,30 g** - Da 1 a 6
- Resistenza 5
- Sensibilità 5
- Elasticità 6
- Grip 6
- Protezione 5



Richiedere offerta per forniture programmate

XS 5-5½	S 6/6½	M 7/7½	L 8/8½	XL 9/9½
53 024125	53 024126	53 024127	53 024128	53 024129
€ 12,60				

Medicom SafeTouch Rejuvenate

Benessere per le tue mani

con
Lanolina e
Vitamina E

Guanti senza polvere con punte delle dita testurizzate e una vestibilità estremamente confortevole. Questi guanti medicali offrono una qualità e un comfort eccezionali. Soddisfano tutte le norme di qualità europee in materia di guanti di protezione ad uso medico. L'elevata resistenza e l'eccezionale sensibilità tattile, coniugata all'affidabile protezione dei pazienti, rendono i guanti SafeTouch indispensabili nella pratica medica quotidiana.



con Lanolina
e
Vitamina E



Advanced Rejuvenate™ **Nitrile senza polvere**

6-XS	7-S	8-M	9-L	10-XL
53 321SXS	53 321SS	53 321SM	53 321SL	53 321SXL
€ 14,90				

Rejuvenate™ **Lattice senza polvere**

6-XS	7-S	8-M	9-L	10-XL
53 320SXS	53 320SS	53 320SM	53 320SL	53 320SXL
€ 14,90				



**AQL 0.65
Unici!!!**



GUANTI STERILI CHIRURGICI FNS Zero **PERIODENT** Disp.Medici a doppia conformità: sicurezza operatore e paziente

Lo stato dell'arte per il guanto chirurgico di nuova generazione che non utilizza acceleranti. Nessuna sostanza chimica nel processo produttivo per eliminare ogni allergene = Zero sensibilizzazioni cutanee • Performance e totale sicurezza • Assenza di difetti al 100%. Sono la miglior scelta, la comodità di calzatura è amplificata dalla visco-elasticità del **Flexilon**. Ultra anatomici, per garantire meno tensioni su mani e dita rendendoli super confortevoli. **AQL 0.65**.

- Peso taglia 7,5 - 21,6 g - Da 1 a 6
- Resistenza 6 • Sensibilità 5
- Elasticità 6 • Grip 5 • Protezione 5

5,5	6,0	6,5	7,0
53 024S55	53 024S60	53 024S65	53 024S70
7,5	8,0	8,5	9,0
53 024S75	53 024S80	53 024S85	53 024S90
€ 4,50			

Nitrile telato -
Latex free

- Sagomati a livello delle dita e del palmo dei guanti, adeguata percezione tattile e presa salda e sicura durante la gestione degli strumenti e dei materiali
- Autoclavabili (max. 121°C).



Guanti antitaglio LILAC IMS Hu-Friedly in Nitrile telato

• Aumentano la sicurezza per l'operatore durante il ciclo di gestione degli strumenti • Uso: ambiente di sterilizzazione e durante la disinfezione nelle aree operatorie • Resistono ad agenti chimici, punture e tagli per aumentare la protezione nei confronti dei potenziali traumi da contatto con gli strumenti • Particolarmente lunghi al fine di evitare che liquidi e disinfettanti finiscano all'interno. Protezione aggiuntiva nei confronti degli agenti chimici impiegati.

S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10
53 H21160	53 H21162	53 H21164	53 H21166
€ 13,95			

Taglia	Circonferenza della mano	Lunghezza della mano	Lunghezza minima del guanto
XS	152 mm	160 mm	220 mm
S	178 mm	171 mm	230 mm
M	203 mm	182 mm	240 mm
L	229 mm	192 mm	250 mm
XL	254 mm	204 mm	260 mm
XXL	279 mm	215 mm	270 mm

Previene il contagio
tramite la rilevazione
della temperatura corporea

Display retroilluminato
a tre colori (in base alla
temperatura rilevata).



TERMOMETRI DIGITALI HI-TECH INFRA-RED
ad infrarossi con un range di misurazione da 32 °C
a 42.5 °C e un'alta precisione: +/- 0,2 °C

Caratteristiche: • **Immediata rilevazione e facile lettura** • **Preciso ed affidabile grazie ai componenti Hi-Tech** • **Memoria e segnale acustico d'allarme.**

61 4220 Termometro digitale HTIR **80,00**



BELLATRIX Schermo protettivo

BELLATRIX MARK II è uno schermo protettivo progettato per aumentare la sicurezza di operatore e paziente. Applicato su tutte le montature e sugli occhiali con correzioni, consente di operare nel massimo comfort senza appannare le lenti. Dimensioni: 150 x 155mm. ca. – Peso 16 gr.

Semplice da applicare: **1.** Agganciare l'aletta superiore al ponte della montatura dell'occhiale. **2.** Piegare i lembi laterali in modo da farli passare sotto le lenti dell'occhiale; in questa posizione lo schermo sarà perfettamente stabilizzato.

53 03201	Bellatrix MARK 1, occhiale e 6 schermi	€ 49,50
53 03202	Bellatrix MARK 2, occhiale e 6 schermi	€ 34,50
53 03203	Bellatrix MARK 3, occhiali c/maschera	€ 32,00



FACESHIELD PERIODENT Visiera Protettiva

• Aumenta i livelli di protezione • Aumenta la protezione periferica • In plastica otticamente trasparente • Fascia in gomma piuma alta 3,8 cm • Antiappannamento • Riutilizzabile dopo la disinfezione.

53 053112	Visiera trasp. MediShield 12 pz.	81,50
53 053136	Visiera trasp. MediShield 36 pz.	215,00
53 053160	Visiera trasp. MediShield 60 pz.	300,00




CareShield Schermo trasparente facile da usare con la funzione di aspirazione HVE integrata per aspirare direttamente le goccioline e gli aerosol che ospitano agenti patogeni potenzialmente pericolosi.

• Riduce la diffusione di aerosol e goccioline • Mantiene i DPI efficaci • Stabile grazie al supporto a mano libera • Migliora l'esperienza di pazienti e staff • Economico grazie allo schermo monouso e al connettore autoclavabile

32 57C55100	Starter Kit	185,80
	100 schermi, 5 connettori, 1 supporto	
32 57SL100	CareShield 100 schermi	112,50
32 57CN5	Connettori autoclavabili, 5 pz	67,90
32 57HCN1	Supporto a mano libera autoclavabile ..	87,30

Accessori: • Schermo facciale biprotetto • Fascia tergisudore adesiva • Fascia elastica con asole

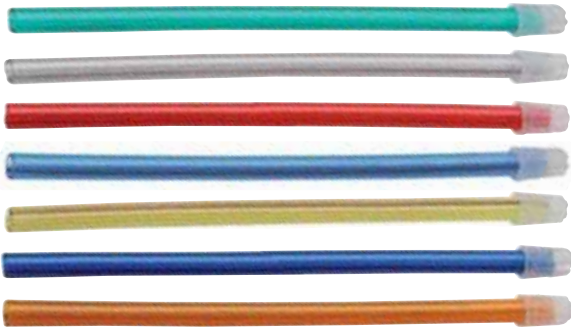

ASPIRASALIVA **PERIODENT** Hi Tech In PVC NON tossico

Modellabili con anima metallica incorporata nella cannula senza colle, Sistema innovativo brevettato. Cappuccio d'aspirazione rimovibile inserito in modo totalmente sicuro: evita il distacco durante l'uso.

Confezioni igieniche in buste sigillate da 100 pz.

13 cm Corti	AZZURRO	BLU	GIALLO	ROSSO	TRASP.	VERDE
1000 pz. (10 x 100) 34,90	32 0241312	32 0241313	32 0241314	32 0241315	32 0241316	32 0241317
5000 pz. (50 x 100) 175,10	32 024132	32 024133	32 024134	32 024135	32 024136	32 024137

15 cm Lunghi	ARANCIONE	AZZURRO	BLU	TRASP.	VERDE
1000 pz. (10 x 100) 35,60	32 0241511	32 0241512	32 0241513	32 0241516	32 0241517
5000 pz. (50 x 100) 177,70	32 024151	32 024152	32 024153	32 024156	32 024157

Per una confortevole ed efficiente aspirazione.



SE CUSHION

Utilizzato inserito nell'aspirasaliva. Previene il risucchio delle mucose con la conseguente irritazione delle stesse.

Aumenta il comfort del paziente. Migliora l'aspirazione. Riduce il rumore dell'aspirazione. Monouso.

32 329970 100 pz. € 39,00



Ideale anche per l'uso con la diga di gomma

Coloranti naturali, sicuri
Non lasciano pelucchi!



Ad esa nr. 1 da 750 pz e nr. 2 da 600 pz € 13,90

RULLI PERIOROLLS **PERIODENT** 100% Purissimo Cotone

Il rivestimento speciale anti-adesione, le fibre compatte e la speciale levigatura, consentono di proteggere le mucose anche durante la rimozione.

Rulli PerioRolls - Lunghezza 36 mm € 13,50		
n. 1 ø 8 mm 500 pz. 250 g	Colore	n. 2 ø 10 mm 400 pz. 310 g
53 09301B	BLU	53 09302B
53 09301G	VERDE	53 09302G
53 09301V	VIOLA	53 09302V
53 09301P	ROSA	53 09302P
53 09301Y	GIALLO	53 09302Y



Con superficie riflettente



NEODRYS TIPS **Comprese** 1 lato assorbente, 1 impermeabile

- Forniscono copertura completa dei dotti parotidici per almeno 15 min
- Resistono all'umidità e proteggono la guancia
- La capacità di assorbimento e la retrazione/protezione vestibolare li rendono unici e versatili
- Il foglio vestibolare agisce anche da protezione delle guance durante l'uso dei manipoli.

	ND 50 pz € 19,50	ND riflettenti 50 pz € 21,50
Small	53 39401	53 39411
Large	53 39402	53 39412



Pink Petal È un prezioso ausilio per l'isolamento. Facilmente si fa scorrere Pink Petal™ su un qualsiasi aspirasaliva creando un dispositivo che fornirà aspirazione continua. Questo prodotto è di grande sollievo per i pazienti che vogliono tenere loro stessi l'aspiratore e che non vogliono deglutire durante una procedura.

Ideale per scaling e levigatura radicolare, detartrasi con ultrasuoni, sigillature. Mantiene stabile e fermo l'aspirasaliva. Protegge e ritrae la guancia. Il paziente può chiudere facilmente con l'aspirasaliva. Scorre facilmente sull'aspirasaliva. Materiale morbido e confortevole. Uso singolo. Privo di lattice.

32 36975 Pink Petal 50 pz. **39,00**



LINGUA-FIX® Aspirasaliva

Lingua-Fix® offre un'area di lavoro asciutta. Tiene la lingua in una posizione stabile per proteggerla da lesioni. Funzionamento semplice... facile da posizionare e rimuovere. Comodo, senza spigoli vivi o angoli. La grande superficie di aspirazione evita il blocco ed è più confortevole. Riduce la sedimentazione di materiali di fresatura nelle tubazioni e filtri. Uso singolo. Fornito premontato.

32 32010 Lingua-Fix 10 pz. **24,00**



MR. THIRSTY ONE STEP - Monopaziente - Isolamento istantaneo in un solo passaggio

Caratteristiche: Retrae lingua e guancia • Riduce i tempi di lavoro • S'inscrive direttamente nell'aspiratore chirurgico (HVE) • Monouso. **Vantaggi:** Maggior confort per il paziente • Campo operativo nitido per l'odontoiatra • L'assistente può dedicarsi ad altre mansioni • L'igienista può lavorare senza interruzioni legate all'uso dell'aspirasaliva.

32 34200	Trial Kit 5 Pedo/adulti piccoli, 5 Medi/Grandi con Adattatore 16 mm	€ 55,00
32 34211	Pedo/Adulti S 25 pz. con Adattatore	€ 109,50
32 34201	Medi/Grandi 25 pz. con Adattatore	€ 109,50

Introducete Mr. Thirsty One-Step nel vostro studio, efficiente e a basso costo. Inizierete subito ad apprezzarne i vantaggi



ORAL BIOFILTER

Separatore labiale con aspirazione

Collegato all'aspirazione della poltrona contribuisce riduzione della debulizzazione durante le procedure odontoiatriche e facilita l'accesso alla cavità orale.

Vantaggi: • Riduce al minimo la contaminazione crociata • Migliore accessibilità • Maggiore sicurezza • Maggiore comfort • Più igienico • Ergonomico

RETRATTORI LABIALI ORA BIOFILTER

32 25BF06	32 25BF40	32 25BF12
cf. 6 pz.	Econopack 40 pz.	Safepack 12 pz.
€ 57,00	€ 320,00	€ 102,00

Sistema Vassoi "B-Lok" con coperchio Safe-Lok Tray è un esclusivo sistema brevettato che previene la contaminazione crociata e consente il trasporto sicuro verso la zona di sterilizzazione. Vantaggi:

- 1** Previene ogni contaminazione causata dalla caduta del Tray usato, durante il trasporto alla zona di sterilizzazione. Gli oggetti restano chiusi fino al processo di detersione e sterilizzazione.
- 2** La chiusura ermetica Safe-Lok mantiene tutto pulito e consente il trasporto fino alla poltrona e il coperchio viene rimosso solo quando il paziente è seduto e può avere inizio la procedura.



B-Size Vassoio piano

- I bordi ampi e smussi rendono sicura la presa.
- Piedini antiscivolo a garanzia della stabilità.
- Superficie autolubrificante e molto lucida: maggiore resistenza alle macchie.
- Dimensioni: 33,97 x 24,45 x 2,22 cm

55 32301 B-Lok Tray liscio. Disponibili tutti i colori..... **24,00**
 55 32401 (A-S) B-Lok Tray con divisori. Disponibili tutti i colori **26,00**



Coperchi per vassoi B-Lok serraggio Safe-Lok

- Meccanismo laterale per il serraggio sicuro del coperchio sul vassoio.
- Adatto solo ai vassoi B-Lok, con e senza divisori
- TRASPARENTE - NON STERILIZZARE A CALDO.

55 325345 Coperchio Safe-Lok Standard 36,24x25,1x1,91 cm **29,50**
 55 325346 Coperchio Safe-Lok Alto 36,24x25,1x3,02 cm **31,00**



E-Z JETT Cassetta 5 posti (In Busta 13,34 x 30,5 cm)

- Accoglie 5 strumenti.
- Comprende il sostegno per le punte per siringa (Syringe Tip Holder).
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si richiudono facilmente.
- Dimensioni **20,32 x 9,74 x 3,02 cm**


55 33925 E-Z Jett Cassette 5 posti. Disponibili tutti i colori **46,00**



E-Z JETT Slim Cassetta 8 posti (In Busta 18,1 x 35,1 cm)

- Accoglie 8 strumenti.
- Compartimento accessorio al centro, per ospitare strumenti aggiuntivi.
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente.
- Si adatta allo Statim.
- Impilabile in Ultrasonis.
- Supporto per punta della siringa incluso.
- Dimensioni **17,78 x 10,16 x 2,54 cm**

55 33911 E-Z Jett Cassette 8 posti Slim. Disponibili tutti i colori..... **56,00**

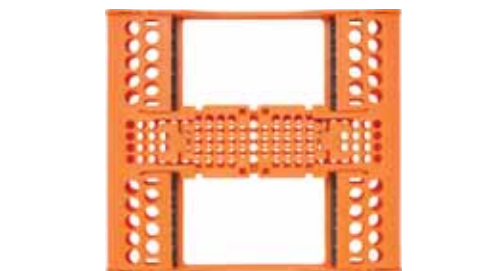

E-Z JETT Cassetta 10-12 posti (In Busta 25,4 x 38,1 cm)

- Accoglie 10-12 strumenti
- Compartimento accessorio al centro, per ospitare strumenti aggiuntivi
- Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente
- Dimensioni **22,16 x 17,78 x 2,85 cm**

55 33930 E-Z Jett Cassette 10 posti. Disponibili tutti i colori **72,00**




Performance Tool Organizer

Più profonda e spaziosa ideata per gli strumenti speciali e più grandi. Spaziatela a piacere utilizzando i piedini removibili, disponibili anche separatamente.

- Flusso superiore di acqua a garanzia di una detersione completa
- Disegno compatto
- Facile da chiudere e da aprire. Ideale per leve, pinze, pinzette, forbici.
- Dimensioni 20,32 x 10,16 x 2,54 cm. **Disponibile in tutti i colori**

55 33940 Performance Tool Organizer **93,00**

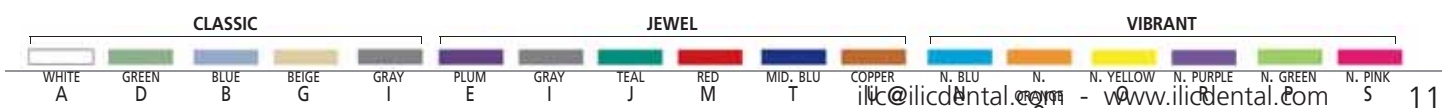



E-Z-ID Tape Nastro per codifica colori. Dim 5,72x0,95x4,13 cm.

• Tape dispenser con taglierina incorporata • Dispenser roller evita che il nastro si intrecci

Ass.to 2.440 cm	Jewel: 2x(E,T) I, Y, M, U	Vibrant 2x(S,R), N, O, P, Q	Classic 2x(A,B,D), G, I	Singoli 305 cm € 17,60
8 Nastri € 72,00	33 399315	33 399310	33 399305	33 399300(+)

E-Z-ID Ring Anelli con dispenser ergonomico per codifica colori.

SM (3,17-6,35) **LG** (6,35-9,52) **XL** (9,52—12,70)

• In pratici dispenser "smart": semplice, basta far scorrere lo strumento all'interno dell'anello.

Ass.to 8x25 € 82,70	Jewel: 2x(E,T), I, Y, M, U	Vibrant 2x(S,R), N, O, P, Q	Classic 2x(A,B,D), G, I	E-Z Ring 25 pezzi € 12,82
SM	33 3993115	33 3993110	33 3993105	33 3993100(+)
LG	33 3993215	33 3993210	33 3993205	33 3993200(+)
XL	33 3993015	33 3993010	33 3993005	33 3993000(+)



Per tabella colori vedere in basso pag. 10.

Crystal HD Specchietti Innovativi Hi-Tech "Front Surface"

• **40% più luminosi** degli specchietti rodiani • Maggiore resistenza ai graffi • Meno fatica per gli occhi • Specchio allineato alla cornice per evitare la corrosione • Elimina gli shock galvanici • Sterilizzabile in autoclave fino a 136°C • Corpo in plastica hi-tech antimicrobica • Colorati per un ambiente gioioso e per la codifica cromatica • Confezioni ass. 12 specchietti (2 colori x tipo)



SPECCHIETTI CRYSTAL HD SOFT GRIP
con manico colorato - Cf. 12 pz.

VIBRANT 2 Specchietti per ciascun colore: N, O, P, Q, R, S.		
33 390363-NE	Soft Grip N. 4	€ 115,00
33 390364-NE	Soft Grip N. 5	
JEWEL 2 Specchietti per ciascun colore: E, J, T, I, M, U.		
33 390363-JW	Jewel N. 4	€ 115,00
33 390364-JW	Jewel N. 5	



SPECCHIETTI CRYSTAL HD THIN GRIP
con manico colorato - Cf. 12 pz.

VIBRANT 2 Specchietti per ciascun colore: N, O, P, Q, R, S.		
33 390353-NE	Thin Grip N. 4	€ 115,00
33 390354-NE	Thin Grip N. 5	
JEWEL 2 Specchietti per ciascun colore: E, J, T, I, M, U.		
33 390353-JW	Thin Grip N. 4	€ 115,00
33 390354-JW	Thin Grip N. 5	



Finalmente
vedi chiaro e pulito!

MIRROR MAGIC®
Sistema ergonomico antiappannamento

Previene l'appannamento degli specchietti e offre all'operatore un metodo veloce per rimuovere i detriti durante le procedure. Consente anche la rimozione dei detriti dalla superficie degli specchietti nel corso delle procedure grazie ai **Swipe Pads** che aderiscono al guanto o al tovagliolo per un'azione rapida.

54 37100 M. Magic Trial Kit - 2 Fl. da 6 ml, **39,00**
24 Tamponi per Swipe Pads




Posizionamento semplice e rapido



UMBRELLA Divaricatori apribocca

- Consente di mantenere la bocca aperta in modo naturale e delicato, evitando che le labbra vengano tirate o allungate
- Garantisce il massimo sollievo, evitando un possibile conato riflesso
- Può essere tenuto in sede durante il controllo dell'occlusione o utilizzato congiuntamente ad un blocco oclusale, mentre la lingua resta comodamente adagiata dietro il proteggi lingua
- Ideale per varie procedure cliniche come restauri diretti, sigillature, fissaggi brackets ortodontici, sbiancamento alla poltrona...
- Permette di aprire lo spazio tra labbra e guance favorendo l'accumulo della saliva lontano dai denti, facilitandone l'aspirazione e riducendo così il rischio di contaminazione

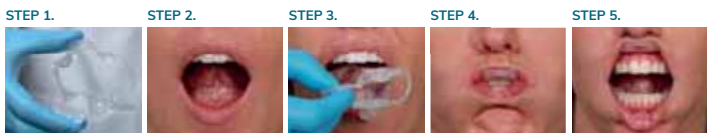

5 Medium € 10,00	20 Medium € 39,40	40 Medium € 78,40
33 17770	33 17771	33 17762

STRUMENTARIO PERIODENT World's Finest Hi-Tech S. Steel

Manico Super EXcel Hi Tech S. Steel - cavo ø 1 cm Super leggero



Super Grip
Super Sharp Technology - Long Lasting



SPECCHIETTI e MANICI



- XQualità con Rivestimento Hi-Tech Crystal
 - Attacchi Simple Stem o Cone Socket
- 12 pz. a partire da € 14,50

SONDE PARODONTALI



Sonde singole e doppie, OMS, Goldman-Fox, Williams, UNC, PerioWise ed altre
a partire da € 18,50

SPECILLI



Specilli singoli e doppi di ogni tipo
a partire da € 18,50

CURETTE



Gracey Barnhart Indiana
Columbia Langer Younger-Goode e altre
a partire da € 23,90

SCALER



Jacquette Towner
Falcetti e altri
a partire da € 29,00

LIME PARODONTALI



Questi strumenti con lame a zappetta multiple. Usati per frantumare depositi tenaci, levigare cemento irruvidito e margini o sovraestensioni di amalgama. Vengono usati a movimenti sovrapposti per ottenere superfici più lisce.

€ 35,90

È importante rimuovere completamente il biofilm, su denti e gengive anche nelle aree difficili da raggiungere. Solo rendendo visibile il biofilm si potrà procedere ad una rimozione rapida e completa e solo vedendolo si potrà eliminarlo con certezza anche sui tessuti molli. Grazie al colore la procedura sarà utilissima anche per la motivazione dei pazienti.

PERIOPLAK PERIODENT

Rivelatore di placca

Piccoli pellet impregnati di colorante da passare sui denti con le pinzette per evidenziare la placca presente da più di 3 giorni. I pellet sono facili da usare ed il colore viene spazzolato via rapidamente.



51 075915 Perioplak blu
100 pellet € 21,40

PLAC-O-TECT PERIODENT

Rivelatore di placca fluorescente visibile alla luce UV. Colora di giallo la placca e non è visibile dopo la visita odontoiatrica. Si applica passando una pastiglia sui denti con una pinzetta.




51 73451 Plac-o-Tect Intro Pack 115,00
Plac 2x200 pastiglie, 1 lampada UV
51 73450 Plac-o-Tect Refill 200 past . . . 54,00



CURETTE GRACEY PERIODENT

CURETTE GRACEY World's Finest Hi-Tech S. Steel

PERIODENT Hi-Tech

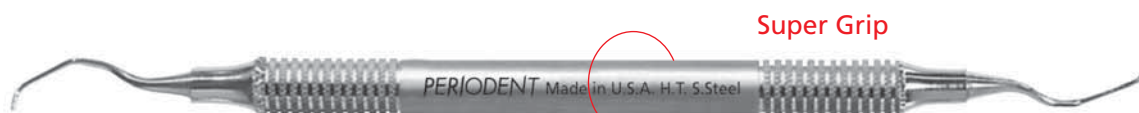

Manico **Super EXcel** Hi Tech S. Steel - cavo ø 1 cm Super leggero

Super Grip

Super Sharp Technology - Long Lasting

Lama Mini "S" (mini Five)

Lama piccola
per tasche
strette e profonde




Gracey 1/2 **PERIODENT** € 38,00
33 035021 Regular
Gambo corto, per incisivi e canini.
33 035011 **Lama Mini S**
33 035031 **Gambo Esteso L**

a Gambo lungo,
Lama classica
leggermente più stretta



Gracey 3/4 **PERIODENT** € 38,00
33 035022 Regular
Gambo corto, contrangolato per incisivi e canini.
33 035012 **Lama Mini S**
33 035032 **Gambo Esteso L**

Gambo Esteso "L" (after Five)

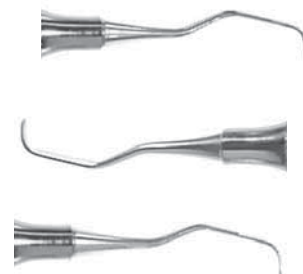

Gracey 5/6 **PERIODENT** € 38,00
33 035023 Regular
Gambo medio a contrangolo, per canini e premolari.
33 035013 **Lama Mini S**
33 035033 **Gambo Esteso L**



Gracey 7/8 **PERIODENT** € 38,00
33 035024 Regular
Gambo medio a contrangolo, per premolari e molari.
Per le superfici vestibolari e linguali.
33 035014 **Lama Mini S**
33 035034 **Gambo Esteso L**



Gracey 9/10 **PERIODENT** € 38,00
33 035025 Regular
Gambo lungo a contrangolo, per molari. L'angolo della lama più acuto facilita il lavoro sulle superfici radicolari meno accessibili.
33 035015 **Lama Mini S**
33 035035 **Gambo Esteso L**



Gracey 11/12 **PERIODENT** € 38,00
33 035026 Regular
Tripla angolazione per un facile accesso alle superfici ML-VL e ML-L di premolari e molari. Ottime per le tasche più profonde delle radici mesiali dei molari, VL e L.
33 035016 **Lama Mini S**
33 035036 **Gambo Esteso L**



Gracey 13/14 **PERIODENT** € 38,00
33 035027 Regular
Tripla angolazione per un agevole accesso alle superfici distali di premolari e molari. Ottima per le superfici linguali dei denti mandibolari anteriori, in tasche profonde o aree di recessione.
33 035017 **Lama Mini S**
33 035037 **Gambo Esteso L**



Gracey 15/16 **PERIODENT** € 38,00
33 035028 Regular
Per le superfici ML dei denti posteriori, ha la lama della 11/12 e gambo, con angolazione più acuta, della 13/14. Con un appoggio intraorale è spesso difficile posizionare la parte inferiore del gambo della 11/12 parallela alla superficie ML dei denti posteriori, in particolar modo dei molari mandibolari. La nuova angolazione della 15/16 consente un miglior adattamento a queste superfici da una posizione anteriore e con appoggio intraorale.
33 035018 **Lama Mini S**



Gracey 17/18 **PERIODENT** € 38,00
33 035029 Regular
Variante della 13/14 con gambo terminale allungato di 3 mm e angolazione verso il gambo accentuata per un completo accesso occlusale ed un miglior accesso a tutte le superfici DL posteriori. La posizione orizzontale del manico riduce al minimo l'interferenza dell'arcata antagonista e consente una posizione più rilassata della mano nel corso della detartrasi delle superfici DL. La lama è accorciata di 1 mm per un miglior adattamento alle superfici DL posteriori.

manico SEX/Half satin ø10mm

OUTLET

manico SEX/Half satin ø10mm

33 035022/HS Curette **PERIODENT** Gracey 3/4 € 29 ad esa € 5

33 035025/HS Curette **PERIODENT** Gracey 9/10 € 29 ad esa € 5

manico lucido ø8mm

33 035017/4 Curette **PERIODENT** Gracey 13/14 man.4 € 22 ad esa € 5

Disponibili Curette Gracey anche con manico esagonale cavo HEX ø0,7 mm € 24,00
Disponibili Curette Gracey singole, offerte ad esaurimento € 8,00

PIÙ AFFILATO ANCORA PIÙ A LUNGO. EverEdge 2.0 utilizza un nuovo processo ottimizzato a temperatura controllata che consente di mantenere il bordo duro e affilato. Questo controllo termico, insieme a diverse complesse peculiarità del processo produttivo brevettato Hu-Friedy, sono alla base delle caratteristiche di durata necessarie per consentire trattamenti efficaci e utilizzo continuativo.

PERFORMANCE SENZA ALCUN RIVESTIMENTO. Come per la tecnologia EverEdge originale, il nostro processo produttivo brevettato garantisce il mantenimento delle caratteristiche superiori di affilatura e resistenza all'usura di EverEdge 2.0 per tutta la vita dello strumento. Poiché non si tratta di un rivestimento superficiale, queste caratteristiche non possono essere rimosse né con l'affilatura né con l'usura. Gli scaler **EverEdge 2.0** possono essere riaffilati in qualsiasi momento per allungarne la vita.


RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI CONTROLLO. Hu-Friedy ha investito in un sistema personalizzato di valutazione della lama, per garantire che ogni clinico riceva strumenti affilati il più possibile.

MANICO IN METALLO DIAMOND KNURL. Lo stesso manico EverEdge particolarmente amato! L'esclusiva zigrinatura a diamante sulla superficie del manico di ampio diametro, garantisce una presa sicura e confortevole. Il manico **EverEdge #9** è stato progettato per avere un peso ottimale tale da ridurre l'affaticamento della mano.

Manico n. 9 color

EVEREDGE 2.0: Gracey: Standard, MiniFive, After Five, Micro Mini Five Manico 9 Color € 64,48*				
	GRACEY STANDARD Manico 9 Color	GRACEY MINI FIVE Manico 9 Color	GRACEY AFTER FIVE Manico 9 Color	GRACEY MICRO MINI FIVE Manico 9 Color
1/2	(SG1/291E2) ■ 33 H3E921	(SAS1/291E2) ■ 33 H3E911	(SRPG1/291E2) ■ 33 H3E931	(SMS1/291E2) ■ 33 H3E901
3/4	(SG3/499E2) ■ 33 H3E922		(SRPG3/499E2) ■ 33 H3E932	
5/6	(SG5/695E2) ■ 33 H3E923	(SAS5/695E2) ■ 33 H3E913	(SRPG5/695E2) ■ 33 H3E933	
7/8	(SG7/897E2) ■ 33 H3E924	(SAS7/897E2) ■ 33 H3E914	(SRPG7/897E2) ■ 33 H3E934	(SMS7/897E2) ■ 33 H3E904
9/10	(SG9/1096E2) ■ 33 H3E925			
11/12	(SG11/1293E2) ■ 33 H3E926	(SAS11/1293E2) ■ 33 H3E916	(SRPG11/1293E2) ■ 33 H3E936	(SMS11/1293E2) ■ 33 H3E906
13/14	(SG13/1498E2) ■ 33 H3E927	(SAS13/1498E2) ■ 33 H3E917	(SRPG13/1498E2) ■ 33 H3E937	(SMS13/1498E2) ■ 33 H3E907
15/16	(SG15/1693E2) ■ 33 H3E928	(SAS15/1693E2) ■ 33 H3E918	(SRPG15/1693E2) ■ 33 H3E938	
17/18	(SG17/1898E2) ■ 33 H3E929	(SAS17/1898E2) ■ 33 H3E919		
11/14				

Angolazione della lama curette Gracey

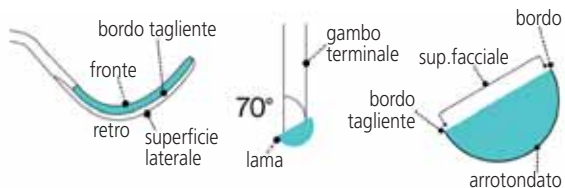

*richiedeteci offerte attuali e per quantità

EVEREDGE BIOGENT Disegnati dai Dr.i Antonella Labriola e Pierpaolo Cortellini, presentano una lama meno spessa per un'atraumatica ed efficiente accesso al parodonto. Presentano una migliore angolazione e la codifica a colori agevola la gestione degli strumenti.

Manico n. 9 color

EVEREDGE 2.0 Labriola-Cortellini Manico 9 Color € 64,48 *			
1/2	(SG1/29LCE2) ■ 33 H3E9LC12	11/12	(SG11/129LCE2) ■ 33 H3E9LC112
7/8	(SG7/89LCE2) ■ 33 H3E9LC78	13/14	(SG13/149LCE2) ■ 33 H3E9LC1314



Dott.ssa Antonella Labriola



Dott. Pierpaolo Cortellini

COLORVUE™ PROBES

Le sonde Colorvue presentano una punta di colore giallo vivido con tacche color nero per un migliore contrasto con le strutture intraorali sia nella dentatura naturale che in quella su impianti. La flessibilità ottimale e la punta arrotondata garantiscono maggiore comfort e accettabilità da parte del paziente. Le punte della sonda sono sicure per l'uso con gli impianti e presentano un design twist-on per una facile sostituzione delle punte usurate.

- Confezioni:**
- 12 punte stesso modello
 - Kit con 1 manico Satin Steel + 7 punte
 - Kit con 1 manico + 12 punte



33 H981PH6
Manico per sonde Colorvue in acciaio satinato € 24,87

Sonde ColorVue in conf. da: • 12 tips € 130,66 • Kit: 1 manico + 7 tips € 97,75 • Kit: 1 manico + 12 tips € 160,27				
#11 Probe 12 Tips 33 HOPTC11 (PCV11PT) (3-6-8-11)	#12 Probe 12 Tips 33 HOPTC12 (PCV12PT) (3-6-9-12)	William Probe 12 Tips 33 HOPTCW (PCVWPT) (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)	UNC12 Probe 12 Tips 33 HOPTUNC12 (PCVUNC12PT) (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)	OXFORD Probe 12 Tips 33 HOPTOX12 (PCV012PT) (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15)
#11 Probe Kit 1 manico +7tips 33 HOPTC11K6 (PCV11KIT6)	#12 Probe Kit 1 manico +7tips 33 HOPTC12K6 (PCV12KIT6)	William Probe Kit 1 manico +7tips 33 HOPTCWK6 (PCVWKIT6)	UNC12 Probe Kit 1 manico +7tips 33 HOPTUNCKIT12 (PCVUNC12KIT6)	
#11 Probe kit 1 manico +12tips 33 HOPTC11K12 (PCV11KIT12)	#12 Probe Kit 1 manico +12tips 33 HOPTC12K12 (PCV12KIT12)	William Probe Kit 1 manico +12tips 33 HOPTCWK12 (PCVWKIT12)	UNC12 Probe Kit 1 manico +12tips 33 HOPTUNCKIT12 (PCVUNC12KIT6)	

COLORVUE™ BIOTYPE PROBES



Utilizzare prima la sonda bianca, inserire nel solco con una pressione <30g. Se si vede il bianco attraverso il solco gengivale, il biotipo è sottile.



Se il bianco non è visibile, utilizzare la sonda verde. Se si vede il colore verde il biotipo è medio.



Se il verde non è visibile attraverso il solco gengivale, utilizzare la sonda blu. Se il colore blu è l'unico visibile attraverso il solco, il biotipo è spesso.



33 H981PH6 Manico per sonde Colorvue in acciaio satinato € 24,87

12 Blu #11 33 HOPBTB (PBTPB)	12 Verde #12 33 HOPBTG (PBTPG)	12 Bianco #W 33 HOPBTW (PBTPW)	12 Bianco #UNC12 33 HOPBTK12 (PBTPKIT12)
#11 Probe kit 1 manico +12tips 33 HOPTC11K12 (PCV11KIT12)	#12 Probe Kit 1 manico +12tips 33 HOPTC12K12 (PCV12KIT12)	William Probe Kit 1 manico +12tips 33 HOPTCWK12 (PCVWKIT12)	UNC12 Probe Kit 1 manico +12tips 33 HOPTUNCKIT12 (PCVUNC12KIT6)





IMPLACARE II Scaler per Impianti Implant Scaler HU-FRIEDY

Realizzato in resina Plasteel™ fornisce estremità di lavoro e profili più sottili che consentono di adattarsi meglio e ottenere un scaling più efficace alle superfici implantari efficacemente

e al contempo senza causare alterazione all'abutment dell'implianto.

Sono state selezionate e prodotte cinque forme di punte per offrire le opzioni più adatte alle esigenze di scaling individuale.



33 H331MKII (IMPCKITII) Implacare Maintenance Kit:
2 manici, 5 paia di tips, 4 set di Tips Colorvue Probe € 139,10



Immagine dello strumento con montate due punte Implacare del 2045



33 H981IM6 (IMPKDL6) Manico Implacare doppio in acciaio satinato € 27,04

"La rilevazione precoce delle malattie perimplantari rende il trattamento più facile e veloce e il successo più probabile".

33 H331CH6 (PH6) Implascaler Kit: 1 manico e 12 paia di Tips. € 124

Langer 1/2	Barnhart 5/6	Columbia 4R/4L	H6/H7	2045
33 H331CL1/26	33 H331CB5/66	33 H331CC4R/4L6	33 H331CH6/H76	33 H331C20456

Implascaler refill: 12 paia di Tips € 98,60

Langer 1/2	Barnhart 5/6	Columbia 4R/4L	H6/H7	2045
33 H331CL1/2	33 H331CB5/6	33 H331CC4R/4L	33 H331CH6/H7	33 H331C2045

Manico **Super EXcel**



Super Grip

Hi Tech S. Steel Tond ocavo ø 10 mm Super leggero

Super Sharp Technology - Long Lasting

Manico **HEX**



Hi Tech S. Steel Esagonale cavo ø 7 mm Super leggero

SONDE SINGOLE *Single End Probes*

UNC15 (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15)



33 005205 Sonda Singola UNC 15 Manico 10 mm SEX € 27,50



33 001205 Sonda Singola UNC 15 Manico ø 7 mm HEX € 21,00

PERIODENT Hi-Tech

"Consente oltre alle classiche manovre di sondaggio parodontale, di eseguire le varie misurazioni richieste per configurare, preventivamente, il disegno delle incisioni e, successivamente, verificarne la congruenza."

(Abundo-Corrente: Chirurgia plastica parodontale Ed. ACME)

SONDE DOPPIE *Double End Probes*

PERIODENT Hi-Tech




Sonda **PERIODENT** Ideale per le forzazioni data la curvatura specifica e l'estremità ben arrotondata.

33 005233 Sonda 2N Nabers Manico SEX € 28,50




33 005234 Sonda PERIODENT 2N Nabers Manico SEX € 28,50 ad esa € 19,00

33 005234/3 Sonda PERIODENT 2N Nabers Manico SEX (lucido) € 28,50 ad esa € 9,00


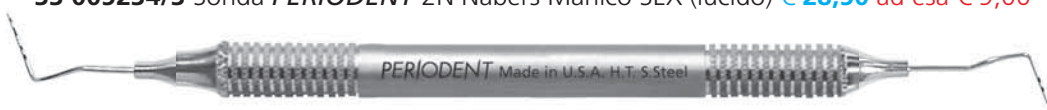


33 005221 Sonda CPN116 € 28,50


L'unica che non graffia la superficie implantare

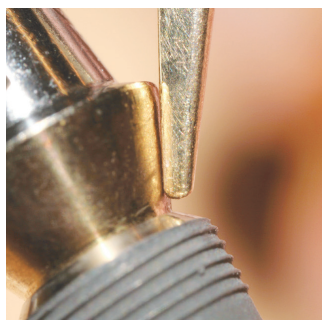

SEM x100 e x1000 Ruvidezza superficiale dopo il trattamento con punte in diversi materiali: dall'alto in basso: Acciaio Inox / Carbonio / IS Tip

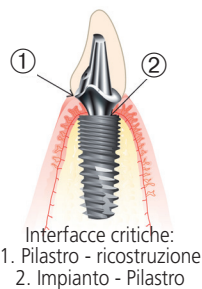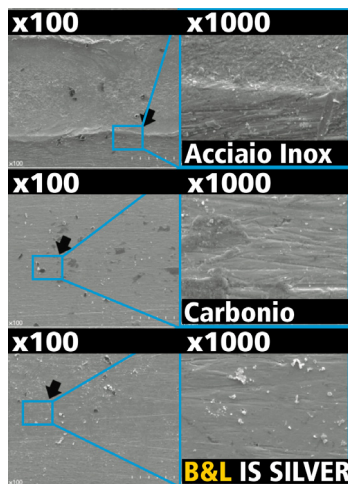



La punta IS Silver è monopieziente

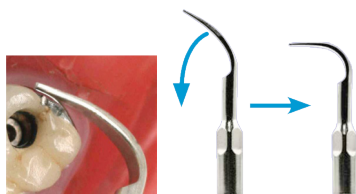

Piegabile per l'accesso distale

"Sono rimasto impressionato dall'efficacia delle punte per detartrasi tipo S, le migliori che abbia mai utilizzato".

Dr. Sean Kim,
NJ, USA

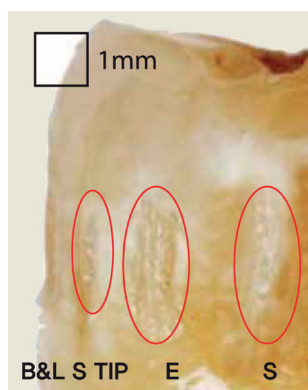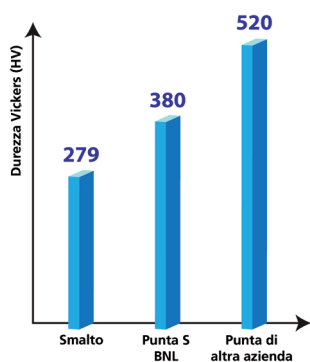

Preserva in modo ottimale la struttura dentaria

Confronto tra aree di superficie dentaria dopo l'utilizzo di un ablatore a ultrasuoni con una punta S BNL o una punta convenzionale (S) alla stessa regolazione di potenza. (Controllo: smalto integro E).

PUNTE A ULTRASUONI PIEZO IS SILVER PER IMPIANTI

IS Silver: la soluzione per la perimplantite!

Con IS Silver, malleabile e ad alta resilienza, a differenza dagli strumenti convenzionali o dai normali scaler ultrasonici, a superficie dell'impianto può essere trattata con facilità, evitando di graffiarla.

Miglioramento certo delle condizioni parodontali del paziente con implantoprotesi grazie all'efficacia e alla biocompatibilità dell'originale e brevettata punta IS Silver.

- Efficace strumento di prevenzione e trattamento della peri-implantite
- Manutenzione parodontale di routine e detartrasi attorno a impianti e implantoprotesi
- Ablazione completa ed efficace dei residui di cemento dopo il fissaggio della protesi implantare
- Efficace e delicata per la detartrasi delle ricostruzioni in ceramica, senza preoccupazioni di frattura, particolarmente nell'area mascellare anteriore.

uso al 40% della potenza Max

- 59 524S5A Punta IS x impianti STS-5a att. Usa. **79,00**
- 59 524S5A3 Punta IS x imp. STS 5a att. Usa 3 pz. . . . **178,00**
- 59 524S5A5 Punta IS x imp. STS-5a att. Usa 5 pz. . . . **285,00**
- 59 524S5E Punta IS x impianti BLS-5e att. Eu. **79,00**
- 59 524S5E3 Punta IS x imp. STS 5e att. Eu 3 pz. **178,00**
- 59 524S5E5 Punta IS x imp. STS-5e att. Eu 5 pz. **285,00**

PUNTE PER DETARTRASI, TIPO S


Per igiene e parodontologia

Efficaci, delicate e durevoli

La miglior scelta per una detartrasi Ottimale!

- Durata 2-3 volte superiore alle punte convenzionali grazie all'acciaio inossidabile innovativo che riduce la deformazione e aumenta la resilienza della punta
- **Minore Durezza e massima resilienza per non danneggiare la superficie dello smalto**
- La grande resistenza all'usura della punta rende massima l'efficienza del trattamento nel lungo periodo
- Maggior resistenza alla corrosione - provata dal test* in NaOCl al 5 % per 30 giorni
- Massima efficacia del trattamento - l'oscillazione, a bassa o alta potenza, viene rilevata al tatto.

***Test delle caratteristiche di resistenza alla corrosione eseguito in NaOCl 5% per 30 giorni**

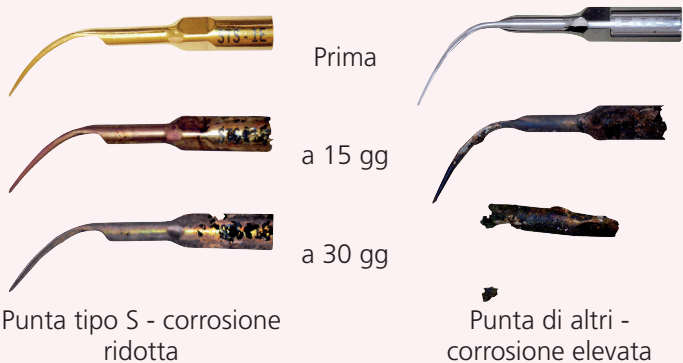

PUNTE A ULTRASUONI PIEZO PER DETARTRASI - TIPO S

Tipo		Corto	Lungo	
A: SAT style	Uso a potenza tra Media e Max	59 524S1A	-	€ 69,50
E: EMS style	Uso a potenza tra Media e Max	59 524S1E	59 524L1E	

PERIODENT TIPONE by Xpedent

Punte Ultrasuoni Multi-Functional per ogni applicazione

Abbiamo scelto la produzione in grado di offrire un sistema di gestione della qualità (QMS) completo per garantire sia i requisiti dei Clienti sia quelli legali.

I prodotti finiti rispettano i principi **ISO 9001** e **ISO13485** e naturalmente le disposizioni **CE**; questo

a garanzia della massima soddisfazione dei clienti e dei requisiti legali e con un rapporto qualità prezzo eccezionale. La qualità che offriamo è certa e testata, ma è pur sempre un punto di partenza per un miglioramento continuo dei processi di produzione "SGQ" che sono monitorati annualmente e quindi implementati.



ENDODONZIA. Per tante situazioni di terapie endodontiche. Eccellenti per la rimozione di perni, di dentina nella camera pulpare, ricerca e allargamento degli orifizi, preparazione canalare, rimozione di strumenti fratturati, preparazione dei canali.


PREPARAZIONE CAVITARIA. Sono punte rivestite in diamante consigliate per la preparazione della cavità prima di eseguire il resto della procedura.

SCALING. È un lavoro di precisione. La selezione di strumenti appropriati è essenziale per raggiungere una completa decontaminazione parodontale. L'ampia selezione che offriamo vi consente di trovare lo strumento esatto per ogni situazione.

PARODONTOLOGIA. Perio Tip hanno un profilo sottile per le levigature radicolari e consentendo un accesso facile alle forcazioni e lungo le radici curve

TIPONE SELECTION Ems Style


eA

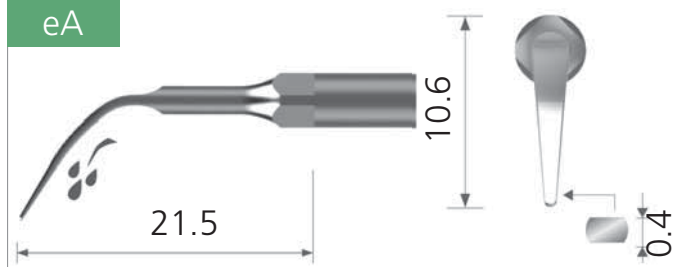

Universale. Per rimuovere accuratamente tartaro duro sotto gengivale in ogni quadrante.

59 X24EA € 32,00


ePS

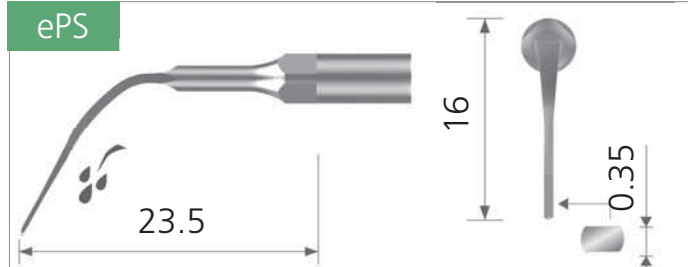

PerioSlim. PS, veloce e minimamente invasivo, è ideale per la rimozione del tartaro in tasche parodontali profonde su tutti i quadranti.

59 X24EPS € 32,00

eP

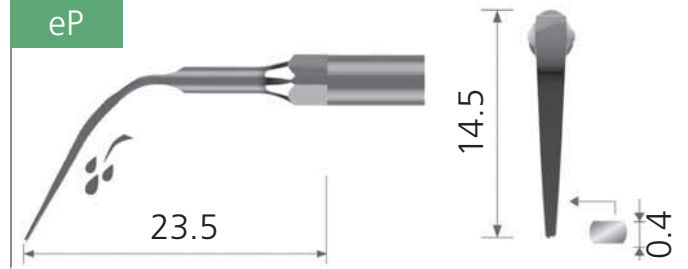

Perio. Adatto per la rimozione precisa di tartaro duro subgengivale e sopragengivale in tutti i quadranti.


59 X24EP € 32,00

eICP SET




EMS style € 60,00 -15%	
59 X24EICPS	eICP set
chiave ICP WREN inclusa	
	59 X24ICPW Chiavetta ICP WREN € 9,00 € 7,50 (per tutte le punte ICP utilizzare la chiavetta ICP WREN)

ICPpeek

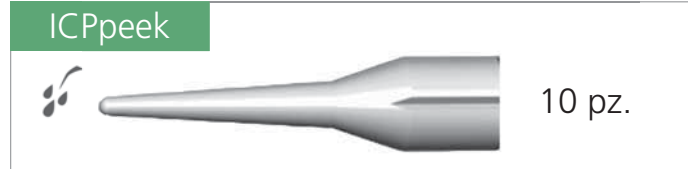


EMS style € 90,00 -15%	
59 X24ICP	ICPpeek
Da utilizzare con chiave ICP WREN	
59 X24ICPW	€ 9,00 € 7,50

Ems STYLE

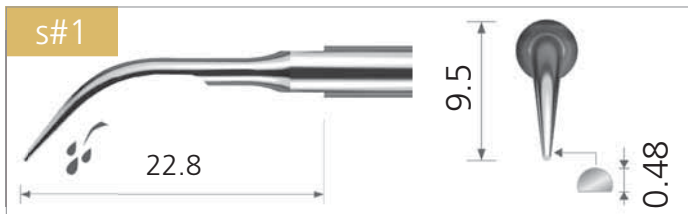


Universale. Semplice trattamento sopragengivale con rimozione del tartaro senza danni allo smalto.

59 X24S1 € 32,00

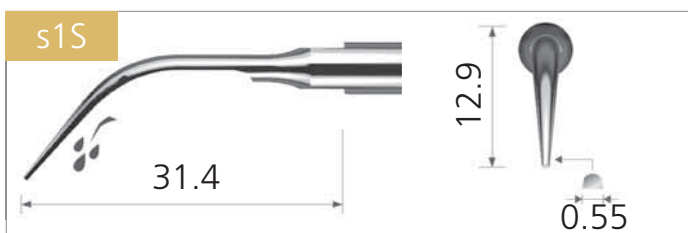

Sottile. Sopra gengivale e sotto subgengivale. Particolarmente efficace negli spazi interprossimali.

59 X24S1S € 32,00

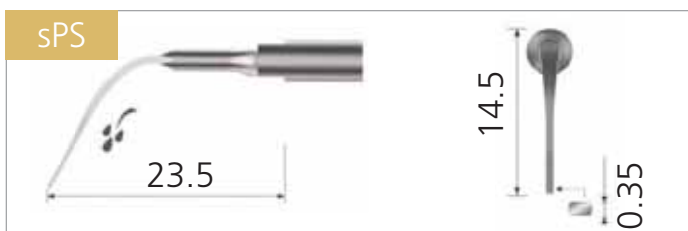

PerioSlim. Lo strumento sPS è veloce e minimamente invasivo, ideale per la rimozione del tartaro nelle tasche parodontali profonde in tutti i quadranti.

59 X24SPS € 32,00




Pulizia d'impianto. PEEK per il TRATTAMENTO in sicurezza e delicatezza di RESTAURI su impianti. sICP contiene 1 chiave ICP, 1 kICP e 2 peek ps.

59 X24SICP € 75,00




Ricambi PEEK - confezione da 10.

59 X24ICP € 90,00

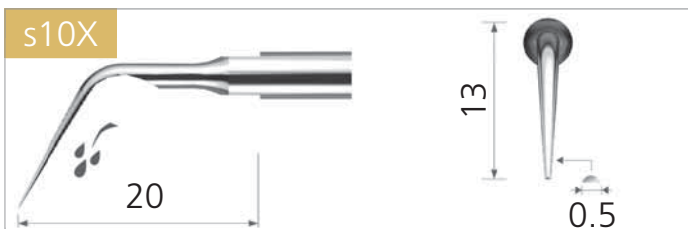


Interprossimale. La sua parte piatta lo rende adatto negli spazi interprossimali e nel trattamento sopragengivale. Il suo design anatomico consente un utilizzo rapido ed efficiente.

59 X24S10X € 39,00

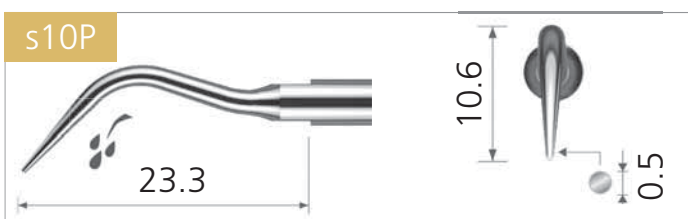


Shallow. Strumento tondo sottile adatto per il trattamento nelle tasche poco profonde inferiori a 2-3 mm.

59 X24S10P € 39,00

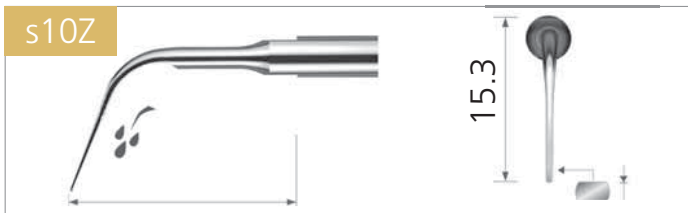

Sub-gengivale. Tasche medie (<4mm). La rimozione di biofilm e di depositi così, consente l'osservazione della profondità della tasca usando la scala 3mm.


59 X24S10Z € 39,00

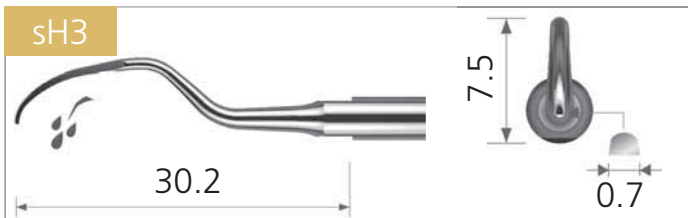

Periodonics anteriori. Consente il trattamento del blocco incisivo-canino. Il bordo guida è orientato parallelamente alla tasca. Agevola il lavoro nella tasca parodontale senza ledere il legamento.


59 X24SH3 € 39,00

Kavo STYLE

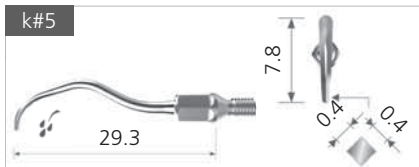


Generale. Per la rimozione del tartaro su tutte le superfici dei denti.

59 X24K5 € 39,00

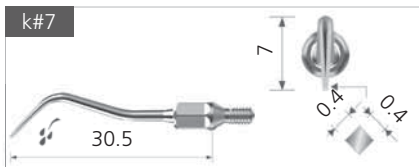


Sottogengivale. Strumento utilizzato per scaling sottogengivale.

59 X24K7 € 39,00

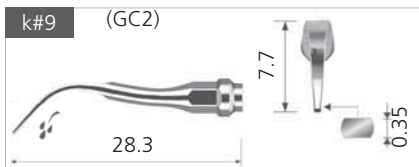


Sopragengivale. Utilizzato per rimuovere tartaro e la placca batterica nelle aree interdentali sopragengivali.

59 X24K9 € 39,00

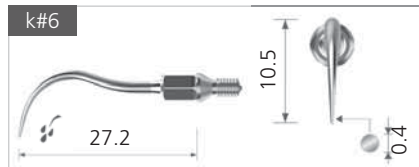


Fine. Strumento eccellente per aree più piccole e per quelle di difficile accesso.

59 X24K6 € 39,00

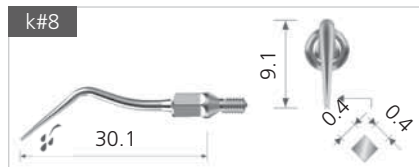

Sottogengivale.

59 X24K8 € 39,00

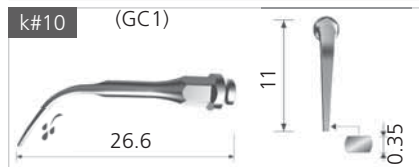

Sopragengivale. Utilizzato per rimuovere il tartaro e placca batterica nelle aree interdentali sopragengivali.


59 X24K10 € 39,00

KAVO style: SONICFLEX (airscaler) € 39,00

59 X24K5	5	59 X24K6	6	59 X24K7	7	59 X24K8	8
----------	---	----------	---	----------	---	----------	---


KAVO style: SONICFLEX (Piezo) € 39,00

59 X24K9	9	59 X24K10	10
----------	---	-----------	----

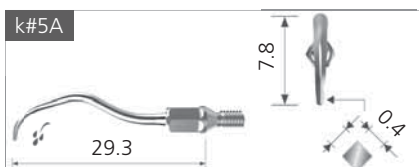


Generale. Per la rimozione del tartaro su tutte le superfici dei denti.

59 X24K5A € 39,00

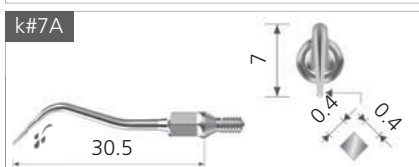


Sottogengivale. Strumento utilizzato per scaling sottogengivale.

59 X24K7A € 39,00

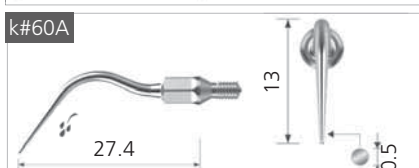


Lungo e dritto con superfici arrotondate, viene utilizzato per una pulizia delicata delle tasche durante trattamento parodontale. Per un'efficace pulizia in tasche fino a 9 mm di profondità. È usato in regione anteriore, superfici lisce.

59 X24K60A € 39,00

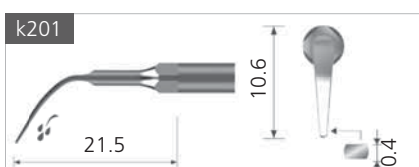


Universal. Rimozione accurata di tartaro solido sopra gengivale in tutti i quadranti.

59 X24K201 € 39,00

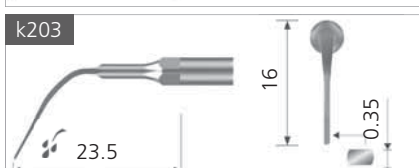


PerioSlim. Veloce e minimamente invasivo. Ideale per la rimozione del tartaro in tasche parodontali profonde in tutti i quadranti.

59 X24K203 € 39,00

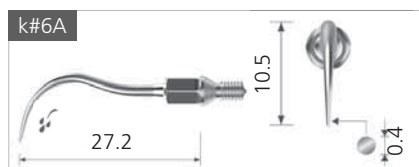

Strumento eccellente per aree più piccole e per quelle di difficile accesso.

59 X24K6A € 39,00

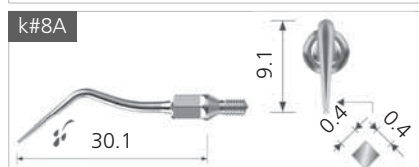


Sottogengivale. Per la rimozione di tartaro sottogengivale.

59 X24K8A € 39,00

KAVO style: SONICFLEX – QUICK (airscaler) € 39,00

59 X24K5A	59 X24K6A	59 X24K7A	59 X24K8A	59 X24K60A
5A	6A	7A	8A	60A

Da utilizzare con la chiave **TW KAV Q € 37,50**

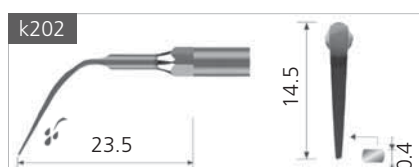


Perio. Lo strumento P è adatto per la rimozione precisa del tartaro duro subgengivale e sopragengivale e concrezioni in tutti i quadranti

59 X24K202 € 39,00

KAVO style: PiezoLED – PiezoSOFT € 39,00


59 X24K201	201	59 X24K202	202	59 X24K203	203
------------	-----	------------	-----	------------	-----

Da utilizzare con la chiave **TW KAV M € 15,00**

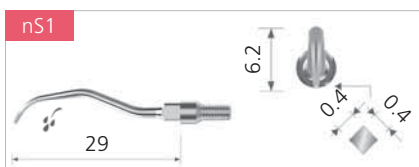


Universale. Rimozione di tartaro sopragengivale.

59 X24NS1 € 39,00

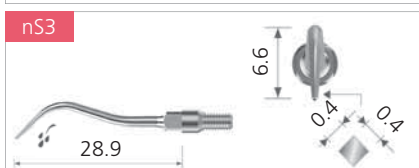

Falce. Rimozione del tartaro sopragengivale.

59 X24NS3 € 39,00

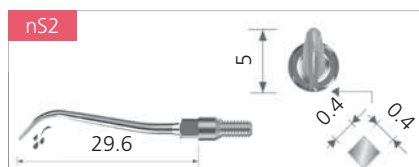

Perio. Rimozione di tartaro sopragengivale.

59 X24NS2 € 39,00

NSK style: (Airscaler) € 39,00

59 X24NS1	nS1	59 X24NS2	nS2	59 X24NS3	nS3
-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----

Da utilizzare con la chiave **TW NSK P € 15,00**

Nsk STYLE



CHIAVI DINAMOMETRICHE € 15,00

59 X24TEM	59 X24TSA	59 X24TKQ	59 X24TKA	59 X24TNS
TW EMS P	TW SAT P	TW KAV Q	TW KAF M	TW NSK P

ICP 59 X24ICPW Chiavetta ICP WREN € 7,50
(per tutte le punte ICP utilizzare la chiavetta ICP WREN)

Gli ablatori piezoelettrici **D600** e **U600** differenziano solo per l'attacco D600 Satelec Style e U600 EMS Style

Garanzia di massima potenza, controllo e precisione in un unico dispositivo per Igiene ed Endodonzia.

Massimo comfort per il paziente. Presenta delle ottime funzioni per il trattamento indolore mediante le oscillazioni sinusoidali modulate in frequenza e per la ricostruzione canalare minimamente invasiva.

Tecnologia per Endodonzia. Il dispositivo piezoelettrico a ultrasuoni D600 è stato ulteriormente implementato anche per applicazioni in campo endodontico, incontrando il massimo gradimento da parte degli specialisti dell'endodonzia.

Multi funzioni a portata di mano. Il ridimensionamento sopra e sotto gengivale, la manutenzione dell'impianto e la terapia canalare in unico macchinario.

Oscillazioni sinusoidali modulate. U600 permette di evitare la simulazione causata dall'uscita del corrente istante, assicurando un trattamento confortevole.

Controllo intelligente. U600 assicura un monitoraggio automatico della frequenza, in base alle condizioni della superficie dei denti.

Design resistente. Il display dell'ablatore è resistente all'acqua e prevede dei controlli touch per offrire più precisione nei lavori.

**D600
D600L**



**U600
U600L**



Accessori in dotazione

Manipolo a LED	compatibile SATELEC®			HD-8L x 1
Modalità operativa	G (scaling)	P (perio)	E (endo)	
Tipologia di inserti	GD5 x 1	GD12 x 1	PD4 x 1	PD7 x 1
	ED12 x 1	ED66 x 1	ED60 x 1	
Erogazione dell'acqua	integrata	rete idrica		

Accessori in dotazione

Manipolo autoclavabile	compatibile EMS®			HW-6 x 1
Modalità operativa	G (scaling)	P (perio)	E (endo)	
Tipologia di inserti	G4 x 1	G12 x 1	P1 x 1	P3 x 1
	P8 x 1	E60 x 1	E62 x 1	
Chiave dinamometrica	x 1			Erogazione dell'acqua
				integrata
				rete idrica

59 224D600 Ablatore D600 Sat Style **€ 990,00**
59 224D600L Ablatore D600L LED Sat Style **€ 1.150,00**
richiedi offerta attuale

59 224U600 Ablatore U600 Sat Style **€ 990,00**
59 224U600L Ablatore U600L LED Sat Style **€ 1.150,00**
richiedi offerta attuale

AP-H PLUS Manipolo per air polishing

Ideato per combinare i classici trattamenti di rimozione del biofilm batterico e delle pigmentazioni estrinseche alle più specifiche derivate dagli interventi su tasche parodontali e per implantiti. L'attacco standard M4-Midwest garantisce all'AP-H la più ampia compatibilità possibile.

Versatilità

Doppio ugello in dotazione per procedure sopra gengivali e sottogengivali.

Ergonomia migliorata

Design bilanciato e leggero (l'intero dispositivo pesa 125 gr).

Ugello di piccolo calibro. 0,7 mm per la polvere e 1,4 mm per l'acqua. L'emissione della polvere risulta più concentrata e le operazioni di debridement e lucidatura ancora più accurate.

Ugello precurvabile e ruotabile a 365°. Le tip sottogengivali possono così raggiungere anche i punti più difficili. La tripla direzione di uscita della polvere e la monomandata dell'acqua, consentono una rapidità senza eguali nonostante la massima delicatezza percepita.

Elevata praticità

Contenitore trasparente per visualizzare la polvere disponibile: AP-H può utilizzare bicarbonato di sodio e glicina.

Massima semplicità di manutenzione

Design a tre sezioni scomponibili per una manutenzione semplice e poco onerosa.

Facile pulizia e manutenzione quotidiana.

Puntali di ricambio: per bicarbonato 59 222APHTB; per glicina 59 222APHTG; set ugelli monouso sottogengiva 59 222APHUM

Caratteristiche	AP-H Plus
Pressione H2O in entrata	da 0.7bar a 2.2bar (70 - 220 kPa)
Pressione aria in entrata	da 3.5bar a 4.5bar (350 - 450kPa)
Modalità operativa	continua e ad intermittenza
Peso	peso 125gr.

59 223APHP AP-H PLUS contiene: 1 manipolo, 1 set aghi per pulizia, 1 puntale sottogengivale, 1 camera stoccaggio polvere, 1 polvere bicarbonato, 1 polvere glicina, 10 ugelli monouso sottogengivali.
€ 600,00 richiedi offerta attuale

PT-B State-Of-Art nell'igiene dentale



Air Polishing



Trattamento parodontale



Trattamento endodontico



Manutenzione impianti



Conservativa

PT-B sviluppa la tecnologia e i concetti già affermati sul territorio con il PT-A, delineando una nuovo orizzonte per la profilassi dentale: 12 i livelli di potenza settabili e 4 le differenti temperature dell'acqua impostabili. PT-B implementa inoltre le migliori soluzioni ergonomiche e funzionali lato odontoiatra: pedale wireless, poggimanipoli con identificazione ad induzione, servo motore per la regolazione del flusso aria-polvere, alimentatore integrato.

Schermo Ultra HD. Display touch screen da 1280x720, chiaro, semplice ed intuitivo. Massimo controllo minimo sforzo.

Doppia possibilità di approvvigionamento idrico. Rete idrica o dispenser (600mL, 1400mL), aprendo la possibilità a soluzioni specifiche come clorexidina, perossido di idrogeno, ipoclorito, etc.

Design avanzato dei manipoli. Puro metallo, leggeri ed ergonomici garantiscono il corretto rapporto di miscelazione di acqua, aria e polvere.

Pedale wireless. Connessione Bluetooth 5.0 per una risposta super fedele ed immediata alle operazioni. La batteria interna al pedale permette un utilizzo fino a 72h.

Innovativo flusso aria polvere. Il nuovo flusso concentrico generato all'interno del dispenser-polveri, unito alla forma strutturale simmetrica ad imbuto, permette un flusso polvere più stabile ed efficiente.

Trattamento ultrasonico confortevole. Ablatore piezoelettrico dalla tecnologia indolore: vibrazioni ellittiche per disperdere la forza d'impatto tra la superficie dentale e la punta, così da garantire un ottimo comfort.

Accessori in dotazione	
Manipolo ablatore LED	x 2
Inseri ablatore in dotazione	x 14
Manipolo sbiancatore sopragengivale AP-1	x 1
Manipolo sbiancatore subgengivale AP-2	x 1
Puntali sottogengivali perio	x 10
Doppio serbatoio per H ₂ O	600 ml
	1400 ml
Dispenser polveri	x 2
Pedale multifunzione	x 1
Box di sterilizzazione	x 2
Chiave dinamometrica	x 2
Polvere bicarbonato 65 µ	1x300gr
Polvere glicina 25 µ	1x125gr
Valigia di trasporto	x1

Specifiche tecniche Prodotto esclusivo Five-in-One

Il manipolo sotto-gengivale utilizza delle tip dotate di tripla direzione d'uscita per le polveri e monomandata per l'acqua. Queste non solo permettono una pulizia a 360° della tasca parodontale, ma assicurano una velocità senza uguali al professionista, nonostante l'ampio comfort percepito dal paziente.



Sistema air-polish:



Dotato di sistema anti intasamento.



Micro-Ugello da 0,7 mm



Pulizia automatica dopo 5 minuti di inattività



Pedale wireless per un facile controllo



Connessione Bluetooth 5.0



Durata 72 ore di lavoro



Multifunzione



Potenza immediata per le zone più difficili.



Mix di punte ultrasoniche

Punte titanio	P33x 2	P50L x 2	P50R x 2
	P56 x 2	P59x 2	
Punte pulizia impianto	P94 x 1	P95 x 1	
Punte endo	E60x 2		

59 221PTB (562/00) Ablatore PT-B € 4.399,00 (€ 6.285,00)

--- (97/100) € 499,00 (€ 700,00)

PT-S1 Polvere per profilassi a base di Bicarbonato di sodio molto efficace per la rimozione delle pigmentazioni estrinseche. Bicarbonato: 65 micrometri

Bicarbonato PT-S1 4 cf. da 300 g cad. € 99,00

Limone	59 222B300L
Pesca	59 222B300P
Fragola	59 222B300F



PT-S3 Polvere per profilassi a base di glicina molto efficace per la rimozione della placca e del biofilm sopra e sottogengivale. Glicina: 25 micrometri

Glicina PT-S3 4 cf. da 125 g cad. € 110,00
59 222G125



Carrello PT-B

Esclusivamente progettato per il sistema di profilassi Woodpecker PT-B

Compatto, pratico, maneggevole e sicuro.

- L'estetica pulita e funzionale, garantisce un'estrema facilità di pulizia.
- Massima ergonomia, manovrabilità.
- Provvisto di slot di stoccaggio per dispenser e polveri.



Ultra-compatto, con il nuovo design Piezon®

Controllo con la punta delle dita, per una facile regolazione della potenza.

EMS-Swiss Quality

Richiedeteci Offerta Attuale, anche Loc.Op.



PIEZON® 150 LED Ablatore a ultrasuoni

Caratteristiche: • Controllo dei 35 livelli di potenza con la punta delle dita, per una facile regolazione della potenza • Miglioramento del rendimento e della sicurezza in qualunque situazione clinica • Temporizzazione della luce ausiliare, con una qualità da luce diurna • Fascia di potenza per i trattamenti parodontali (Soft-Perio).

59 E2150L Piezon 150 LED **1.340,00**
1 manipolo originale Piezon, 3 Punta EMS Swiss Instruments™ A, P, PS, ognuna con CombiTourque®

Indipendente con il nuovo design Piezon®

Massime performance e sicurezza in ogni situazione clinica. Controllo con la punta delle dita, per una facile regolazione della potenza.

EMS-Swiss Quality

Richiedeteci Offerta Attuale, anche Loc.Op.



PIEZON® 250 Ablatore a ultrasuoni

Caratteristiche: • Manipolo Unibody a 6 LED • Controllo dei 35 livelli di potenza con la punta delle dita, per una facile regolazione della potenza • Miglioramento del rendimento e della sicurezza in qualunque situazione clinica • Temporizzazione della luce ausiliare, con una qualità da luce diurna • Fascia di potenza per i trattamenti parodontali (Soft-Perio).

59 E2250L Piezon 250 Led **1.990,00**
1 manipolo Piezon Led, 3 Punta EMS Swiss Instruments™ A, P, PS, ognuna con CombiTourque®
59 E2250 Piezon 250 **1.690,00**
cs (con manipolo senza Led)



AIR-FLOW MASTER PIEZON® Profilassi Completa con i Sistemi Originali Piezon® e Air Flow® EMS-Swiss Quality

METODO PIEZON® • Manipolo Piezon® originale con luce LED • Tecnologia Piezon® no pain • Contenitore per liquidi • Luce led a macchina ferma per il controllo del cavo orale.

METODO AIR-FLOW® • Manipolo AIRFLOW® sopragengivale • Manipolo PERIOFLOW® con puntale graduato monouso sottogengivale estraibile • DUE FLACONI specifici per POLVERI sopra-sottogengivali: - Polvere AIR-FLOW® CLASSIC e SOFT - POLVERE AIR-FLOW® PLUS e PERIO



3 SISTEMI DISTINTI IN 1 SOLA APPARECCHIATURA



Manipolo ultrasonico con tecnologia PIEZON® NO PAIN per un trattamento indolore - massimo comfort per il paziente.



Manipolo PERIO-FLOW® con puntalino estraibile monouso per trattamenti sottogengivali con polveri PLUS e PERIO.



Manipolo AIR-FLOW® per trattamenti sopragengivali con polveri CLASSIC, CLASSIC CONFORT e SOFT.

Accessori in Omaggio: compresi nel prezzo

59 E21200 Air Flow Master Piezon: 1 Manipolo originale AIR-FLOW, 1 Manipolo originale PERIO-FLOW in Steribox inox mis. 1/2 DIN, 1 Cordone per manipolo AIR-FLOW con attacco rapido su manipolo e apparecchiatura, 1 Serbatoio per polvere AIR-FLOW, 1 Serbatoio per polvere PERIO-FLOW, 1 Flacone polvere originale AIR-FLOW, 300 g, 1 Manipolo originale Piezon, 1 Cordone per manipolo Piezon con attacco rapido su manipolo e apparecchiatura, 1 Flacone 350 ml, Cavo di alimentazione / Pedale Multifunzione
€ 6.490,00 Richiedeteci Offerta Attuale Loc.Op. € 292,57 per 24 mesi

AIR-FLOW® HANDY 3.0 PREMIUM

Sopra e sottogengivale

Profilassi sopra-sottogengivale con Nuova Polvere Plus ~14 µm

59 E2330P Air-Flow® Handy 3.0 Premium€
Richiedeteci Offerta Attuale
Loc. Operativa per 24 mesi



1.690,00

AIR-FLOW® HANDY 3.0

Sopragengivale

Ideale per tutte le applicazioni sopragengivali per risultati ottimali sull'intera superficie visibile del dente.

Ottimizzazione del comfort del paziente per le applicazioni sopragengivali.

Nuova Polvere Classic Comfort ~40 µm

59 E2330 Air-Flow® Handy 3.0 € 1.690,00
Richiedeteci Offerta Attuale
Loc. Operativa per 24 mesi





Ogni punta viene fornita con chiave dinamometrica, compresa nel prezzo.

INSERTI SCALING - PARO - PERIO

<p>59 E241A Punta A Universale per l'ablazione sopragengivale € 73,00</p>	<p>59 E241B Punta B Ablazione di grossi depositi di tartaro sulle sup. linguali € 78,00</p>	<p>59 E241C Punta C Eliminazione di grandi quantità di tartaro sopragengivale € 78,00</p>
<p>59 E241P Punta P Eliminazione di tartaro sottogengivale fino a 3 mm € 89,90</p>	<p>59 E241PI Strumento PI Per una pulizia efficace e delicata degli impianti e dei relativi trattamenti restaurativi € 109,90</p>	<p>59 E241PL3 Punta PL3 Inserito dritto per l'irrigazione della tasca parodontale e levigatura delle radici € 99,90</p>
<p>59 E241PL1 Punta PL1 59 E241PL2 Punta PL2 Strumento curvo a sin/dx per l'asportazione di frammenti a livello parodontale. Adatto per le superfici interprossimali difficilmente raggiungibili € 119,90</p>	<p>59 E241PL4 Punta PL4 59 E241PL5 Punta PL5 Strumento curvo a sin. con pallina [$>0,8\text{ mm } \varnothing$] sulla punta dello strumento per asportare frammenti a livello parodontale nelle forcazioni e nelle concavità € 119,90</p>	<p>59 E241PS Punta PS Pulizia sottogeng. e interdentale della superficie radicolare (fino a 10 mm). "La punta sottile EMS per i trattamenti parodontali offre un migliore accesso alle aree interprossimali e subgengivali" – CRA (Clinical Research Associates) Newsletter, USA, giugno 1998 € 99,90</p>

INSERTI ENDO - DRY WORK

<p>59 E16RT1 Punta RT1 Diamantato per la localizzazione dei canali e la rimozione delle calcificazioni nel terzo coronale del sistema dei canali radicolari. € 149,90</p>	<p>59 E16RT2 Punta RT2 A punta di diamante per la rimozione di sporgenze; crea un canale dritto per una agevole visibilità dello strumento. € 149,90</p>	<p>59 E16RT3 Punta RT3 Molto Lungo e sottile per ritrattamenti e per la rimozione di strumenti fratturati nel canale radicolare. Conf. 5 pz. € 189,90</p>
<p>59 E16EC3 Endo-chuck 180° Da utilizzare con gli strumenti RT3, Berutti e RE2. € 99,90</p>	<p>59 E16018 Chiavetta Piatta Per cambiare strumenti, adatta per tutti e tre gli Endochuck € 19,90</p>	<p>59 E16EC1 Endo-chuck 90° Portalima da combinare con la pulizia e levigatura canalare</p>
<p>59 E16011 Lime endodontiche Lime K per pulire e disinfettare il sistema dei canali radicolari. Set completo conf. 5 pz. € 89,90</p>	<p>59 E16ESI ESI Non tagliente in NiTi per pulizia e irrigazione efficace del sistema dei canali radicolari. Conf. 6 pz. € 59,90</p>	<p>59 E16RE2 Punta RE2 Per preparazione istmo canale radicolare per via retrograda; utilizzare con Endochuck a 120° o a 180°. Conf. 5 pz. € 189,90</p>
<p>59 E16EC2 Endo-chuck 120° Portalima da combinare con lime K per la pulizia e levigatura canalare. € 99,90</p>	<p>59 E16REB Retro Endo Berutti Diamantati per la preparazione retrograda del canale radicolare. Conf. 5 pz. € 189,90</p>	<p>59 E16SP Punta SP Punta sulla quale viene avvitato un cappuccio in PEEK per la cementazione di inlay in ceramica. € 109,90</p>
<p>59 E16h Punta H Condensazione laterale della guttaperca. € 79,90</p>	<p>59 E16SP6 Cappucci per punta SP Conf. 6 pz. € 29,90</p>	

POLVERE AIR-FLOW® CLASSIC Bicarbonato di sodio
• Granulometria media ~65 µm • 6 gusti: neutro, cassis, menta, ciliegia, limone e tropical. Applicazioni Tecniche • Rimozione del biofilm e forti pigmentazioni • Preparazione della superficie prima dei trattamenti dentali.
59 E230B65 Air-FLOW® CLASSIC - 4 flac. 300 g cad. € **95,00**

POLVERE AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT
Bicarbonato di sodio • Granulom. media ~40 µm • Gusto Limone Applicazioni Tecniche • Rimozione del biofilm e forti pigmentazioni con ottimizzazione del comfort del paziente • Preparazione della superficie prima dei trattamenti dentali.
59 E230B40 Air-FLOW® CLASSIC - 4 flac. 250 g cad. € **95,00**

POLVERE AIR-FLOW® SOFT A base di glicina
• Granulometria media ~65 µm. Applicazioni Tecniche
• Rimozione del biofilm e pigmentazioni medie/lievi
• Lucidatura dentale.
59 E230G65 Air-FLOW® SOFT - 4 flac. 200 g cad. € **114,00**

POLVERE AIR-FLOW® PERIO
A base di glicina • Granulometria media ~25 µm. Applicazioni Tecniche • Rimozione del biofilm dalle tasche fino a 4 mm su denti naturali e impianti • Rimozione del biofilm dalle tasche parodontali profonde, da 4 a 10 mm su denti naturali e impianti
59 E230G25 Polvere Air-FLOW® PLUS
4 flaconi, 120 g cad. € **68,00**

POLVERE AIR-FLOW® PLUS Acariogenico
A base di eritritolo 40 µm • Granulometria media ~14 µm
• Contiene clorexidina (0,3%) Applicazioni Tecniche
• Rimozione del biofilm e pigmentazioni medie/lievi con ottimizzazione del comfort del paziente • Lucidatura dentale
• Rimozione del biofilm dalle tasche fino a 4 mm su denti naturali e impianti • Rimozione del biofilm dalle tasche parodontali profonde, da 4 a 10mm su denti naturali e impianti
59 E230E14 Air-FLOW® PLUS Cf. 4 flaconi, 100 g cad. € **99,00**



Selettore acqua/miscela

Manipolo accluso all'apparecchio



Peso: 1,75 kg
Pressione di lavoro (aria): 35 psi
Dimensioni (Alt./largh./prof.): 90x130x210 mm incl. supporto per manipolo e connettore.

Tecnologia innovativa anti-intasamento



Posizione di lavoro



Lo spray viene sempre diretto dalla gengiva verso la superficie dentaria per evitare di spruzzare direttamente sui tessuti molli. In linea generale si preferisce lavorare in visione diretta, chiedendo al paziente di girare la testa nella posizione più idonea.

La tubatura trasparente morbida e flessibile sulla testina del manipolo agisce da retrattore guance per trattamenti nei quadranti posteriori, evitando il ricorso ad altri retrattori, caratteristica importante quando si opera senza l'aiuto di un'assistente.

Proteggono il viso da lucidatura con bicarbonato e ablazione a ultrasuoni.



JETPOLISHER 2000

Lucidatrice ad aria e bicarbonato

L'unica approvata F.D.A. per la pulizia degli impianti

- **Esclusivo brevetto H.S.T.®** (4.595.365): previene l'ostruzione
- Flusso omogeneo unico!
- Collegabile direttamente agli attacchi delle turbine (30-35 p.s.i.)
- Utilizza la pedaliera del riunito
- Non richiede installazione
- Leggero e trasportabile
- Manipolo autoclavabile incluso
- Serbatoio ampio
- Modalità Sciacquo/ lucidatura per lavorare in modo efficiente
- Testina autopulente che evita ostruzioni dell'ugello.

Grani cubici per la massima efficacia!



Bicarbonato che non "pizzica". Gusto non salato.

- Evita intasamenti e risucchi.
- Sicuro anche per gli impianti in titanio.
- Approvati FDA (Food & Drug Administration) e CE

Jetpolisher 2000 con attacco

59 523220	59 523230	59 523240
Borden	Midwest	Morita
59 523250	59 523290	59 523260
Kavo Miniflex	Sirona Siemens	W&H

Apparecchio con manipolo autoclavabile, Sostegno manipolo, Attacco, 6 Tubicini spray, Polvere per lucidatura (campione). € 1.290,00 Loc. Op. per 24 mesi

Connettori Jetpolisher 2000

€ 198,50 cad.			€ 130,00 cad.	
59 52299	59 52291	59 52292	59 52297	59 52296
Kavo	Sirona	W&H	Midwest	Borden

59 523004 Bicarbonato Deldent 79,00
menta 4 Barattoli da 250 g cad.

PERIOCOMFORT Drappi protettivi PERIODENT

Drappi antispruzzo molto apprezzati da igieniste e pazienti perché rappresentano una soluzione pratica ed efficace per proteggere il paziente evitando di "avvolgerlo" in tovaglioli di carta. Disponibile nei tipi lavabile e monouso

- La retina della metà superiore cattura lo spray mentre il tovagliolo spugnoso della metà inferiore assorbe lo spray d'acqua.

PerioComfort lavabile 12 pz. € 90,50

GIALLO	VERDE	BLU	BIANCO
53 74120Y	53 74120G	53 74120B	53 7420W

PerioComfort monouso 50 pz. € 79,00

BLU 53 74110B



PERIODENT **QARTZ**



- Miscela unica di agenti pulenti e lucidanti • **Massimizza** la rimozione delle macchie e riduce al minimo la perdita dello smalto
- Aiuta a mantenere un livello di fluoro efficace rinforzando lo smalto e prevenendo la carie • Pasta realmente antispruzzo grazie alla consistenza densa • Si sciacqua facilmente e in modo predicibile
- Senza glutine • Made in USA • Contiene xilitolo, ideale per la prevenzione della carie • **1,23% fluoro** • Disponibile anche senza fluoro • Disponibile in quattro grane: Fine, Media, Grossa ed Extra Grossa (a richiesta) • Disponibile in ottimi gusti: Bubble gum, Ciliegia, Menta, Lampone, Arancia, Uva e gusti assortiti a richiesta • Disponibile in vasetti o coppette.



Priva di glutine • Grane disponibili RDA: F 55; M 75; C 85; X-C 95 • Scheda tecnica disponibile a richiesta

QARTZ 200 coppette monodose 2 g. € 49,00			
Gusto	FINE RDA 55	MEDIA RDA 75	GROSSA RDA 85
Menta	51 97162FME	51 97162MME	51 97162GME
Ciliegia	51 97162FCL	51 97162MCL	51 97162GCL
Bubble gum	51 97162FBG	51 97162MBG	51 97162GBG
Lampone	51 97162FLA	51 97162MLA	51 97162GLA
Arancia	51 97162FAR	51 97162MAR	51 97162GAR
Uva	51 97162FUV	51 97162MUV	51 97162GUV
Neutro*	51 97162FNE	51 97162MNE	51 97162GNE
Assortimento	51 97162FAS	51 97162MAS	51 97162GAS

*Neutro = senza: coloranti, aromi, fluoro

QARTZ Barattolo MEDIA RDA 75	
100 g € 15,90	340 g € 35,00
51 971661MM	51 971663MM
51 971661MC	51 971663MC
51 971661MB	51 971663MB
51 971661MN*	51 971663MN*

*Neutro = senza: coloranti, aromi, fluoro



MERSSAGE SHOFU Paste per profilassi fluorate
Le paste Merssage contenenti fluoro rimuovono la placca e rendono la superficie dentaria liscia e lucida.

Erogare una piccola quantità di pasta su uno spazzolino o su una coppetta. Applicare la pasta su tutta la superficie del dente a bassa velocità (meno di 2,000 giri/min.). Non usare con lo spray d'acqua. Al termine della pulizia sciacquare completamente il cavo orale.

51 57672 € 15,00
Merssage Regular, 40 g

viene usata per rimuovere macchie estrinseche dalle superfici dentarie ed all'inizio dei trattamenti di profilassi. Serve anche per lucidare le superfici dei denti dopo la rimozione di apparecchi ortodontici.

Fluoro: 500 ppm
Indice di Abrasione (RDA): 170-180
Dimensione delle particelle: 70 µm
Ruvidezza superficiale: 0,074 µm
Abrasivo: Pomice
Gusto: Menta



51 57673 € 15,00
Merssage Fine, 40 g

viene usata per la rimozione di macchie, per la lucidatura successiva alla detartrasi e dopo gli sbiancamenti.

Fluoro: 500 ppm
Indice di Abrasione (RDA): 40-50
Dimensione delle particelle: 15 µm
Ruvidezza superficiale: 0,045 µm
Abrasivo: Silicato
Gusto: Limone.



51 57675 € 15,00
Merssage Plus, 38 g

è adatta alla lucidatura successiva alla detartrasi, per prevenire la formazione di nuove macchie. Trova impiego anche nella pulizia di materiali ricostruttivi e nella lucidatura delle loro superfici.

Fluoro: 950 ppm
Indice di Abrasione (RDA): inferiore a 10
Dimensione delle particelle: 0,04 µm
Ruvidezza superficiale: 0,045 µm
Abrasivo: Silicato
Gusto: Arancia.



Merssage - Riepilogo Usi

1. Rimozione di placca e macchie esterne dalle superfici dentali e lucidatura dei denti
2. Lucidatura dopo la rimozione di attacchi ortodontici
3. Lucidatura dopo la rimozione del tartaro
4. Lucidatura dopo lo sbiancamento
5. Prevenzione per la ricorrenza di macchie
6. Pulizia di materiali ricostruttivi e lucidatura della superficie

	REGULAR	FINE	PLUS
1. Rimozione di placca e macchie esterne dalle superfici dentali e lucidatura dei denti	✓	✓	-
2. Lucidatura dopo la rimozione di attacchi ortodontici	✓	✓	-
3. Lucidatura dopo la rimozione del tartaro	-	✓	✓
4. Lucidatura dopo lo sbiancamento	-	✓	✓
5. Prevenzione per la ricorrenza di macchie	-	-	✓
6. Pulizia di materiali ricostruttivi e lucidatura della superficie	-	-	✓



Fluoro: Assente
Dimensione delle particelle: 70 µm
Abrasivo: Pomice

Indice di Abrasione (RDA): 170-180
Ruvidezza superficiale: 0,096 µm
Gusto: Insapore.

PRESSAGE esente da fluoro

- Per la pulizia dei denti prima dell'applicazione di mordenzanti, agenti adesivi e sigillanti • Senza fluoro che può influire negativamente sulle forze di adesione • Pulisce in piena sicurezza.

51 57674 **13,90**



ENAMELAST Vernice al fluoro senza glutine

Costituita da fluoruro di sodio al 5% aromatizzata e dolcificata con Xilitolo, in resina naturale veicolante. Formula esclusiva con agente brevettato che promuove l'adesione

- Eccellente rilascio e assorbimento di fluoro
- Consistenza liscia, non granulosa
- Pressoché invisibile
- Senza noci e senza glutine

Gusti disponibili: orange, cream, coolmint, bubble gum, assortimento, walterberry, caramel (a richiesta).

	50 pz	4x50 gusti	Siringhe 2
Bubble gum	50 18363		
Ass. 200 pz		50 18368	50 18521
	€ 92,10	€ 323,40	€ 9,80



SUPERBRUSH PERIODENT Spazzolino intracoronale

- Strumento ideale per la pulizia anche nelle zone più impervie
- Pulizia delle preparazioni
- Pulizia del perimetro dei bracket ortodontici
- Pulizia prima dell'applicazione del sigillante
- Le fibre compresse consentono di non sporcare le aree adiacenti e applicano la pressione adeguata
- Monopaziente.

Per la pulizia intracoronale ed extracoronale prima di restauri diretti, inlay, onlay e corone. È usato con Consepsis Scrub per rimuovere i residui di cemento provvisorio senza provocare abrasioni alle gengive. SuperBrush accede agevolmente alle preparazioni di classe I, II, III, IV, V e agli imbrocchi endodontici. Pulisce anche attorno ai bracket ortodontici e viene usato prima dell'applicazione del sigillante.

30 091091	30 091092	30 091093
30 pz. € 47,10	50 pz. € 73,00	100 pz. € 134,90



"Pulisce, lucida e desensibilizza"

Alta tollerabilità. Il gusto delicato al mentolo e la consistenza della pasta risultano gradevoli ai pazienti di ogni età.



PROPHYCARE PRO DIRECTA Pasta profilassi

Abrasione variabile. La pressione di frizionamento riduce la dimensione delle particelle per una lucidatura delicata.

Procedura in 1 solo passaggio. Per togliere le macchie e per la lucidatura finale, con riduzione del tempo impiegato.

Abrasione delicata ed efficace. Basso valore RDA e smacchianti biodegradabili per l'efficace rimozione delle macchie e una lucidatura eccellente.

Desensibilizzante. Chiude i tubuli dentinali e dà sollievo nei casi di ipersensibilità.

Agente remineralizzante. Con fluoruro di sodio (0,1%) per remineralizzare lo smalto dopo la pulizia e prevenire la carie.

51 77620	ProphyCare PRO	28,50
	Pasta per profilassi tubo 84 g	
51 77610	ProphyCare PRO	144,00
	Pasta per profilassi monodosi 2 g 144 pz.	
51 77210	Coppette ProphyCare Cup	67,50
	gambo CA cf. 144 pz.	



Manipolo riduttore 4:1 EZ Cone
40 710010 € 290,00



TWIST "TO IT" Contrangolo per profilassi Monopaziente innovativo a contatto continuo

Azione reciprocante a 90° (1/4 di giro), avanti e indietro, non ruota e non genera calore, **non sparge pasta per profilassi, sangue o saliva.** Non taglia né strappa i tessuti molli ed è ideale per l'applicazione di medicamenti. Il suo impiego aumenta il confort e l'accettazione del paziente.

TWIST "to it" Contrangoli reciprocanti monopaziente, 100 pz.				
∞	Coppette morbide	Coppette dure	Spazzolini piatti	Spazzolini conici
90°	51 777101	51 777102	51 777113	51 777114
120°	51 777121	51 777122		51 777124
	€ 125,00	€ 125,00	€ 135,00	€ 135,00



RECIPROXY+ Contrangolo reciprocante per profilassi, monopaziente.

- Contatto continuo • Non surriscalda • Latex free

Reciproxy sono di colore bianco, verde arancione e blu, confezione assortita. Tipo Soft
L'azione reciprocante a 60° consente una lucidatura rapida e così, non ruotando, non genera calore.
Sia il movimento reciprocante che il design interno della coppetta a turbina, fanno sì che la pasta non si spanda e che saliva o sangue non vengano schizzati durante la procedura.
Estremamente delicato sui tessuti offre anche un piacevole ed efficace massaggio gengivale; indicato anche per l'applicazione di medicinali. Un'attenzione pratica e conveniente che aumenta il comfort del paziente.

- 51 P77101 Contrangolo ReciProxy, Soft 100 pz. **65,00**
- 40 P10041 Manipolo riduttore Nose Cone **185,00**



MANIPOLO PERIODENT NOSE CONE 4:1

EZ Cone Manipolo riduttore 4:1 per Reciproxy e Twist
• Si monta sul micromotore • Accoglie anche frese con gambo HP. Velocità consigliata di impiego: 0-5000 giri/min.

- 40 P10041 EZ Cone manipolo **185,00**



COPPETTE MONTATE PROPHY+ TURBO

Materiale di grado medicale estremamente confortevole e privo di lattice. Il design interno a "turbina" prende meglio la pasta e previene gli schizzi.
Montate su mandrino Hi-Tech per c/a - Max 10.000 g/minuto

- 51 07521S Copp. Prophy+ C/A Soft ass. 100 pz. **27,26**



SPAZZOLINI MONTATI PROPHY+ BRUSH

Materiale a coppetta in Nylon disponibili anche in altre consistenze. Montate su mandrino Hi-Tech per c/a.
Max 10.000 g/minuto

Spazzolino Prophy+ CA - conf. 100 pz.			
	Regular	Soft	XSoft
12 mm € 46,00	51 P741R	51 P741S	51 P741XS
15 mm € 59,00	51 P7415R	51 P7415S	51 P7415XS

- 51 P74TR Spazzolini Tapered Prophy, C/A Reg. 15 mm 100 pz **41,60**



QUICK-EZ POLISHERS Coppette montate

In polimero sintetico di grado medicale **senza lattice**. Disponibili in diverse consistenze. Si conformano all'anatomia dentale trattenendo la giusta quantità di pasta per profilassi minimizzando gli schizzi. Ideali per rimuovere macchie provocate da caffè, the, nicotina, vino rosso, ecc. Max 10.000 g/min.

Quick-EZ Polishers - Gambo RA conf. 100 pz. € 25,00		
DURI	MEDI	MORBIDI
51 07323	51 07322	51 07321



QUICK-EZ BRUSHES Spazzolini colorati

Spazzolini a coppetta in nylon codificati a colori, in diverse consistenze. Ideali per rimuovere macchie provocate da caffè, the, nicotina, vino rosso, ecc.
Gambo RA. Diam. 0,7 mm Max 10.000 g/min.

Quick-EZ Brushes - conf. 100 pz., 15 mm, ass. € 59,00		
REGULAR 4 col.	SOFT 5 col.	XSOFT 2 col.
51 P7415R	51 P7415S	51 P7415XS

Ogni trattamento di sbiancamento dentale professionale, sia cosmetico che medicale alla poltrona, deve essere preceduto dall'attenta visita del cavo orale del paziente e seguire le procedure che qui sintetizziamo e che possono essere anche personalizzate in base al paziente e alle particolari necessità dello stesso.

1. Anamnesi del paziente. Valutare attentamente l'origine della discromia e controllare la presenza e la situazione dei restauri presenti. Può essere importante anche una indagine radiologica.

Concordare il sistema di sbiancamento più indicato che potrà preferibilmente essere quello cosmetico per pigmentazioni dovute alle abitudini del paziente, consigliamo quello medicale alla poltrona per patologie dovute a traumi, assunzione di medicinali: questo potrà essere seguito da un trattamento cosmetico al fine di ottenere gradatamente un risultato ancora più soddisfacente. Sarà utile richiamare il paziente a visite periodiche durante il trattamento per verificarne la soddisfazione e per poter suggerire eventuali utili accorgimenti. Informare anticipatamente il paziente che i restauri già presenti nella sua bocca non si sbiancheranno; questa è la fase ideale per spiegare quali restauri presenti dovranno essere rifatti, comunque dopo lo sbiancamento generale della sua bocca.

Verificare il livello di sensibilità del paziente e, in caso di necessità, procedere con un trattamento di desensibilizzazione prima dello sbiancamento.

LO SBIANCAMENTO NON VA SOMMINISTRATO CON PAZIENTE: • in gravidanza o allattamento • meno di 18 anni (per lo sbiancamento cosmetico)

2. Esame dei denti. Un'attenta valutazione di denti e gengive è indispensabile per comprendere anche la causa delle discromie. Ricordiamo che restauri estetici potranno risultare evidenti dopo aver ottenuto un livello di sbiancamento superiore degli elementi naturali integri. Gli elementi già ricostruiti potranno essere rifatti o ricoperti ma ciò è bene che venga discusso prima col paziente.

3. Aspettative del paziente. Informare adeguatamente sui possibili risultati ottenibili ma anche sui limiti. Sarà fondamentale la fotografia prima e dopo lo sbiancamento.

4. Igiene professionale dentale. • Eseguire una completa seduta d'igiene professionale • Usare una pasta lucidante, meglio priva di fluoro. Per i pazienti con sensibilità accertata, attendere 3-5 giorni prima del trattamento sbiancante.

5. Determinazione del colore iniziale dei denti. • Identificare il colore iniziale dei denti con una scala colori • Scattare una foto con il campione di colore dopo la seduta d'igiene.

6. Consenso del paziente. Far firmare al paziente una dichiarazione di consenso allo sbiancamento che descriva a grandi linee il trattamento sbiancante e i relativi costi.

7. Scelta del prodotto sbiancante. In base all'anamnesi iniziale, le discromie e le aspettative del paziente determineranno il suo consenso che firmerà, scegliendo uno o due metodi consigliati.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni d'uso.

Programmare visite di controllo periodiche quando il trattamento richiederà più applicazioni domiciliari.

8. Istruire il paziente su come ottenere i risultati migliori. I risultati dello sbiancamento dentale possono durare un anno o più a lungo, a seconda delle abitudini alimentari e dello stile di vita del paziente che potrà comunque ricorrere a trattamenti di mantenimento per soddisfare le proprie esigenze estetiche.

L'istruzione al paziente deve essere dettagliata sulle modalità di utilizzo e deve avere anche lo scopo di rispondere alle domande e ai dubbi e timori anche inespressi per tranquillizzare.

9. Determinazione del colore finale dei denti. Sempre con la scala colori verificare il colore raggiunto e scattare una foto con il campione di colore iniziale e finale. Il colore ottenuto definitivo sarà quello registrato dopo qualche giorno dalla fine del trattamento. A volte si può constatare uno schiarimento superiore rispetto al fine trattamento, ma anche la luminosità del bianco sarà più brillante.

10. Gestire la sensibilità, se necessario. A volte si può riscontrare sensibilità persistente, suggeriamo quindi di usare i prodotti specifici presenti nel catalogo ILIC' perché sono stati attentamente testati e selezionati con competenza.

Raccomandiamo l'uso quotidiano, sia durante che dopo il trattamento, dei dentifrici non abrasivi desensibilizzanti che troverete qui illustrati nelle rispettive formulazioni.



La siringa innovativa monopaziente Natural+ da 10ml, eroga nella mascherina 1 goccia calibrata di gel per ciascun dente. Niente sprechi!

NATURAL+ HOME HP 6% Stabilizzato 100%

Praticamente esente da fenomeni di sensibilità, grazie al contenuto di Nitrato di Potassio, Fluoruro di sodio, idrossido di sodio, sali minerali del Mar Morto.

• Formula a veloce rilascio • Alta viscosità, mantiene stabile la mascherina.

Tempi di applicazione più brevi: **60-90 min** al giorno

50 71160 Natural+ EconoPack 6 pazienti **345,00**
(6 Kit + 6 siringhe)

50 71160/1 Natural+ Home Kit per 1 paziente **69,00**

50 71260/1 Natural+ Refill Home: 1 sir. da 10 ml **44,60**

50 71260 Natural+ Refill Home EconoPack: **230,00**
6 sir. da 10 ml.

Il catalogo completo dei sistemi di sbiancamento, è scaricabile su: www.ilicdental.com



NATURAL+ CHAIR HOME KIT Ancora meglio!
Nuovo sbiancante Natural+ e Tray-lamp

Il famoso gel Natural+ brevettato con efficienza superiore anche sulle macchie più difficili.

Innovativo sistema MeoDental che prevede l'utilizzo del gel Natural+ senza mascherina individuale grazie alla lampada Tray-lamp. Vantaggi: • Tray universale che elimina la necessità di fabbricare mascherine su misura • Lampada led azionata dal cellulare eroga: luce blu che accelera l'attivazione del gel all'interno del Tray migliorando l'effetto sbiancante. Luce rossa che protegge ancora di più e a lungo dai fenomeni di sensibilità dei tessuti molli.

- Contiene: 1 Tray lamp, 1 siringa 10 ml gel Natural+, 1 dentifricio PowerPrep, 1 Balm n. 5, 1 filo interdentale, 1 spazzolino Natural, 1 porta Tray, 2 fogli in vinile.
- 50 71170 Natural+ Chair-Home EconoKit 6. **520,00**
- Contiene: 6 x (Tray-lamp, gel Natural+ in siringa 10 ml, Balm n. 5, spazzolino e contenitore, Floss/guida colori)
- 50 71170/1 Natural+ Chair-Home 1 kit completo . . . **110,00**



NATURAL+ HOME 6% HP Refill 12 pazienti

Contiene 12 kit ciascuno: 1 siringa Apply Sec 10 ml gel 6% HP 1 dentifricio PowerPrep antimacchia delicato.

- 50 71280 Natural+ Home 6% HP EconoPack **460,00**
12 pazienti
- 50 71280/1 Natural+ Home 6% HP Kit 1 paziente . . . **46,00**

EconoPack Kit 1 - 6 kit singolo paziente contenenti ciascuno: Power Prep, Diga Chimica, Lucidante ACP, Bal 5, puntali.



EconoPack Kit 2 - 6 siringhe accoppiabili, accoppiatore, puntale. Conservare in frigo, estrarre un'ora prima dell'utilizzo.

almeno 5 volte

NATURAL+ alla poltrona HP Stabilizzato 100%
Formula esclusiva brevettata

Formula sinergica arricchita con Calcio, Nitrato di Potassio e Fluoro di origine del Mar Morto. Risultati superiori in soli **30-40 minuti** senza dover rimuovere e sostituire il gel. Natural+ continuerà la sua azione sbiancante per **24-36 ore**, il giorno dopo il risultato sarà ancora migliore!

- **Stabilizzato 100%**, attivo all'aria per oltre 90 minuti
 - Azione continuativa fino a 36 ore, risultati migliori e duraturi
 - Confezionato completo per singolo paziente
 - Pratico • Conveniente
- 50 7620 Natural+ Medical **6 Patients Kit** **520,00**
Contiene EconoPack Contiene Kit 1 e Kit 2.



NATURAL+ Professional Medical Single Patient Kit

- 50 7620/1 Natural+ Single Patient Pack **98,00**
- Contiene: 1 siringa Power Prep, 1 Siringa diga chimica, 1 Blister con due siringhe accoppiabili, puntali, Lucidante ACP, Balsamo N.5



LED 800 su cuffia Hi-Tech



LED 800 su tubolare

LAMPADA LED 800 3 Intensità 430-670nm

Non è la solita lampada ma serve anche a proteggere dalla potenziale sensibilità poiché fissa ai prismi dello smalto i sali minerali essenziali per prevenire la sensibilità e destinati ad agire per 24-36 ore.

Per l'impiego con Natural+, genera due lunghezze d'onda rosso/blu 430-670nm 3 Intensità con anche la funzione di polimerizzazione per la barriera gengivale.

- Zero manutenzione • 50.000 ore • per gel sbiancante

- 59 72800 Lampada LED 800. **1.650,00**
con telecomando e accessori Loc. operativa

Opalescence PF




Doctor Kit: 8 sir x1,2 ml. 1 sir LC Block Out, 1 black Mini tip, 2 Sof-tray 0,9 mm. 1 dentifricio 30 ml Opalescence, astuccio, scala colori
€ 88,80

Patient Kit: 8 sir x1,2 ml. 1 dentifricio 30 ml Opalescence, astuccio, scala colori
€ 83,60

Refill: 40 siringhe da 1,2 ml
 10 cf da 4 siringhe
€ 293,00

10%	Doctor Kit	Patient Kit	Refill
MENTA	50 11379	50 11364	50 12394
MELON	50 11380	50 11365	50 12395
NEUTRO	50 11381	50 11366	50 12396

16%	Doctor Kit	Patient Kit	Refill
MENTA	50 11483	50 11480	50 12486
MELON	50 11484	50 11481	50 12487
NEUTRO	50 11485	50 11482	50 12488

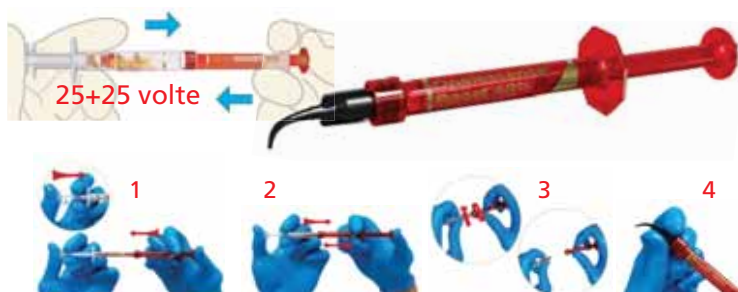

1. Collegare le due siringhe. Premere il piccolo pistone trasparente (A) nella siringa trasparente (B) per rompere la membrana interna in modo da unire gel sbiancante e attivatore. Premere il pistone della siringa rossa nella siringa trasparente. **2.** Premere il contenuto della siringa trasparente nella siringa rossa. Continuamente e rapidamente miscelare i contenuti avanti e indietro per minimo 50 volte (25 per verso). **3.** Premere il gel miscelato nella siringa rossa e separare le siringhe. **4.** Applicare il puntale Black Mini nella siringa rossa. Verificare il flusso su una garza o in un dappen prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza sostituire il puntale e provare nuovamente il flusso.

OPALESCENCE BOOST 40% H₂O₂
 In Studio, applicazione diretta.

Nuova formula chimica: più viscosa, migliorato ulteriormente il posizionamento preciso del gel sbiancante
Non necessita di refrigerazione
 Vita media del prodotto 24 mesi dalla produzione.
 Boost già miscelato, si conserva in frigo fino a 10 giorni,

- PH Neutro • 2 applicazioni da 20 minuti • Rosso l'applicazione precisa • Sempre fresco da attivare • Contiene agenti desensibilizzanti: Nitrato di Potassio e Fluoro. • Formula che non necessita di lampade!

50 1550 Intro Kit

50 1551 Patient Kit

50 1554 EconoRefill



50 1550 OPALESCENCE BOOST PF **Intro Kit** **233,50**
 4 siringhe da 1,2ml O.B. attivatore, 2 da 1,2ml barriera Opal-Dam Green, 2 blocca lingua IsoBlock, 2 scale colori, 2 adattatori Luer per aspiratore, 2 cannule SurgiTip, 20 Black Mini Tip

50 1551 OPALESCENCE BOOST **Patient Kit** **128,10**
 2 siringhe da 1,2ml O.B. attivatore, 1 sir. da 1,2ml OpalDam Green, 1 blocca lingua IsoBlock, 1 scala colori, 1 adattatore Luer per aspiratore, 1 cannule SurgiTip, 20 Black Mini Tip

50 1554 OPALESCENCE BOOST **EconoRefill** **581,40**
 20 siringhe da 1,2ml + 20 attivatori

OPALESCENCE GO 6% Patient Kit+MiniKit

Opalescence GO Patient Kit: 10 blister con ognuno 1 arcata sup. e 1 arcata inf.

50 14634 Patient Kit menta **83,90**
50 14592 Patient Kit anguria **83,90**

Opalescence GO Patient Kit SixPack: 6 Patient Kit
50 14639 Kit SixPak SixPak menta **419,90**
50 14593 Kit SixPak SixPak anguria **419,90**

Opalescence GO Mini Kit: 4 blister con ognuno 1 arcata sup e 1 arcata inf.
50 14644 Mini Kit menta **39,20**
50 14599 Mini Kit anguria **39,20**

Opalescence GO Mini Kit 12 Pak: 12 Mini Kit
50 14649 Mini Kit 12 Pack menta **405,50**
50 14600 Mini Kit 12 Pack anguria **405,50**





Facilmente applicabile e rimovibile.

OPAL-DAM Barriera Protettiva Fotopolimeirizzabile

Diga Chimica sigillante/isolante - Si applica direttamente ed è facile da rimuovere.

OPAL-DAM Kit. Contiene: 4 siringhe da 1,2ml, 10 punte Micro 20ga. 10 punte Black Mini

50 18324 OpalDam Kit Bianco **103,70**
50 18824 OpalDam Kit Verde **103,70**

OPAL-DAM Refill. Contiene: 4 siringhe da 1,2ml.

50 18325 OpalDam Refill Bianco **90,70**
50 18825 OpalDam Refill Verde **90,70**

OPAL-DAM Refill EconoPack. Contiene: 20 sir. da 1,2ml.

50 18326 OpalDam Refill EconoPak Bianco **367,90**
50 18826 OpalDam Refill EconoPak Verde **367,90**



Per igiene e profilassi, terapie conservative dirette, scansione digitale, cementazione di restauri indiretti e per trattamenti ortodontici e di pedodonzia.

OPTRAGATE IVOCLAR

Apribocca retrattore di labbra e guance

- Elasticità tridimensionale - consente tutti i movimenti mandibolari durante il trattamento ed è confortevole per i pazienti
- Completamente **privo di lattice**
- Facilmente inseribile da una persona senza ulteriore aiuto
- Accesso notevolmente ampliato al campo operatorio. Sono visibili e scaricati anche i frenuli
- Distanziamento uniforme di labbra e guance per un migliore isolamento

33 874724 Optragate Assortiti 80 pz. **147,00**
(40 Regular, 40 Small)
33 874723 Optragate Regular 80 pz. **147,00**
33 874722 Optragate Small 80 pz. **147,00**
33 874721 Optragate Junior 80 pz. **147,00**



FOGLI IN VINILE MORBIDO Ultradent - UP

Per realizzare le mascherine individuali da sbiancamento, ATM, bruxismo, fluoro profilassi. • Morbide e confortevoli

- Sottili e aderiscono ai denti come lenti a contatto

99 023100 Fogli SofTray Periodent **39,90**
Regular 1 mm. 127x127 mm 25 pz.
99 023101 Fogli SofTray Periodent **43,50**
Medium 1,5 mm. 127x127 mm 20 pz.

con perossido di idrogeno al 35%



1. Asciugare gengiva e denti 2. Applicare uno strato sottile (max 1 mm) su gengive e papille



3. Fotopolimerizzare subito dopo l'applicazione per evitare irritazioni 20-30 sec.



4. Per rimuovere basta tirarlo in avanti, si staccherà facilmente in blocco o in pezzi grandi.

TOP DAM Barriera gengivale fotopolimerizzabile

Eccellente potere sigillante grazie alla sottile viscosità e alla tiosotopia • Applicazione diretta • Facile rimozione.

50 F8172 TOP DAM Blu 1 sir. 2g., 3 Puntali . . . **16,00**
50 F8174 TOP DAM Verde 1 sir. 2g., 3 Puntali . **16,00**



OPTIVIEW Apribocca, retrattore di labbra e guance, interamente autoclavabile

• Retrazione uniforme e confortevole • Facile da inserire

33 277100 OptiView Standard Kit, 2 pz. **46,30**
33 277102 OptiView Small Kit, 2 pz. **46,30**
33 277101 Cuscinetti OptiView, 10 pz. **13,50**



CHEEK RETRACTOR

Per guancia e labbra - Monouso

• Efficace • Retrae le labbra, protegge la lingua • Economico

33 377215 Cheek Retractor, 10 pz. **22,90**

Dr. Charles F. COX, DMD, PhD



Gli ingredienti attivi sono sali di fluoro e di potassio altamente purificati, di grado medicale, preparati in acqua deionizzata di altissima purezza con un procedimento brevettato che richiede energia, per formare una soluzione soprassatura, a cui si deve la rapidità d'azione, fatto che la differenzia, rendendola unica e diversa da ogni altro desensibilizzante.



articoli a richiesta

SENSITIVE SOLUTION SUPERSEAL

Automordenzante

L'unico desensibilizzante che agisce in pochi secondi

Sicuro, perché senza: Glutaraldeide, Hema, Alcool, Benzalconio Cloruro, Clorexidina. **Comodo e pratico**: non si miscela, non si sciacqua, non si mordenza. **Eccezionale**: non macchia ed è efficace come nessun altro!


- ◆ Desensibilizza in modo incredibilmente efficace e rapido (pochi secondi).
- ◆ Non è tossico.
- ◆ Non altera l'adesione.

Agisce su dentina pulita da placca e pigmenti, meglio se asciutta.

1. Versare qualche goccia in un dappen e imbibire il pennellino.
2. Applicare sulla superficie interessata. Lasciare agire 10 secondi.
3. Soffiare delicatamente da 10 cm di distanza, fino a 10 secondi.
4. Se necessario ripetere l'operazione.

50 58108 1 Super Seal 8 ml **119,20**

SEM A sinistra: lamella di un incisivo dopo pulizia e lucidatura. Sono visibili batteri e detriti. A destra: SEM pavimento cavitario e interfaccia dentinale di un dente umano trattato per 5 secondi con SuperSeal. Si osservano moltissimi nanocristalli romboidali CaOX che si sono rapidamente chelati all'HAp della dentina del pavimento cavitario e alla densa dentina per i tubulare. Questi nanocristalli resistenti agli acidi sono strumentali per fermare il dolore da sensibilità grazie al blocco del flusso bidirezionale di fluido e dei batteri cariogeni.

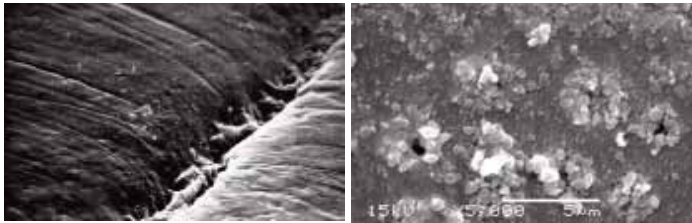

ULTRA EZ Gel desensibilizzante a rilascio prolungato

Formula contenente Nitrato di Potassio 3% e Fluoruro di sodio 0,25%. Applicazione mediante siringa nella mascherina individuale o in mascherine standardizzate.

• Risultati immediati • Disponibile in siringhe o mascherine UltraFit pronte all'uso. Elimina rapidamente la sensibilità dentinale causata da spazzolamento non adeguato, fenomeni termici e chimici, sbiancamento, aree cervicali esposte, ecc.

Ultra EZ Siringhe con punte pre montate

50 18008 UltraEZ Refill: 4 siringhe da 1,2 ml **36,30**
 50 18007 UltraEZ Econo Refill: 20 sir. 1,2 ml **127,20**

Ultra EZ Siringhe in Mascherine Combo

50 18721 UltraEZ mascherine Combo **81,60**
 10 blister (1 sup+1 sup)
 50 18743 UltraEZ mascherine Combo **36,60**
 Mini Kit 4 blister (1 sup+1 sup)



Siringa con punte premontate

Mascherine pronte all'uso

UNIVERSAL DENTIN SEALANT ULTRADENT

Per la sensibilità radicolare transitoria

Resina biocompatibile, non polimerizzabile, a elevato peso molecolare in un solvente organico. Riveste le radici sensibili dopo la levigatura radicolare, riducendo al minimo il dolore post-operatorio, sigillando i tubuli dentinali.

Crea una barriera biocompatibile, temporanea e praticamente impenetrabile contro batteri, resine, acidi, materiali da cementazione, da otturazione ecc. Protegge e riduce la sensibilità cervicale e radicolare.

- Rapida applicazione – una pennellata ed è subito asciutto
- Perfetto dopo la detartrasi e la levigatura radicolare.

22 16266 Universal Dentin Sealant **58,80**
 4 Siringhe da 1,2 ml (1,08 g)
 46 12190 Black Mini Brush **19,60**
 Punta applicative 20 pz.



Universal Dentin Sealant è applicato nella regione cervicale con una punta a pennello Black Mini Brush Tip direttamente dalla siringa.



BEAUTISEALANT SHOFU Sigillante oclusale a rilascio e ricarica continua di fluoro

Giomer che, grazie ai riempitivi brevettati S-PRG (Surface Pre-Reacted Glass) ha ed ricaricandosi di fluoro. Caricato al 40% in peso

- Il Primer Automordenzante e contribuisce a preservare lo smalto sano (facilmente demineralizzabile con acidi mordenzanti forti) mantenendo un'enza necessità di mordenzare con acido fosforico o sciacquare
- Il penetra profondamente nei solchi preparando il dente ad una adesione sicura e duratura
- Per una consistenza liscia e senza bolle, aiutano ad evitare il sovrariempimento
- : 0,92 mm Al - ottima visualizzazione ai richiami.

Consigliati

SEM Penetrazione profonda nei solchi Dr. S. Fukimoto



Cannula super sottile ø 0,4 mm



1. Self Etch Primer sui denti puliti 5 sec.
2. Delicata asciugatura ad aria 5 sec.
3. Applicazione Beutisealant
4. Fotopolimerizzare Led 10 sec.

Nota: Si consiglia di eseguire la pulizia prima della sigillatura con la pasta senza fluoro Pressage. (cod. 51 57674 € 13,90)

- | | | |
|--|-------------------|-------|
| 22 56798 | BeautiSealant Set | 66,00 |
| 1 BeautiSealant 1,2 g - 1 B.S.Primer 3 ml - 5 puntali ad ago | | |
| 50 Pennellini Microbrush 25 Mortaietti V-Dishes | | |
| 22 56799 | Pasta 1,2 g | 23,50 |
| 22 56800 | Primer 3 ml | 33,50 |

La scelta perfetta per finire e lucidare BeautiSealant senza danneggiare lo smalto con **OneGloss**; regolare la pressione per la finitura o la lucidatura. Pag. 54

- | | | |
|----------|---|-------|
| 30 55180 | OneGloss Kit: 20 Midi, 20 Cup, 20 IC, 3 Mandrini CA | 63,30 |
|----------|---|-------|



Senza Bisfenolo A

- Nessuna microinfiltrazione
- Margini sigillati



ULTRASEAL XT® HYDRO ULTRADENT Sigillante idrofilo per solchi e fossette

Procedura semplificata - Adesività straordinaria
Visibile al controllo



UltraSeal XT Hydro è radiopaco a rilascio di fluoro. È più stabile rispetto a tutti gli altri sigillanti perché è una resina caricata al 53%; inoltre presenta una minore contrazione da polimerizzazione. L'azione del puntale Inspiral con setole incorporate rende più fluido il sigillante che, applicato, termina l'effetto tissotropico e riacquista consistenza, per cui non cola prima della fotopolimerizzazione. La formulazione idrofila agisce in un ambiente umido dissipando l'umidità presente a livello microscopico all'interno di solchi e fossette. L'innovativa tecnologia adesiva fissa perfettamente il sigillante allo smalto, rendendo eccezionale la ritenzione marginale.

- Formulazione idrofila
- Tecnologia adesiva avanzata
- Fluorescenza eccezionale
- Resina altamente caricata
- Tissotropico con viscosità ideale
- Due colori: bianco opaco e naturale
- Chimica idrofila ideale per i bambini
- Senza BPA (Bisfenolo A)



1. Mordenzatura e risciacquo e asciugare leggermente con un getto d'aria, non disidratare.
2. Applicazione di UltraSeal XT® hydro.
3. Polimerizzazione 3 sec. con VALO mod. Xtra Power 3.200 mW/cm².



Prima della sigillatura. Sigillatura UltraSeal XT® hydro. Controllo con luce nera².

Dopo aver applicato un sigillante, spesso è difficile controllarne i margini e la ritenzione. UltraSeal XT hydro risolve questa difficoltà con queste sue proprietà di fluorescenza che lo rende visibile sotto una luce nera e permette di controllare l'integrità del sigillante sia al momento dell'applicazione che alle visite di controllo successive.

UltraSeal XT hydro Kit - 1 siringa 1,2 ml - Ultra-Etch, 1 siringa 1,2 ml 20 Inspiral Brush Tip - 20 Blue Micro Tip


- | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------|----------|
| 22 16532 Kit Bianco op. | € 192,40 | 22 16533 Kit Naturale | € 192,40 |
|-------------------------|----------|-----------------------|----------|

UltraSeal XT hydro Refill 4 siringhe 1,2 ml Conservare in frigorifero

- | | | | |
|---------------------|----------|-------------------|----------|
| 22 16534 Bianco op. | € 135,10 | 22 16535 Naturale | € 135,10 |
|---------------------|----------|-------------------|----------|

- | | | |
|----------|--|-------|
| 46 12158 | Blu Micro Tip 25 ga (ø 0,50 mm) 20 pz. | 12,20 |
| 46 12710 | Inspiral Brush Tip ø 1,07 mm 20 pz. | 22,20 |
| 22 16551 | UltraSeal XT hydro Black Light | 11,80 |
| 29 012M6 | Fissure Prep Bur ISO 010 Lung. 16 mm - 5 pz. | 34,75 |



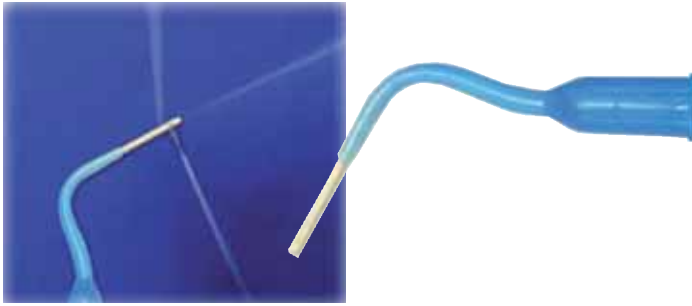

POCKET-PROBE Punta monopezzo flessibili per l'irrigazione, a 3 vie

- Precurvata con estremità chiusa e perforazione su un lato sulla punta flessibile per l'irrigazione degli spazi interdentali e delle tasche parodontali.

46 746102 Punta PPT 100 pz. **145,70**
 46 746102/10 Punta PPT 10 pz. **16,80**

C-FLOW™ DENBUR

Puntale dispensatore e applicatore in plastica, monouso, con attacco ed che l'estremità del puntale possono essere piegati fino a 90° senza ostruirsi. Ideali per pazienti con fobia verso gli aghi.

Usi: Per l'applicazione di Compositi, Sigillanti, Mordenzanti, Liner cavitari, Rivelatori, Desensibilizzanti, Sanitizzanti.

46 521025 Puntale C-Flow senza fibre **29,53**
 Punta PPT 100 pz.
 46 522025 Puntale C-Flow con fibre. **57,38**
 Punta PPT 100 pz.



Den-Flow ha struttura semicircolare per un accesso interdentale facile e confortevole.

Den-Flow è dotata di apertura assiale per eseguire irrigazioni abbondanti.

Den-Flow può essere piegata per raggiungere ogni area della bocca.



Den-Flow piegata per l'irrigazione posteriore dalla superficie linguale.

Den-Flow piegata per l'irrigazione posteriore dalla superficie vestibolare.

Den-Flow non piegata per l'irrigazione nei settori anteriori.

EZ-FLOW™ DENBUR Punta 25 ga. per l'irrigazione interdentale

Mezzo semplice ed efficace per l'irrigazione interdentale. Apertura assiale e struttura semicircolare. Facilmente posizionabile tra i denti per un'irrigazione accurata. Il collo piegabile consente l'accesso a molari, aree posteriori, zone interprossimali, denti anteriori e palato.

Usi: Irrigazione interdentale con acqua tiepida, sanitizzanti, detergenti o farmaci prescritti.



46 527044 EZ-Flow 12 blister contenenti ciascuno. **75,54**
 6 Punta, 1 Siringa 3 ml



Den-Brush Easy-Shake 120 pz.

Den-Brush con punta rivestita da setole fibrose su tre lati. Estremità arrotondata. Manico con due lati mediani piatti

DEN-BRUSH™ DENBUR Scovolino interdentale fibroso a sezione triangolare, monouso

Rivestito con setole su 3 lati: bordo e parti di entrambe le pareti laterali opposte. Parete posteriore scavata per prevenire irritazioni gengivali. Piegabile fino a 90°. Facile accesso mascellare e mandibolare.



Den-Pick, lo scovolino / stuzzicadenti Den-Pick senza fibre.


51 518050	Den-Brush Mini Mini Easy-Shake 50 pz.	€ 28,35
51 518120	Den-Brush Economy Easy-Shake 120 pz.	€ 53,75
51 524120	Den-Pick Economy Easy-Shake 120 pz.	€ 15,98
51 524050	Den-Pick Mini Mini Easy-Shake 50 pz.	€ 7,50



Grazie! Segnalateci la farmacia a voi più vicina. La contatteremo per offrire PerioProx Plus, nei convenienti blister da 6 che i pazienti potranno acquistare direttamente.

PERIOPROX PLUS "Premium Quality"

Scovolini interdentali innovativi Hi-Tech

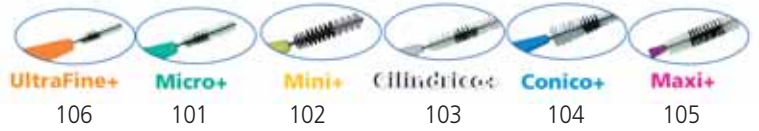

- Anima rivestita in plastica previene graffiature e sensibilità
- Cappuccio protettivo • Manico zigrinato per una presa sicura

51 310106, 101, 102, 103, 104, 105 PerioProx+ **89,50**
Econopack 100 pz.
51 310100 PerioProx+ assortito, 100 pz **93,50**



ultraDEX Linea antialitosi con CloSYS II

Alitosi? È finito il tempo di mascherarla. Oggi è possibile avere sempre la certezza di un alito fresco! Offrite ai vostri pazienti un trattamento garantito per vincere l'alitosi di origine orale.


La maggior parte delle persone prima o poi ha avuto problemi d'alito cattivo e nel 90% dei casi la causa è orale. È un problema, sgradevole per gli altri ed imbarazzante per chi ce l'ha. La ricerca evidenzia che l'alitosi può essere un segnale di problemi parodontali quali gengivite o parodontite. I prodotti ultraDEX sono la risposta concreta al problema: riportano il pH della bocca a neutro e uccidono i batteri dannosi all'origine di placca e carie!

Sciacquo ultraDEX


51 764251 250 ml 1 pz. **10,65**
51 764256 250 ml 6 pz. **51,50**




CloSYS II®: formula antibatterica sicura ed efficace nel combattere la placca che, integrata in un programma quotidiano d'igiene orale, aiuta a mantenere la bocca sana e pulita.

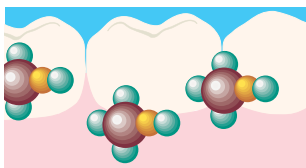


I composti volatili solforati (VSC), causa principale dell'alitosi vengono prodotti costantemente dalla naturale degradazione di batteri e cellule.

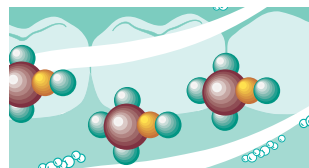

Gli sciacqui convenzionali coprono solo gli odori con un aromatizzante, ma i VSC sono ancora presenti e causano l'alitosi.

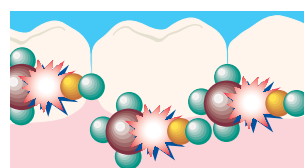

CloSys II® formula brevettata presente nella linea UltraDEX spezza i legami molecolari dei VSC in modo da distruggerli completamente.

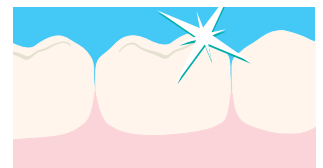

Con l'uso regolare di UltraDEX nell'igiene orale quotidiana i denti saranno più puliti, la bocca più sana e l'alito più fresco.



OPALESCENCE Dentifrici schiarenti Ultradent

Basso indice di abrasività **RDA 90**. Sicuro per l'uso quotidiano. Dentifricio enzimatico per la rimozione efficace di macchie e patina • PH Neutro • Privo di Triclosan • Senza glutine • Ottimo aroma di menta.

Opalescence Whitening	Sensitivity Whitening
51 150876 139 ml. 12 tubi € 93,50	51 150470 139 ml. 12 tubi € 101,90
51 150877 29,6 ml. 24 tubi € 75,00	51 150472 29,6 ml. 24 tubi € 83,00

RDA 38
Silice



POWERPREP+ Sbiancante

Prepara la superficie dei denti allo sbiancamento senza alterare la struttura e velocizza lo sbiancamento

- RDA <80 • Minimizza la sensibilità
- Rimuove delicatamente le macchie superficiali
- PH ideale per mantenere l'equilibrio orale. Sicuro per l'uso quotidiano

51 75010/1 Dentifricio PowerPrep+ 30 ml 1 pz. **7,95**
 51 75010/12 Dentifricio PowerPrep+ 30 ml 12 pz. **82,50**
 51 75010 Dentifricio PowerPrep+ 30 ml 100 pz. **687,00**



Std.

Int.

Wht.

SPAZZOLINO SONICO PREMIUM SW200

WHITE WASH Fino a 40.000 passaggi al min.

Tecnologia Sonica Avanzata, per una efficace e sicura pulizia dinamica, per la rimozione agevole della placca e delle macchie superficiali.

- 3 Programmi: sbiancamento, pulizia, massaggio
- 3 Testine • Timer 2 minuti a intervalli di 30 sec.
- Setole Premium DuPont • Indicatore di carica
- Batterie agli Ioni di Litio di lunga durata
- Garanzia 2 anni!

51 535200 New Sonic SW200 **89,00**
 con 3 testine standard



ROTANTE PRT 1000

Spazzolino a tecnologia rotante e oscillatoria WhiteWash, fino a 8.800 giri al minuto per un'azione pulente completa.

- 2 Programmi pulizia/sensibili
- Timer da 2 minuti con timer a intervalli di 30 secondi
- Base di ricarica con indicatore di batteria
- Filamenti Premium DuPont
- **Garanzia 2 anni.**

Bianco, disponibile anche rosa e nero.

51 5352WH New PRT 1000 con 3 testine **49,00**

PROMO TRIAL KIT: Prodotti Verify+ "Qualità, Sicurezza, Convenienza in Studio"

Sapone antimicrobico per mani	Schiuma "Foam" antimicrobica per mani	Salviette detergenti disinfettanti	Detergente disinfettante 2-IN-1	Detergente disinfettante strumentario e ultrasuoni
				
54 115S11 € 16,50	54 11F11 € 16,50	54 132011 € 13,90	54 121S11 € 14,80	54 135022 concentrato per 100 litri € 112,20



NANO SILVER

WhiteWash antibatterico

Ai filamenti di qualità Premium sono state aggiunte nanoparticelle d'argento puro per la maggiore efficacia antibatterica.

- Impugnatura ergonomica
- Testina con filamenti medium soft dotati anche di più lunghi per agire meglio su spazi interdentali e gengive.

51 53311	Manico Bianco/Grip Grigio.....	6,50
51 53310	Manico Grigio/Grip Bianco.....	6,50

Copri spazzolino batteriostatico a ventosa per le superfici lisce.



Brevetto n. 0196440



Elimina bicchieri e sostegni che producono germi

- Aderisce a tutte le superfici lisce: specchi, piastrelle e acciaio inox
- Lo spazzolino viene prelevato e riposto facilmente, con due dita
- In polipropilene contenente agente Antibatterico
- Ottimo per viaggi, ufficio, camping e scuola
- Dimensioni 47 x 23 x 34 mm (con ventosa)
- Peso 4,4 g • Per temperature tra -15°C e 80°C

51 035911, 912	Coprispazzolino batteriostatico a ventosa per tutte le superfici lisce • Solo con due dita!	3,50
----------------	---	-------------



Lo spazzolino brevettato a tre testine viene mantenuto sui denti con maggiore facilità e consente lo spazzolamento di tutte le superfici dentali in un solo passaggio.



- **Benefit 3 in 1** - manico in plastica dotabile di ciuffo, ADA Accepted
- **Benefit Plus** - manico in Plastisol ampio, imbottito e facilmente impugnabile. Ideali per i pazienti affetti da artrite, Parkinson, MS ed altre problemati che, quelli col manico imbottito forniscono la presa migliore. Il retro della testina centrale è dotato di pratico raschia lingua per il completamento dell'igiene orale quotidiana.



BENEFIT Spazzolini a tre teste - Made in U.S.A.

Spazzola i denti con poco o nessun movimento del polso e ottiene risultati migliori!

- Avvolgono i denti spazzolando tutte e tre le superfici contemporaneamente, alla giusta angolazione e pressione.

Lo spazzolamento viene eseguito più velocemente, facilmente e meglio.

- Le 3 testine flessibili indipendenti si allargano e contraggono per mantenere la corretta pressione su tutte le superfici dentarie, ad ogni movimento
- Contribuiscono alla prevenzione delle parodontopatie. Le setole esterne, extra morbide, massaggiano le gengive. Gli spazzolini laterali posti a 45° puliscono sotto gengiva
- Le testine indipendenti rendono quasi impossibili i danni provocati da spazzolamenti troppo aggressivi
- Le testine di misura ridotta rispetto agli spazzolini convenzionali rendono più agevole la pulizia delle aree distali
- Ideali per chiunque soffra di limitazione ai movimenti di mani, polsi e/o braccia
- Ideali per spazzolare i denti di un'altra persona
- Ottimi per i bambini e giovani poiché se lo spazzolino è sui denti lo spazzolamento è già corretto
- Ottimi anche in presenza di dispositivi ortodontici.

51 3012HP	Benefit Plus	79,00
	12 spazzolini con manico morbido in blister	
51 3012HB	Benefit 3 in 1 12 spazzolini in blister	68,50

FILI INTERDENTALI SPECIALISTICI **PERIODENT** by Thorton

Per rimuovere più placca favorendo la salute gengivale. Inseribili facilmente con la guida di plastica e manovrabili come i fili tradizionali. Con spazi interdentali stretti è consigliabile applicare dentifricio sul segmento spugnoso quale lubrificante.

Nel caso il dentista lo prescriva, il paziente potrà applicare sul segmento spugnoso i farmaci più adatti.



1. Guida in plastica per l'inserimento

2. Filamento morbido e spugnoso

3. Filo tradizionale



IMPLAFLOSS **PERIODENT**

Speciale per l'igiene implantare

Pretagliati, parte centrale in spugna compatta.
Estremità passafilo rigide

- Doppio ago passafilo rigido: nel caso si bagni eccessivamente con la saliva e perda la sua rigidità, si può usare l'estremità opposta
- Spugnetta compatta e folta per una detersione efficace. Filo interdentale speciale per la pulizia delle aree di difficile accesso come quelle implantari. Ottimo anche per l'igiene di ponti e corone. Indispensabile per la detersione degli elementi intermedi di ponte.

51 52001 Implafloss 1 Conf. 30 fili pretagliati. **9,40**
51 520112 Implafloss 12 Conf. 30 fili pretagliati **89,90**

PERIOFLOSS **PERIODENT**

Per l'uso generale

Pretagliati, in spugna compatta con passafilo rigido

Filo speciale per le aree di difficile accesso. Combina l'azione del filo tradizionale ad un'azione di spazzolamento delle superfici interprossimali dei denti trattati parodontalmente, degli attacchi ortodontici e attorno agli impianti.

51 52002 Periofloss 1 Conf. 75 fili pretagliati **13,55**
51 520212 Periofloss 12 Conf. 75 fili pretagliati **130,00**

3 IN 1 FLOSS **PERIODENT**

Per l'igiene generale

Pretagliati, in spugna compatta con passafilo rigido

Filo interdentale multiuso che combina l'azione del filo tradizionale ad un'azione di spazzolamento delle superfici interprossimali e sotto i ponti protesici.

51 52003 3 in 1 Floss 1 Conf. 100 fili pretagliati **12,90**
51 520312 3 in 1 Floss 12 Conf. 100 fili pretagliati **124,00**


SAFE DISPENSER **PERIODENT**

Dispenser di filo interdentale

- In alluminio, per il prelievo del filo interdentale con una sola mano.
- Autoclavabile o chemiclave
- Per rocchetti di filo cerato o non cerato da 274 m.

51 729101 Dispenser filo **81,90**
51 72212 Filo interdentale cerato, 274 m. **9,35**


Lunghezza totale di ciascun filo: 32 cm

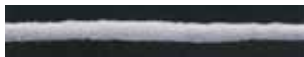


1 = 9,0 cm 2 = 14 cm 1 = 9,0 cm



Lunghezza totale di ciascun filo: 62,5 cm

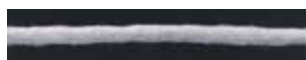

1 = 10 cm 2 = 16 cm 1 = 36,5 cm

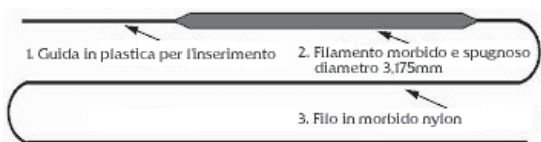

Lunghezza totale di ciascun filo: 66,5 cm



1 = 9,5 cm 2 = 15 cm 3 = 42 cm



INNOVATIVE ORAL CARE ... NATURALLY



BAMBOO VERIFRESH

Spazzolino da denti in bamboo, setole Dupont di alta qualità e manico biodegradabile in bamboo ecosostenibile

- 51 33401 Spazzolino bamboo VF per adulti **8,90**
- 51 33411 Spazzolino bamboo VF per bambini **8,90**



VERIFLOSS

Flosser ergonomico completamente regolabile con forcelle intercambiabili

- 51 32601 Flosser con 10 testine **16,50**

VERIFLOSS REFILL PACK

Forcelle di ricambio disponibili in due misure per la massima efficacia anche negli spazi interdentali stretti.

- 51 32621 Forcella VeriFloss regular, 20 pz. **14,90**
- 51 32622 Forcella VeriFloss small, 20 pz. **14,90**



KIT ALITO FRESCO

Comprende il raschietto speciale per la lingua e il gel per l'alito a garanzia della massima cura di bocca e alito fresco a lungo.

- 51 36610 Kit alito fresco **33,80**

RASCHIETTO PER LINGUA VF

Disegno ergonomico e sottile riduce al minimo il riflesso del vomito. Rimuove la placca e i batteri che causano l'alitosi per scarsa igiene orale.

- 51 34101 Raschialingua ergonomico viola **12,00**
- 51 34102 Raschialingua ergonomico bianco **12,00**

FRESH BREATH GEL

Formula studiata per la completa pulizia della lingua contenenti ingredienti attivi completamente naturali per risolvere l'alitosi alla base e migliorare l'igiene orale.

- 51 36601 Gel per lingua completamente naturale. ... **17,90**



KIT PER CURA GENGIVALE

Comprende lo speciale massaggia gengive e il gel brevettato per il trattamento completo delle gengive. Solo ingredienti naturali.

- 51 36620 Kit cura gengivale **14,60**

MASSAGGIA GENGIVE VF

Massaggia la superficie delle gengive applicando il gel gengivale. Un modo più igienico per applicare il gel al posto delle dita.

- 51 38101 Massaggia gengive turchese **17,90**
- 51 38102 Massaggia gengive verde **17,90**

GUM CARE GEL

Formula completamente naturale contenente Co-Q10 e altri ingredienti antibatterici e antifungini.

- 51 36602 Gel per la salute gengivale con CoQ10 ... **17,90**




VISOR LOUPES PERIODENT

Pratici e leggeri è bello averli sempre a portata di mano!

Ottimo compromesso di qualità, pratico e leggero, è facile da indossare e togliere, anche con gli occhiali.
Disponibili con lenti da 2,5x, 4x,

- 16 1VL25 Ingrand. Visor Loupes 2,5x. **89,00**
- 16 1VL40 Ingrand. Visor Loupes 4,0x. **89,00**

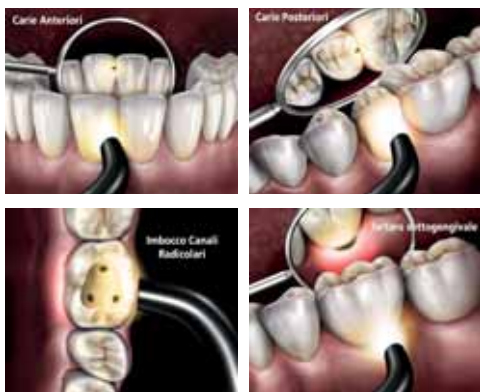

Microlux 2



TRANSILLUMINAZIONE con MICROLUX

by Addent made in USA

Eccezionale da avere in ogni Studio

Perché la transilluminazione:

- 1 Riduce la necessità degli RX specie nei frontali
- 2 Aiuta a vedere nelle corone in zirconia dove eventualmente ridurre lo spessore
- 3 Illumina in situazioni altrimenti invisibili, anche con l'uso dello specchio

Microlux 2 Sistema diagnostico con nuova tecnologia di intensità "dual" • Disegno ergonomico più sottile • Per visualizzare carie anteriori e posteriori • Molte altre applicazioni diagnostiche • Compatibile con tutti gli accessori Microlux.

- 16 973383 Microlux 2 DualKit: 1 manipo, **479,00**
1 guida F.O. 3 mm., 3 batterie, 1 clip da tasca



Accessori per Microlux

- 16 973313 Guida luminosa Fibra Ottica 2 mm **206,85**
- 16 973311 Guida luminosa Fibra Ottica 3 mm **206,85**
- 16 973456 Specchietto Micro 5 pz. **125,58**
- 16 973351 Endo Lite 1,5 mm **214,94**
Guida con 5 puntali luminosi
- 16 973352 Endo 1,5 mm solo puntali, 25 pz. **71,24**
- 16 973353 CarieLite interpross. 0,75 mm. **214,94**
Guida con 5 puntali
- 16 973354 Carie interp. 0,75 mm 25 puntali. **71,24**
- 16 973355 PrioProbe Lite 0,75 mm. **214,94**
Guida con 5 puntali luminosi
- 16 973356 PrioProbe 0,75 mm 25 puntali **71,24**
- 16 973357 Guaine barriera per Microlux, 250 pz. **57,84**
- 16 973342 Microlux Guida luminosa DL **205,28**
- 16 973346 Sciacqui rivelatori DL, cf 12 pz. **237,83**



Semplice funzionamento: HI-LOW-OFF in unico pulsante, alimentato a batteria



TRANSILLUMINATORE LDX 3

Indispensabile per una diagnosi e indagine approfondita e professionale per tanti interventi terapeutici o chirurgici.
È costituito da un LED ad altissima luminosità fino a 30.000 lux.

Vantaggi: • Rilevazione di carie, tartaro, fratture e orifizi del canale radicolare • Riduce la necessità di esposizione a raggi X con risparmio di costi e tempo e maggior sicurezza per i pazienti.

- 16 37331 Transilluminatore LDX 3. **275,00**
- 16 37342 Specchietti Lumindex 140*73*125 mm **139,00**
- 16 37332 Guida luminosa f.o. LDX 3mm **115,00**
- 16 37333 Guaine per LDX 3, 1 cf. **18,00**

Rivestimento in vinile chirurgico Hi-Tech oppure in pelle pregiata



(manuale che spiega nei dettagli e che inviamo in PDF gratuitamente a chi ne fa richiesta)

SEGGIOLINO ERGONOMICO, L'ORIGINALE A SELLA BAMBACH

L'unico anche per i dettagli brevettati, che guida naturalmente alla postura ideale pur lasciando liberi nei movimenti. Dimostrato scientificamente, copiato ma mai imitato. Consente alla colonna di funzionare sul suo asse ottimale bilanciato, con la curvatura ideale e mantenendo i muscoli alla minima tensione. Disponibile anche con accessori particolari.

Per Dentista e Igienista consigliamo senza schienale!

- Qualità massima di tutti i componenti "GMP" • Made in Europe • Posizione naturale • Regolabile in altezza e inclinazione
- Accessori per le più particolari necessità • Base ø 60 cm. • Pompa a gas di qualità e di altezze diverse senza costi aggiuntivi • Ruote specifiche a richiesta • Selle speciali • Ampia gamma di colori disponibili.

- Basso** 470-590 mm. - alt. operatore > **150-160 cm**
Medio 560-730 mm. - alt. operatore > **160-180 cm**
Alto 600-860 mm - alt. operatore > **180 cm**

SEGGIOLINO A SELLA BAMBACH IN VINILE HI-TECH

- 60 3112L Bambach vinile Hi-Tech basso **940,00**
 60 3112 Bambach vinile Hi-Tech medio **940,00**
 60 3112H Bambach vinile Hi-Tech alto **940,00**

Bambach per le specificità del lavoro al microscopio. Bracciolo scorrevole liberamente in lunghezza e larghezza (oscillazione libera). Regolatore di altezza (fisso). Allevia tensione a spalle, collo e braccia.

- 60 3112BLM Bambach microscopio nero **1.380,00**
 (Specificare: pompa elevatrice alta, media o bassa).




Struttura del Bambach per procedure al microscopio

Colori Bambach in vinile Hi Tech



Colori Bambach in pelle naturale

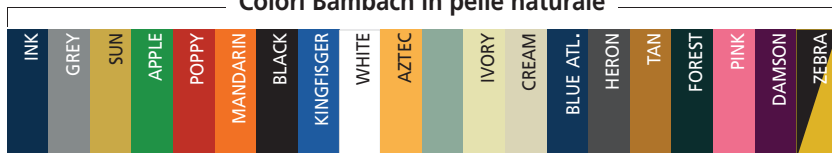

GALILEIANI KEELER SuperVu

Alta brillantezza, forniscono la visione dell'intera bocca.

Forniti nell'astuccio speciale rigido, con 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta di sollevamento sterilizzabile, 1 supporto montabile per lenti correttive, 1 panno.

- Leggeri • Lenti multi strato, smontabili e lavabili • Ampia visione e profondità di campo.

Galileiani Keeler SuperVU con montatura Sport Design € 1.330,00			
2,5 x 34 cm	2,5 x 42 cm	3,0 x 34 cm	3,0 x 42 cm
16 31M2534	16 31M2542	16 31M3034	16 31M3042
Montatura scelta: ■ ■ ■ ■ ■			

Galileiani Keeler SuperVU con Caschetto Comfort € 1.430,00			
con casc. 2,5x distanza lav. 34 cm.	con casc. 2,5x distanza lav. 42 cm.	con casc. 3,0x distanza lav. 34 cm.	con casc. 3,0x distanza lav. 42 cm.
16 31C2534	16 31C3034	16 31M3034	16 31C3042



Caschetto Comfort



Per ordinare: ilic@ilicdental.com - tel +39 02 36 512 990

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna				
P.IVA	C.Fisc.		e-mail	

CODICE	REF.	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

+iva a norma di legge

Giorni di apertura: **Mattino** L M M G V S **Pomeriggio** L M M G V S
Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 140,00 (IVA esc.) nessun contributo spese
Ordine fino a € 140,00 (i.e.) + € 14,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,50
PAGAMENTO: Ordini inf. a € 140,00 (i.e.): Bonifico anticipato Carta di credito o POS
Ordini sup. a € 140,00 (i.e.): Bonifico anticipato Carta di credito o POS R.B. 30 gg. d.f. + € 5,50
IBAN Ivan Ilic' srl: IT50N0569601625000003415X03 **IBAN Cliente:**
 Carta di credito o POS Visa Mastercard Numero Scadenza

DATA **TIMBRO E FIRMA**

Ai sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei acconsente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco.



Grafica e impaginazione: laura.alessandrello@gmail.com

 ilicdental.com

ilic
SINCE 1949
QUALITY & VALUE

IVAN ILIC' srl
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646
ilic@ilicdental.com