

*dal 1949 al servizio
della comunità odontoiatrica
ricerca e seleziona
Qualità & Tecnologia
per voi!*



RIBBOND

Ribbond

Usi in Implantoprotesi

www.ilicdental.com

Stabilizzazione rigida inter-arcata rinforzata con Ribbond per protesizzare provvisoriamente impianti a carico immediato

**Può essere usata con pilastri individuali a vite o
cementabili, oppure per rinforzare
overdenture**

Vantaggi di un ponte provvisorio Ribbond Triaxial caricato immediatamente

- Facile da costruire.
- Facilmente modificabile in caso di perdita, sostituzione o necessità di aggiungere un nuovo impianto.
- Colore e translucenza neutri; non richiede l'uso di opacizzanti.
- É in armonia elastica con la resina: la resina non si scheggia via, come invece fa nel caso di armature metalliche.

Ribbond

è una fibra di rinforzo robusta.

Grazie alla tessitura a maglie aperte e punti chiusi o all'intreccio triassiale la struttura delle fibre di rinforzo Ribbond è tridimensionale.

Questo fornisce una notevole presa meccanica della resina acrilica e delle resine composite su piani diversi rendendo così possibile un'ampia finestra di lavorazioni.

Ciò significa che può funzionare molto bene anche se il materiale non viene lavorato in modo ideale; significa inoltre che ha un'ampia tolleranza entro cui non può essere facilmente danneggiato.

Impianti a carico immediato con fissaggio a vite. Casi Clinici

Dr. Robert Noelken,
Lindau, Germania


Situazione Iniziale e Ponte Provvisorio



Armatura Ribbond Triaxial



Ponte Ribbond Triaxial Completato

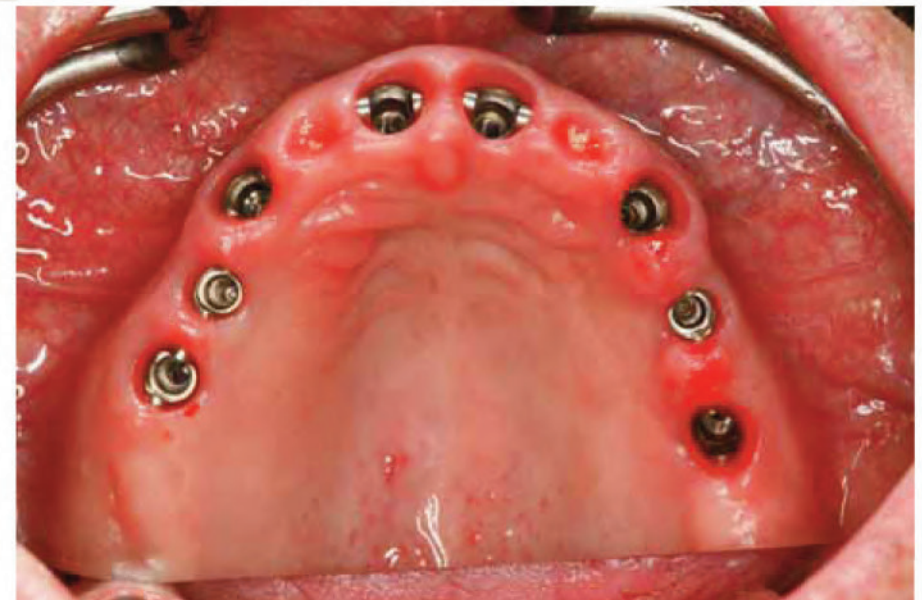

Armatura Ribbond Triaxial caso n. 1



Armatura Ribbond Triaxial caso n. 2



Armatura Ponte a Sostegno Dentario




Armatura Ribbond Triaxial per Pilastri Implantari Personalizzati Cementabili

**Caso, lavoro di laboratorio e fotografie di
Grant Chyz, DDS**

Costruzione dei Pilastri Provvisori Personalizzati




Ribbond Triaxial sui Pilastri

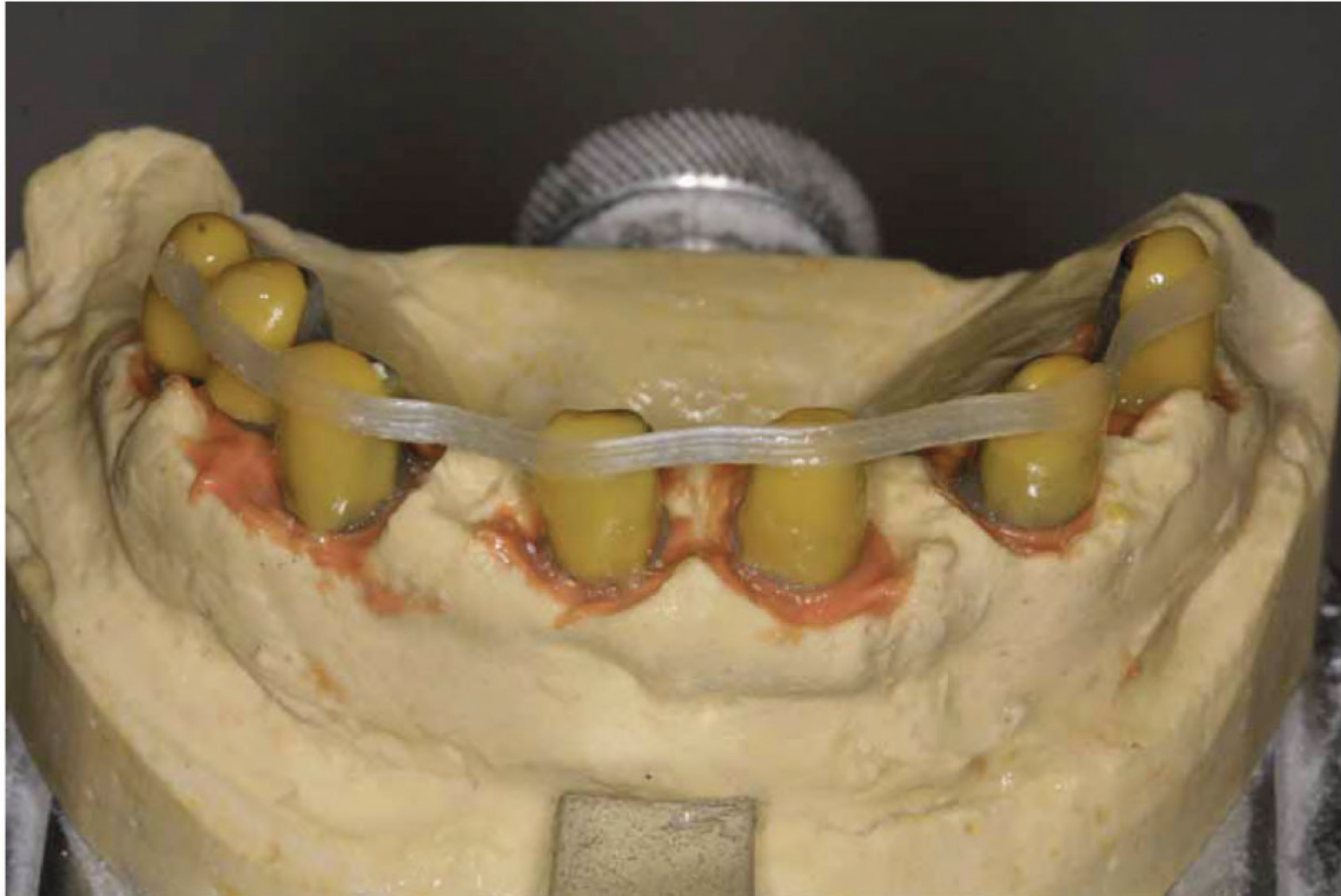

Ribbond Triaxial sui Pilastri






Costruzione in Resina e veduta clinica

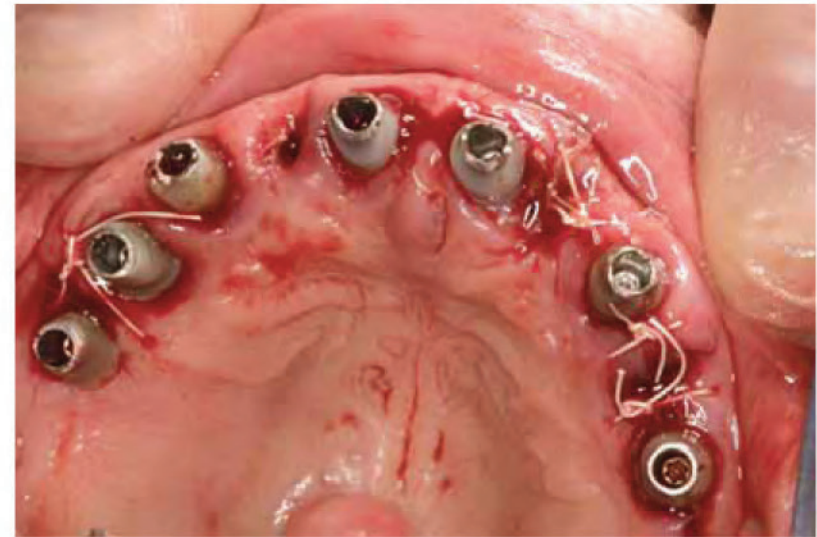

Ponte Provvisorio con Ribbond Triaxial



Armatura Ribbond Triaxial

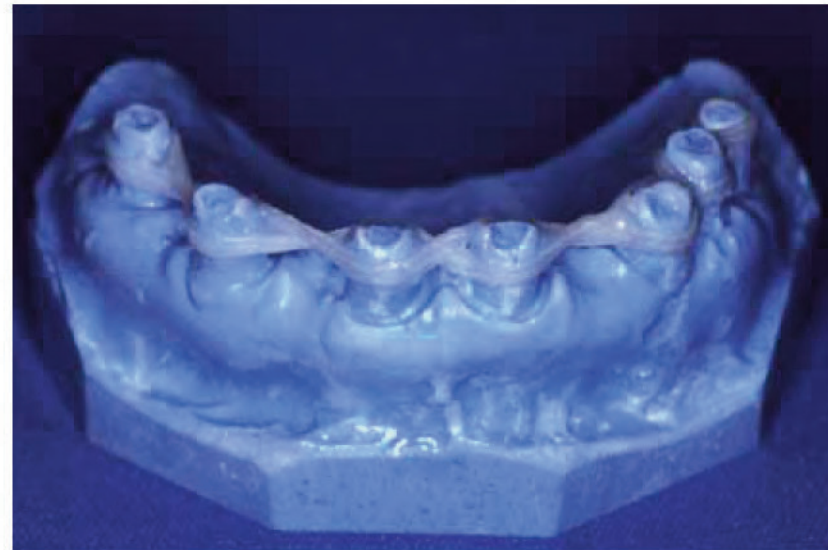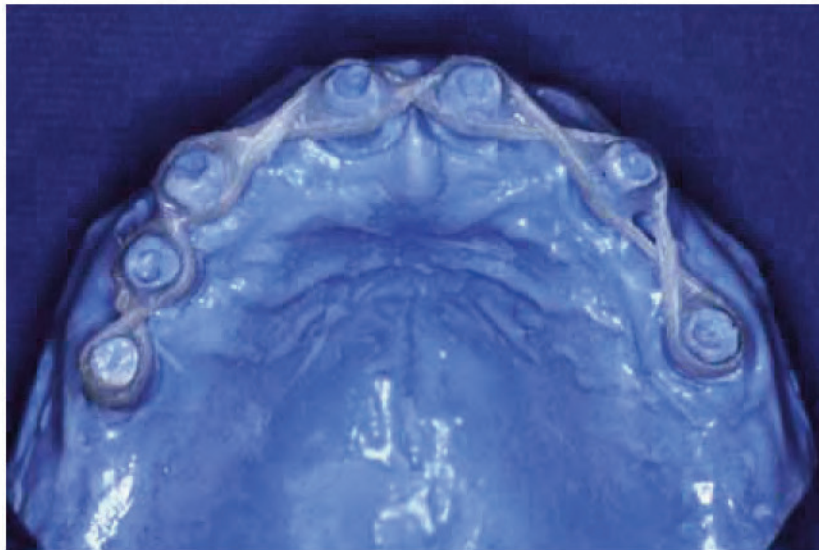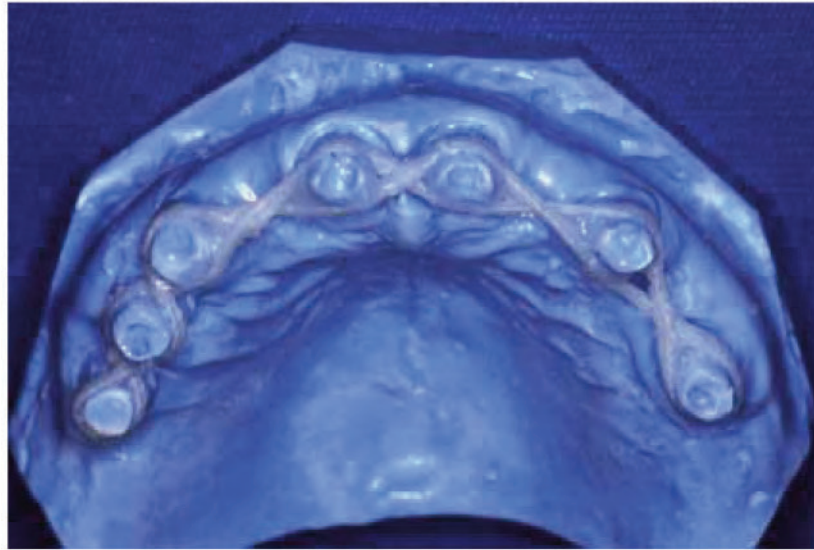

Per il collegamento ai pilastri implantari provvisori l'armatura non si basa unicamente sull'adesione. Essa fornisce infatti un fissaggio interlacciato della protesi ai pilastri implantari.

Syncone - Sistema Overdenture

Dopo un periodo d'uso le protesi mobili Syncone diventano sempre più difficili da rimuovere da parte del paziente. Si ritiene che ciò sia dovuto a microincrinature nella resina adiacente alle cappette Syncone, che scivolano leggermente in sede. Come risultato l'orientamento di 4-6 gradi delle cappette varia leggermente nella relazione tra una cappetta e l'altra, facendo sì che le pareti di alcune cappette si impegnino una contro l'altra.

In questi casi Ribbond viene usato quale meccanismo di rinforzo allo scopo di ridurre le microincrinature.


Rinforzo clinico con le fibre Ribbond tessute a maglie aperte a punti chiusi




Lavorazione in Laboratorio delle fibre Ribbond tessute a maglie aperte a punti chiusi e Triaxial



Rinforzo di Ponti a Bandiera

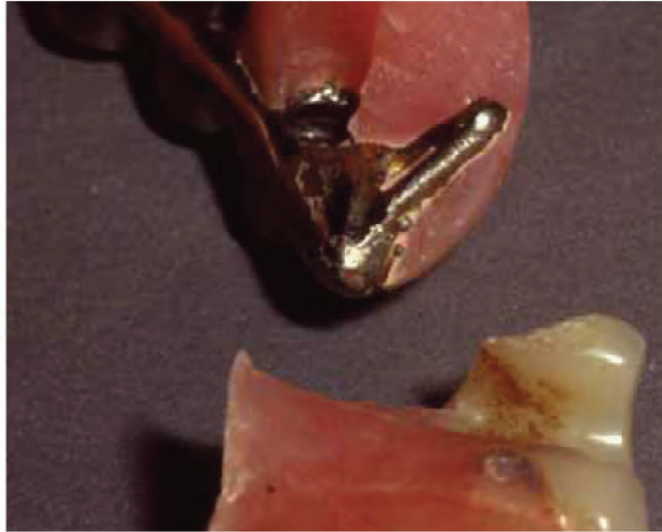

Taglio di un canale (solco) vicino alla superficie occlusale dove sarà inserito Ribbond Triaxial impregnato con resina

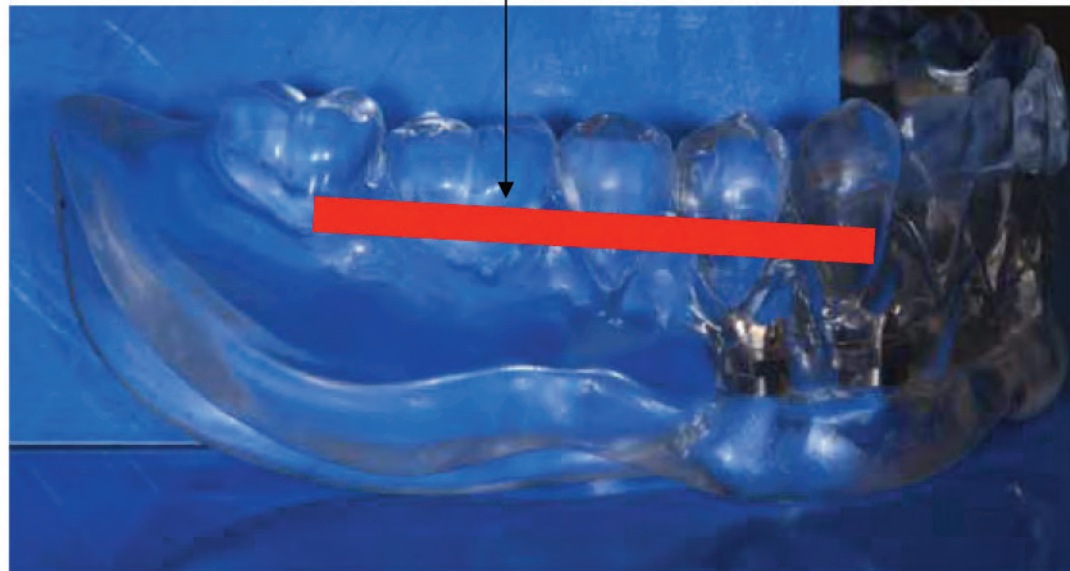


Fallo in modo che non si rompa con Ribbond!

Le fibre Ribbond consentono di realizzare protesi super resistenti e durevoli alla poltrona in una seduta.



Ribbond "Wall Papering Technique" Dr. Simone Deliperi

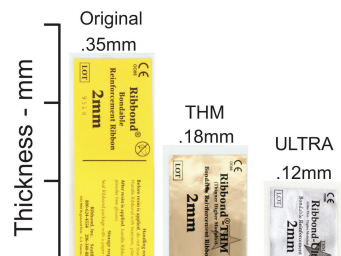

FIBER WETTING RESIN

La sicurezza di impregnare le fibre in profondità.


Non utilizzare adesivi contenenti primer dentali o acidi mordenzanti, né compositi fluidi.




Le fibre di rinforzo Gold "Standard" dal 1991

Il migliore e più facile da usare: Ribbond non ha memoria e ciò rende il posizionamento estremamente facile


Minimo spessore di adesione: - massimo effetto ed efficacia del laminato - maneggevolezza superiore - massimo confort del paziente

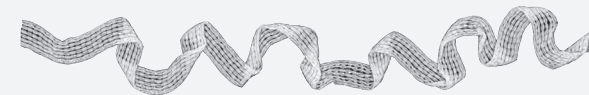

RIBBOND Nastro di Rinforzo Multifunzionale. In polietilene, applicabile con le Tecniche Adesive

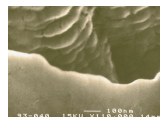

Trattamento al plasma a garanzia dell'adesione chimica

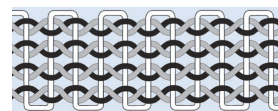

Tessitura brevettata Ribbond, fornisce una rete di fibre intrecciate tessute che ferma la propagazione delle incrinature grazie al trasferimento multidirezionale delle forze

Resistenza alla frattura superiore le stesse fibre Ribbond sono utilizzate per creare i giubbotti antiproiettile

Prova Ribbond Ultra! Ribbond-Original diviene il "Gold Standard" nelle fibre di rinforzo dentali dal 1999.

Da allora Ribbond ha portato numerosi miglioramenti. Ribbond Ultra, introdotta nel 2012, è la fibra più sottile e, intuitivamente, quella che garantisce le migliori qualità di resistenza...ecc

RIBBOND FORBICI

Indispensabili per tagliare le fibre

• Inox di altissima qualità esclusive • Autoclavabili.

Indispensabile!



RIBBOND Ricambi Ultra

spessore **0,12 mm** - lunghezza **68 cm**



FIBER WETTING RESIN Per impregnare le fibre

Resina non caricata di IV generazione, garantisce l'adesione chimica al composito. Priva di alcool, solventi organici, primer o monomeri. Funziona con tutti i compositi anche duali.



IVAN ILIC' srl

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646

ilic@ilicdental.com

www.ilicdental.com