



Umbrella™

TONGUE, LIP, & CHEEK RETRACTOR

Pratico Accesso,
Efficiente Isolamento,
**con il Massimo
Comfort!**





Umbrella™
TONGUE, LIP, & CHEEK RETRACTOR

Il nuovo apribocca Umbrella™ è stato sviluppato per offrire il massimo comfort al paziente garantendo allo stesso tempo un efficace isolamento del campo operatorio. I suoi benefici vanno oltre una semplice retrazione dei tessuti molli:



- Consente di mantenere la bocca aperta in modo naturale e delicato, evitando che le labbra vengano tirate o allungate
- Garantisce il massimo sollievo, evitando un possibile conato riflesso
- Può essere tenuto in sede durante il controllo dell'occlusione o utilizzato congiuntamente ad un blocco oclusale, mentre la lingua resta comodamente adagiata dietro il proteggi lingua
- Ideale per varie procedure cliniche come restauri diretti, sigillature, fissaggi brackets ortodontici, sbiancamento alla poltrona...
- Permette di aprire lo spazio tra labbra e guance favorendo l'accumulo della saliva lontano dai denti, facilitandone l'aspirazione e riducendo così il rischio di contaminazione
- Posizionamento semplice e rapido

STEP 1.



Premere contemporaneamente le linguette dell'apribocca Umbrella™ per predisporlo al posizionamento

STEP 2.



Chiedere al paziente di posizionare la punta della lingua sul palato

STEP 3.



Scegliere un lato della bocca dal quale partire per inserire delicatamente l'apribocca

STEP 4.



Usare le linguette per centrare l'apribocca con la bocca del paziente

STEP 5.



Per un facile accesso, verificare che la lingua del paziente sia posizionata correttamente dietro il proteggi lingua



4870 - Umbrella APRIBOCCA

5 apribocca - Misura M

4871 - Umbrella APRIBOCCA

20 apribocca - Misura M

5162 - Umbrella APRIBOCCA

40 apribocca - Misura M

