

Fit StripTM

Flexible

Interproximal finishers with a

Twist

Nuove

Strisce abrasive diamantate subgengivali

Le strisce FitstripTM subgengivali sono state perfettamente disegnate per rimuovere velocemente ed in modo sicuro le sporgenze in composito e gli eccessi di cemento dalle zone subgengivali difficilmente raggiungibili. Queste strisce sono il 33% più strette e solo 2,5 mm in altezza rispetto alle altre strisce FitstripTM e grazie alla zona centrale di sicurezza "non-abrasiva", scorre facilmente tra i denti e sotto la zona di contatto. La diamantatura media, fine e superfine rende veloce la rifinitura e la finitura liscia come la seta.

Comodo manico! Il manico FitstripTM, comodo e semplice da avvitare, fa la differenza, sia per l'odontoiatra che per il comfort del paziente

Ruota! Ruota il supporto rotondo colorato per regolare la curvatura delle strisce FitstripTM, si blocca automaticamente.

Pronte per una maratona!

Le strisce FitstripTM sono molto resistenti e durature. Restano abrasive e pronte all'uso anche dopo più cicli di autoclave

Rimuovere, sgrossare e rifinire

1. Grana media per rimozione rapida
2. Grana fine per sgrossatura
3. Grana superfine per una perfetta lucidatura

Focus stretto

- 33% più strette delle strisce FitstripTM standard
- altezza solo 2,5 mm.

Stay in the zone

- La zona di sicurezza "non-abrasiva" protegge la zona dei punti di contatto
- Super sottile – solo 0,05 mm
- Scorre facilmente ed in modo sicuro tra i denti

Fit Strip™

Flexible
Interproximal finishers with a
Twist



NUOVE!



Tecnica subgengivale :

1. Inserire tra i denti. Iniziando dalla grana media (blu), ruotare il supporto colorato fino a quando la striscia è bloccata dritta. Posizionare la "zona di sicurezza" nello spazio interprossimale interessato. Con una leggera pressione apicale e muovendo avanti e indietro, inserire la striscia tra i denti*. Il supporto colorato adesso può essere ruotato per posizionare la striscia in posizione curva, in modo che la stessa possa seguire l'anatomia del dente.
2. Rimuovere le sporgenze e gli eccessi di cemento. Muovere la striscia Fitstrip™ in direzione buccale-linguale e avanti/indietro. Rimuovere la striscia e testare l'area con un floss per assicurarsi il risultato desiderato. Ripetere se necessario.
3. Finitura e lucidatura. Posizionare la striscia Fitstrip™ fine (rossa) nello spazio interprossimale usando la tecnica del punto 1. Muovere delicatamente la striscia avanti/indietro buccale/linguale tre o quattro volte. Rimuovere la striscia fine e ripetere la stessa procedura con la striscia superfine (gialla) per una lucidatura ideale.

*se i denti sono incollati uniti o il contatto è troppo stressato, potete usare la striscia seghettata (grigia) per aprire l'accesso e poi inserire la striscia con la "zona sicurezza" 0,05 mm tra i denti.

Kit Fitstrip™ finitura subgengivale e strisce monolaterali

Il kit FPSK08 contiene :

2 manici

10 strisce : 2 subgengivali superfini, 2 subgengivali fini, 1 subgengivale media, 1 striscia seghettata, 1 striscia monolaterale per ciascuna granulometria 0,08 mm – 0,10 mm – 0,13 mm – 0,18 mm

Kits Tutti i kit contengono 10 strisce e 2 manici

NUOVO Kit finitura subgengivale

3 strisce subgengivali fini, 3 subgengivali medie, 3 subgengivali superfini e 1 striscia seghettata

FPSK07 € 159

NEW Kit Fitstrip finitura subgengivale e strisce monolaterali

2 manici, 10 strisce : 2 subgengivali superfini, 2 subgengivali fini, 1 subgengivale media, 1 striscia seghettata, 1 striscia monolaterale per ciascuna granulometria 0,08 mm – 0,10 mm – 0,13 mm – 0,18 mm

FPSK08 € 159

Ricambi		Monolaterale	Bilaterale	Prezzo confez. 4 pz
Super fine 15 Micron		FPSXFSS-4 spessore 0,08 mm	FPSXFDS-4 spessore 0,11 mm	€ 73
Fine 30 Micron		FPSFSS-4 spessore 0,10 mm	FPSFDS-4 spessore 0,15 mm	€ 73
Media 46 Micron		FPSMSS-4 spessore 0,13 mm	FPSMDS-4 spessore 0,21 mm	€ 73
Grossa 90 Micron		FPSCSS-4 spessore 0,18 mm	FPSCDS-4 spessore 0,30 mm	€ 73
Seghettata		FPSSAW-4 spessore 0,05 mm		€ 73
Super fine 15 Micron		FPSGXFSS-4 spessore 0,08 mm	N/A	€ 73
Fine 30 Micron		FPSGFFSS-4 spessore 0,10 mm	N/A	€ 73
Media 46 Micron		FPSGMSS-4 spessore 0,13 mm	N/A	€ 73
Manici Fitstrip™ ricambi (2 pz) codice FPSHANDLE-2				€ 30

Garrison
Dental Solutions

ilicdental.com

ilic
SINCE 1949
QUALITY & VALUE

IVAN ILIC' srl
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646
ilic@ilicdental.com