


Hai  
l'idea di  
**ORGANIZZARTI.**  
eccoti la guida  
**PENSA IN  
COLORE!**



Color Management Guide



# Colori Zirc

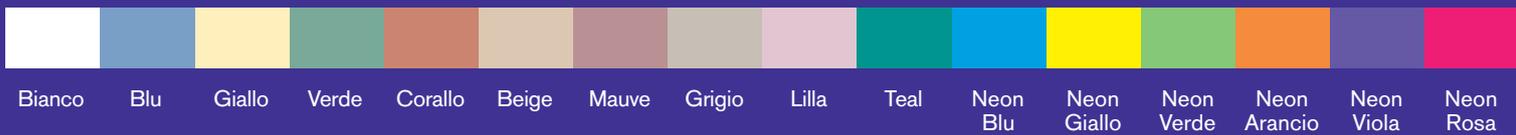

# Guida finale per organizzarsi

Hai necessità di migliorare la tua  
organizzazione ed hai bisogno di idee pratiche?  
Ti proponiamo di usare una linea di prodotti  
disegnati per offrirti migliore [organizzazione]  
usando il [colore] in ogni stanza del vostro studio.

Sei pronto?

Sei concentrato?

Metti in pratica le nostre idee!

# Come usare il Color Code System?

**[1]** Scegliamo un colore per ogni procedura nel vostro studio.

**Esempio:**

Crown & Bridge = Neon Arancio  
Endo = Teal  
Composito = Neon Blu

**[2]** Se ci sono più operatori nello studio, possiamo avere un colore per ogni operatore e/o studio.

**Esempio:**

Dr. Rossi = Neon Viola  
Dr.ssa Rossi = Neon Rosa

**[3]** Stabiliamo il numero di procedure effettuate settimanalmente.

**Esempio:**

Crown & Bridge = 10  
Endo = 5  
Composite = 12

**[4]** Stabiliamo il numero di vassoi che ci serviranno per ogni procedura: il numero ottenuto (al punto 3) dividiamo sempre di 3. (arrotondate sempre per eccesso).

**Esempio:**

Crown & Bridge = 4 vassoi neon arancio  
Endo = 2 vassoi teal  
Composite = 4 vassoi Neon blu

# Come comporre in modo efficiente il Color Code System?

## Set up del vassoio

I coperchi dispongono di “chiusura ermetica” che garantisce un eccellente controllo di oggetti decontaminati e sterilizzati per permettere di:

- [1] Organizzare i vassoi prima di iniziare le procedure del giorno e la chiusura “ermetica” impedisce ogni tipo di contaminazione.
- [2] Impedire a qualunque oggetto contaminato la caduta accidentale durante il trasporto dallo studio alla sala sterilizzazione. Gli oggetti contaminati rimangono chiusi fino al momento della sterilizzazione.



## Gestione dei Materiali

La gestione appropriata del Color Code System permette di migliorare l'organizzazione dei materiali secondo le procedure. Si ha la possibilità addirittura di rimuovere tutti i materiali dai mobili del vostro studio e stocarli nei Zirc “Procedure Tub”. Si sceglie un Tub per ogni procedura (nel caso di uno studio con più operatori sarà necessario numero maggiore dei Tub).

Si raccomanda di usare un'area comune per lo stoccaggio dei Tub, come per esempio “sala sterilizzazione”, oppure si possono tenere anche direttamente nel vostro studio. I Tub vengono usati durante il trasporto dei materiali dalla sala sterilizzazione allo studio e viceversa. Materiali contenuti nei Tub e usati durante le procedure vengono dati a disposizione all'operatore insieme ad un vassoio per gli strumenti.

Alla fine della giornata i materiali vengono risettati nei Tub e posti nelle apposite rastrelliere.



A questo punto abbiamo determinato la quantità dei Tray e Tub per il vostro studio secondo le vostre esigenze. Ora abbiamo necessità di usare Color Code per gestire i nostri strumenti manuali, frese, strumenti canalari. Zirc propone una vasta varietà di prodotti che permettono di gestire gli strumenti durante il processo di sterilizzazione e sulla poltrona.

## Quanti portastrumenti sono necessari per la gestione degli strumenti?

Tanti quanti i vassoi per la procedura.

### Esempio:

Crown & Bridge: abbiamo scelto neon arancio per il colore della procedura, abbiamo determinato 4 vassoi per questa procedura e avremo bisogno di 4 portastrumenti e portafrese neon arancio.

#### Portastrumenti manuali



E-Z Jett Cassette



Compact Cassette



Compact Steri Container



Steri Container



Mini Matt

#### Portafrese



8 Hole Bur Blocks



14 Hole Bur Blocks



12 Hole Bur Guards



22 Hole Bur Guards

#### Portastrumenti canalari



Endo Guards (manuali)



Endo Guards (meccaniche)



Endo Assist

## E-Z ID Rings and Tape

Utilizziamo il Color Code System per codificare cromaticamente ogni strumento, portastrumento, contenitore, etc. Gli anelli (rings) e i nastri (Tapes) permettono la distinzione cromatica nei seguenti casi:




- [1] **Studio con un solo operatore:** applichiamo l'anello su tutti gli strumenti manuali in corrispondenza al colore della procedura

**Esempio:**

anello neon arancio per strumenti per Crown & Bridge

- [2] **Studio con più operatori:** utilizziamo due colori diversi di anello su ogni strumento (un colore per procedura, un anello per operatore).
- [3] **Sequenza d'uso dello strumento:** l'anello deve essere applicato in diagonale per indicare la sequenza desiderata all'assistente.



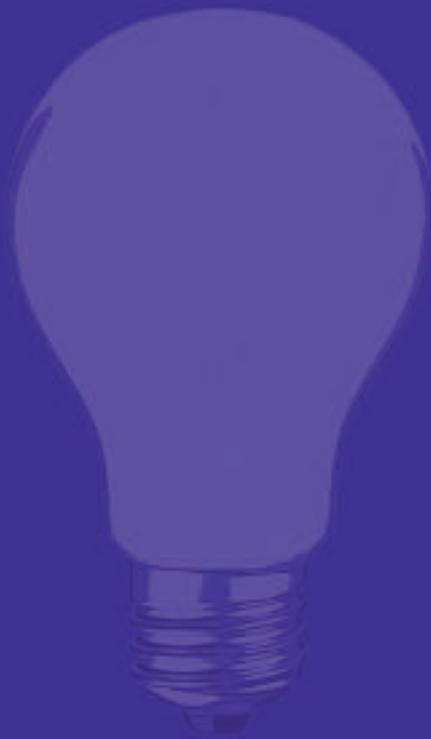

Complimenti.

Le vostre procedure sono ora organizzate secondo uno schema preciso e si distinguono per colore!



**IVAN ILIC** srl

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36512990 | FAX: +39 02 55016646

MAIL: [ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com)

 [www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)