

dal 1949 al servizio
della comunità odontoiatrica
ricerca e selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!



BELLATRIX

Sistema di protezione da schizzi e nebulizzazione anti appannamento



Un progetto pensato alla protezione e contemporaneamente alla visione senza appannamento grazie al design specificamente ideato che indirizza l'espiazione verso l'esterno. Si applicano alla maggior parte di montature dimensione medio/grande e con struttura non sottile; in questo modo possono essere utilizzate direttamente sull'occhiale dell'operatore, oppure con un'altra montatura tipo quella presente nel Kit **MARK 1**, su cui far inserire lenti correttive.

Il sistema **MARK 3** prevede uno schermo opaco più rigido super resistente che può essere utilizzato con maggior comfort dal personale per esempio di segreteria o reception.

REMOVABLE MASK

PERIODENT

Bellatrix
Mark 2

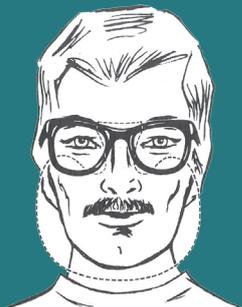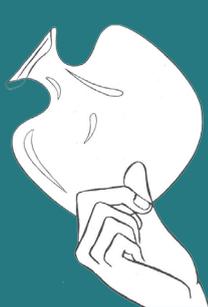

www.ilicdental.com

REMOVABLE MASK

PERIODENT
Mark III

Bellatrix



www.ilicdental.com

53 03201	Bellatrix MARK 1, 6 schermi Bellatrix e occhiale con lenti neutre di grado ottico	€ 49,50
53 03202	Bellatrix MARK 2, 6 schermi Bellatrix	€ 34,50
53 03203	Bellatrix MARK 3, occhiale con mascherina Bellatrix fissa	€ 32,00

www.ilicdental.com

ISTRUZIONI BELLATRIX MARK II

BELLATRIX MARK II è uno schermo protettivo progettato per aumentare la sicurezza di operatore e paziente.

Applicato su tutte le montature e sugli occhiali con correzioni, consente di operare nel massimo comfort senza appannare le lenti.

DimeNsioni: 150 x 155mm. ca. - Peso 16 gr.

Semplice da applicare:

1 - Agganciare l'aletta superiore al ponte della montatura dell'occhiale.

2 - Piegare i lembi laterali in modo da farli passare sotto le lenti dell'occhiale; in questa posizione lo schermo sarà perfettamente stabilizzato.

Manutenzione di BELLATRIX MARK II

- Lavare e riutilizzare BELLATRIX MARK II dopo ogni paziente
- Asciugare utilizzando tessuti e materiali soffici, adatti a prevenire graffi

- Usare detergenti non abrasivi o alcalini e disinfettanti non aggressivi, mai solventi
- Non è autoclavabile
- Sostituire quando non più integra.

Avvertenze

- non è un classico DPI, ma contribuisce alla protezione
- non protegge a sufficienza la parte laterale del viso
- non protegge dalla saliva nebulizzata nell'ambiente
- non è autoclavabile
- non è sufficiente per utilizzi industriali
- smaltire come un normale rifiuto urbano in conformità delle norme vigenti.

Conservazione di BELLATRIX MARK II

Conservare in ambiente asciutto e privo di vapori organici ad una temperatura fra 5° e 30°C.

REMOVABLE PROTECTOR

It is a pair of spectacles with a protective mask which can be removed when there is no need to use it.

SETTING AND REMOVAL TECHNIQUE OF THE MASK

SETTING: Set Hook A on the bridge of the frame D, slide with both hands the two edges B of the mask under the rings E of the frame.


REMOVAL: Take the mask on point C and push it forward.

The frame is made up of polycarbonate and is stroke - proof. The setting of the lenses is to be performed by preheating the frame at about 90°; or, when cold, with lenses processed with an automatic lap.

Do not treat the frame with oil by - products as perclhoratylene, benzine etc.

The lenses are made of temperate neutral optical glass and can be replaced with possible corrective lenses.

Spare masks (6 pieces manufacture) can be requested by writing to the concessionary agent.

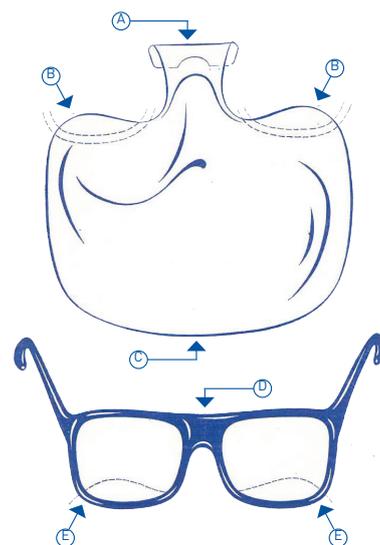

Per ordinare: ilic@ilicdental.com - tel +39 02 36 512 990 - fax 02 55 016 646

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov	Tel	Cell
Ind. consegna				Codice SDI
P.IVA	C.Fisc.	e-mail		

CODICE	RIF	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

Giorni di apertura: **Mattino** L M M G V S **Pomeriggio** L M M G V S

Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 130,00 (IVA esc.) nessun contributo spese

Ordine fino a € 130,00 (i.e.) + € 12,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,00

PAGAMENTO: Ordini inf. a € 130,00 (i.e.): Contrassegno (+ € 6,50) Bonifico anticipato Carta di credito o POS
Ordini sup. a € 130,00 (i.e.): Contrassegno (+ € 6,50) R.B. 30 gg. d.f. Carta di credito o POS

IBAN Ivan Ilıc' srl: IT50N056960162500003415X03 **IBAN Cliente:**

Carta di credito o POS Visa Mastercard Numero Scadenza

DATA

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei acconsente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco.



IVAN ILIC' srl

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646

ilic@ilicdental.com

www.ilicdental.com