

Rifinire e lucidare zirconia e disilicato di litio con eZr.

Rifinitura intraorale:

- Consente una procedura facile e sicura per Zirconia e Disilicato di Litio.
- Evita il surriscaldamento che potrebbe causare una rottura prematura.
- L'esclusivo lucidante diamantato riduce la possibilità di scheggiature e microfratture.



Lucidatura intraorale:

- Correzione di restauri alla poltrona, quali inlay, onlay, faccette e corone.
- Fornisce una superficie occlusale liscia e lucidata come mai prima, eliminando l'abrasività sulla dentatura opposta.
- Elimina la necessità di paste lucidanti, riducendo i costi generali della procedura.



Kit FPZK01-X - eZrTM

Kit completo con 2 gommini abrasivi e 6 gommini lucidanti
2 gommini per sgrossatura (blu)
3 lucidanti per rifinitura e prelucidatura (verdi)
3 lucidanti per brillantatura (arancio)

€ 198,00

Garrison
Dental Solutions
www.garrisondental.com

Per ordini:
02 55 016 500
www.ilicdental.com

Ricambi eZr.

	Codice	Descrizione	Utilizzo	Prezzo
	FPZC030-X	Rifinitura con disco blu a grana grossa, confezione da 5	Rifinitura	€ 154,00
	FPZC010-X	Rifinitura, tronco di cono blu a grana grossa, confezione da 5	Rifinitura	€ 117,00
	FPZM010-X	Lucidante a punta fine grana media verde, confezione da 5	Levigatura e prelucidatura	€ 49,00
	FPZM020-X	Lucidante a punta grossa grana media verde, confezione da 5	Levigatura e prelucidatura	€ 73,00
	FPZM030-X	Lucidante a disco grana media verde, confezione da 5	Levigatura e prelucidatura	€ 73,00
	FPZM040-X	Lucidante a coppetta grana media verde, confezione da 5	Levigatura e prelucidatura	€ 73,00
	FPZF010-X	Lucidante a punta fine grana fine, arancio, confezione da 5	Brillantatura	€ 49,00
	FPZF020-X	Lucidante a punta grande grana fine arancio, confezione da 5	Brillantatura	€ 73,00
	FPZF030-X	Lucidante a disco grana fine arancio, confezione da 5	Brillantatura	€ 73,00
	FPZF040-X	Lucidante a coppetta grana fine arancio, confezione da 5	Brillantatura	€ 73,00

Garrison
Dental Solutions

www.garrisondental.com

Per ordini:
02 55 016 500
www.ilicdental.com

Indiscutibilmente
Liscio.



**Putting ideas
into practice**

Garrison
Dental Solutions

www.garrisondental.com

CASO CLINICO

ESTRUSIONE CHIRURGICA



Dr Riccardo
Becciani


La paziente mi viene inviata da un collega sapendo che mi occupo di estrusione chirurgica al fine di evitare l'estrazione dell'elemento 25 estremamente compromesso. Una volta spiegate a lei ed al collega possibilità, limiti e rischi della tecnica e anche le possibili opzioni (come l'estrusione ortodontica), entrambi accettano di estrarre chirurgicamente il premolare superiore. Dalle radiografie inviate è evidente l'area di radiotrasparenza della porzione coronale della radice ben al di sotto della cresta ossea. Avverto anche il collega della presenza di numerose lesioni interprossimali da carie.

Viene effettuata una estrusione chirurgica senza lembo di accesso di circa 3,5 mm. Nella stessa seduta la radice, previo isolamento con diga, viene splintata ai denti contigui con due "punti" di flow. Si effettua una toilette del tessuto danneggiato dalla carie e viene eseguita un restauro provvisorio con un CVI rinforzato.

Dopo cinque settimane il Dr. Francesco Piras effettua il ritrattamento endodontico e poco dopo si esegue la ricostruzione pre-protetica senza ausilio di perno endocanalare. Dato che l'estrusione espone regolarmente una porzione di radice a diametro ridotto, si effettua una delicata preparazione intrasulculare in modo da dare al tecnico la possibilità di gestire con più semplicità i profili di emergenza del manufatto per colmare gli ampi spazi interprossimali.

Il Sig. Paolo Vigiani effettua una corona in disilicato fresata, che viene cementata con un cemento Self Adhesive (Panavia SA). Dopo l'aggiustamento occlusale eseguito con frese diamantate a grana fine, la lucidatura finale viene effettuata con Gommini EZR Garrison. Il primo passaggio viene eseguito con il gommino blu a grana grossa per eliminare i microsolchi creati dalla fresa diamantata. Successivamente viene passato quello verde a grana media che prepara la superficie alla lucidatura finale da parte del gommino arancio a grana fine.

Tramite questi semplici tre passaggi si ottiene una superficie perfettamente liscia paragonabile ad un passaggio di glasura ma a differenza di questa, che risulta piuttosto abrasiva per l'antagonista, nel caso della lucidatura meccanica ottenuta con i Gommini EZR, avremo una superficie lucida brillante ed assolutamente non abrasiva per l'antagonista. Successivamente si esegue un controllo clinico e radiografico dell'elemento 25 restaurato.

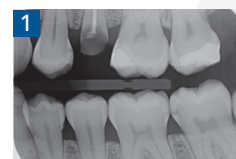

1 Rx Bite Wing dell'elemento 25 completamente compromesso da processo carioso.



2 Immagine clinica dell'elemento 25 totalmente distrutto a livello coronale



3 Lo stesso elemento subito dopo l'estrusione chirurgica




4 L'elemento 25 a cinque settimane dall'estrusione dopo il ritrattamento endodontico (effettuato dal Dr. Francesco Piras). Sono ancora presenti i due punti di composito flow utilizzati per lo splintaggio dopo l'estrusione ed il restauro provvisorio in CVI.



5 Fase della ricostruzione adesiva del moncone (Build Up) con composito flowable utilizzato come base




6 Il moncone dell'elemento 25 appena restaurato con composito body

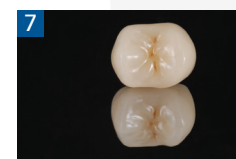

7 Corona in Disilicato di Lito fresata (Sig. Paolo Vigiani)



8 La corona sull'elemento 25 dopo la lucidatura effettuata con i tre gommini EZR Garrison

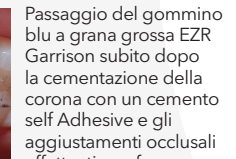

9 Passaggio del gommino blu a grana grossa EZR Garrison subito dopo la cementazione della corona con un cemento self Adhesive e gli aggiustamenti occlusali effettuati con fresa diamantata a grana fine



10 Passaggio del gommino verde a grana media EZR Garrison



11 Passaggio del gommino arancione a grana fine EZR Garrison



12 Radiografia apicale dell'elemento 25 estruso chirurgicamente al termine del restauro



13 Immagine clinica dello stesso elemento ad una visita di controllo

Becciani R, Faganello D, Fradeani M. Surgical extrusion: a simplified esthetic method of treating non-restorable teeth. Rationale and case report. Int J Esthet Dent 2018; 13 (2): 240-273

Leggi qui l'articolo di Dott. Becciani in inglese sulla estrusione chirurgica

Lucidare sarà più facile

con eZr

iliC
SINCE 1949
QUALITY & VALUE

I gommini diamantati lucidanti consentono ai dentisti di rifinire e lucidare, facilmente ed in tutta sicurezza, Zirconia e Disilicato di Litio, riducendo la possibilità di microfratture e scheggiature.


guarda come funziona



1 Iniziare con una sgrossatura mediante i gommini a grana grossa blu. Usare il tronco di cono con estremità piatta per le superfici occlusali/ vestibolari/linguali/buccali ed il disco per le superfici interprossimali.



2 Usare i gommini lucidanti a grana media verdi per levigature e prelucidatura. Usare la punta per i solchi occlusali, la coppetta per le superfici labiali/linguali/buccali ed il disco per le superfici interprossimali.

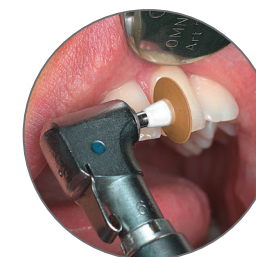

3 Usare i gommini lucidanti a grana fine arancio per la brillantatura. Usare la punta per i solchi occlusali, la coppetta per le superfici labiali/linguali/buccali ed il disco per le superfici interprossimali.

www.garrisondental.com