

Ricerca e Seleziona
Qualità & Soluzioni
per voi!



BIO/SCREEN[®]
ORAL EXAM
SYSTEM



AdDent INCORPORATED | Advancing Den
Excellence
Made in the USA



IVAN ILIC' S.r.l.
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
TEL: +39 02 55 016 500 - 02 36 512 990
ilic@ilicdental.com - www.ilicdental.com


BIO/SCREEN ORAL ESAM SYSTEM

La lampada Bio/Screen Oral è un dispositivo destinato all'uso in aggiunta al tradizionale esame orale, per migliorare la visualizzazione delle anomalie delle mucose orali. Bio/Screen utilizza 5 potenti LED viola che mostrano la biofluorescenza nella cavità orale senza dover spegnere le luci della stanza. È alimentato da una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio. Un pulsante on/off si trova sul lato di visualizzazione. Un oculare e un filtro ottico di visualizzazione aumentano il contrasto tra tessuto sano e anomalo. Un indicatore di carica della batteria si trova sul lato visibile dell'impugnatura.

CARATTERISTICHE

- Bio/Screen è dotato di uno speciale filtro ottico per migliorare il contrasto tra tessuto sano e irregolare per migliorarne la visualizzazione. Non richiede un risciacquo speciale.
- Batteria bio/schermo: il pacco batteria agli ioni di litio è valutato per 500 cicli di ricarica completa, circa 5 anni di utilizzo. Il pacco batteria è protetto mediante un circuito di sicurezza integrato.
- Il design termico migliorato non ha ventole per un funzionamento silenzioso.
- Regolazione dell'emissione luminosa: i LED dell'uscita Bio/Screen mantengono la piena potenza fino all'esaurimento della batteria.
- Spegnimento automatico – Per risparmiare la carica della batteria, una volta attivato e dopo cinque minuti di attivazione continua, i LED di uscita viola si spengono automaticamente e l'unità torna in modalità standby.
- Video dimostrativo disponibile sul nostro sito web www.ilicdental.com

Immagini cliniche di displasia lieve e displasia moderata.
Per gentile concessione Dr. Ross Kerr

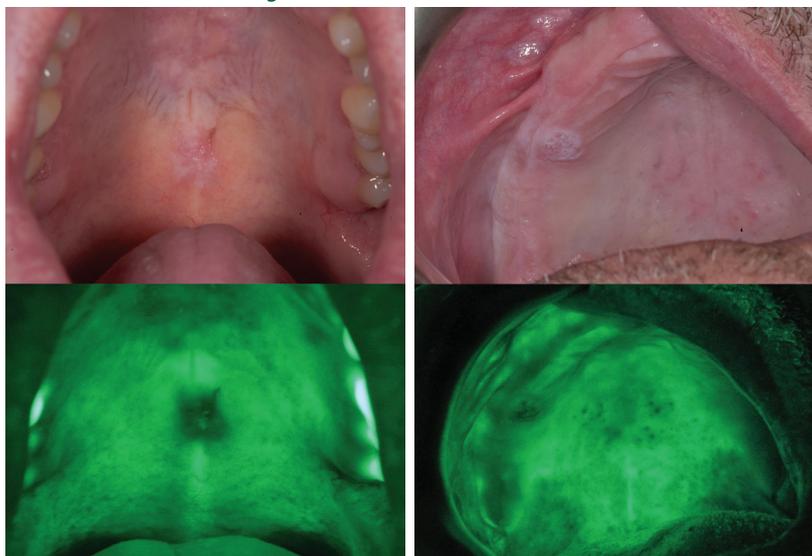

Lieve displasia

Moderata displasia



Video dimostrativo:
www.ilicdental.com



IL TUO SISTEMA LAMPADA PER ESAME ORALE BIO/SCREEN COMPRENDE:

1. Unità bio/schermo
2. Ricarica intelligente agli ioni di litio
3. Coprilenti monouso
4. Occhiali per il paziente

Accessori non inclusi



16 973063	Lenti protettive monouso Bioscreen 50 pz.
16 973026	Occhiali protettivi per paziente
16 973022	Ricarica batteria
16 973005	Adattatore SLR per lenti da 52 a 62 mm.
16 973006	Adattatore per cellulare