

Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!



PREDICTA
BIOACTIVE
Desensibilizzante

Predicta® desensitizer
BIOACTIVE



Sollievo rapido ed efficace dall'ipersensibilità dentinale

Desensibilizzante altamente biocompatibile e al tempo stesso bioattivo grazie alla formulazione chimica di nuova generazione. Rilascia ioni calcio e fosfato nel sito di trattamento, stimolando la rapida formazione di cristalli di idrossiapatite nelle microfessure dello smalto dentale, sulla superficie della dentina trattata e nei tubuli dentinali.

Materiale ipoallergenico privo di resine e sostanze potenzialmente irritanti quali acrilati e aldeidi.

Tratta la sensibilità associata a:

- ▶ dentina esposta
- ▶ sbiancamento dentale
- ▶ scaling o levigatura radicolare
- ▶ recessione gengivale

In gel pronto all'uso


Gel in siringa che non richiede alcuna miscelazione. È sufficiente applicarlo con l'aiuto di un microbrush dopo aver rimosso tartaro e placca dal sito di trattamento, attendere qualche minuto, asciugare l'area con un rotolo di cotone o una garza e il gioco è fatto.




Scansire il codice per il video su come utilizzare Predicta Bioactive Desensitizer

Sito non trattato

Sito trattato

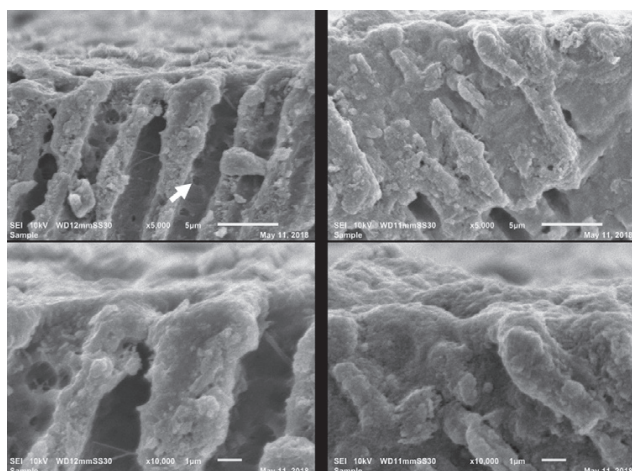

Immagini trasversali al SEM. Si noti la permeabilità dei tubuli dentinali e gli orifizi aperti delle branche laterali (freccia) che sono stati ben sigillati sul lato trattato. (Immagini University of Washington School of Dentistry).

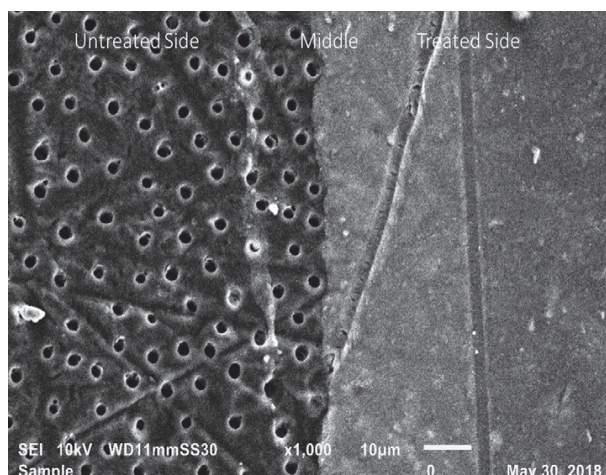

Confronto tra tubuli dentinali non trattati (a sinistra) e tubuli ricoperti da uno strato denso di Predicta® Bioactive Desensitizer (a destra). Immagini University of Washington School of Dentistry.



“Predicta® Desensitizer è molto efficace, funziona molto bene bloccando immediatamente la sensibilità per diversi giorni e con una seconda applicazione riduce drasticamente la sensibilità a lungo termine.”

Prof. Consuelo Sanavia, Italia

**Scansire il codice per accedere al webinar gratuito
”Ipersensibilità Dentinale. Gestione, metodi ed Ergonomia”**



“

Predicta® Desensitiser ci ha colpiti fin dal primo utilizzo. Le caratteristiche che ci hanno entusiasmato sono state la compatibilità con i sistemi adesivi, la formulazione in gel per una facile applicazione e il colore che lo rende ben visibile sulle superfici da trattare per un’applicazione precisa.

”

Prof. Loris Prosper e Dott. Tiziano Galizzi, Italia



“La facilità con cui posso trattare l’ipersensibilità dei miei pazienti utilizzando Predicta® Desensitizer mi ha sorpreso positivamente. Il gel è incredibilmente semplice da usare e molto delicato per il paziente. Dà un sollievo immediato che dura a lungo. Anche gli igienisti dentali del nostro studio lo usano volentieri sui loro pazienti.”



Dott. Sjobbe Besseling, Paesi Bassi

Scansire il codice per guardare il video



50 38625	Desensibilizzante Predikta Bio Kit3: 3 siringhe da 3ml, 30 tips, 50 MicroBrush, 1 pozzetto
50 38626	Desensibilizzante Predikta Bio Kit1: 1 siringhe da 3ml, 30 tips, 50 MicroBrush, 1 pozzetto 34, 24
46 D2390	Puntali precurvati, (gialli) 30 pz.
46 D3391	Microbrush sottile 1,5mm, 100 pz.
46 P2127	Puntali precurvati, (gialli) PERIODENT 100 pz.
46 539155	Multi Brush Denbur (ø1 mm), 150 pz.