



START SEEING

SIGILLANTE IDROFILO:

- procedura semplificata
- adesività straordinaria
- visibile al controllo



UltraSeal XT[®] hydro[•]

SIGILLANTE IDROFILO PER SOLCHI E FOSSETTE



ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

■ Procedura semplificata


Tanti sigillanti disponibili sul mercato rendono difficile la scelta del sigillante più indicato per i propri pazienti. Il marchio **UltraSeal** ha dimostrato con la sua leadership ultradecennale che di questo prodotto ci si può fidare.

UltraSeal XT[®] plus è considerato il LEADER tra i sigillanti dal 1998¹, ed in tutti questi anni ha ottenuto valori di ritenzione ottimali.² Reality lo ha definito il prodotto in assoluto migliore (*"It's simply the best"*)³. Con tanta esperienza storica alle spalle siamo particolarmente fieri di proporre una nuova opzione nel segmento dei sigillanti UltraSeal: **UltraSeal XT[®] hydro**.

I bambini chiedono di **"finire velocemente"** ed i genitori di **"proteggere a lungo"**, **UltraSeal XT[®] hydro** con la sua chimica garantisce trattamenti efficaci e veloci per i pazienti e un facile controllo durante l'applicazione e nelle successive visite di controllo per il professionista.

UltraSeal XT[®] hydro offre molteplici vantaggi:

- Chimica idrofilica: ideale per i bambini
- Tecnologia adesiva evoluta (Advanced Adhesive Technology)
- Proprietà fluorescenti eccezionali
- Disponibile in due colori: Bianco Opaco (OW) e Natural (ovvero: tra A1 e A2)
- Tissotropico: penetra nei solchi e nelle fossette facilmente, ma non cola dopo l'applicazione
- Formulazione priva di BPA (Bisfenolo A)
- Resina altamente riempita (al 53%)
- Rilascio di Fluoro
- Radiopaco

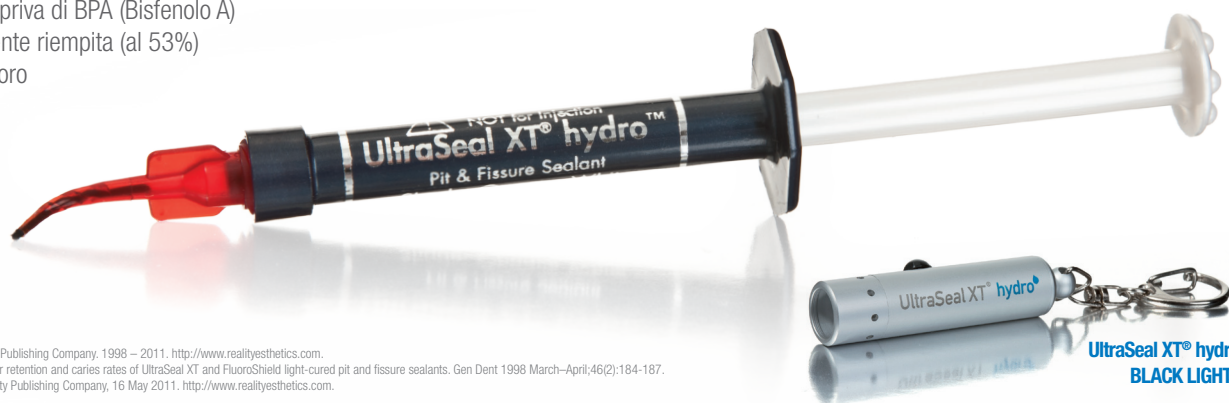


1 Reality Ratings. Reality. Reality Publishing Company, 1998 – 2011. <http://www.realityesthetics.com>.
2 Bokman L, Carson B. Two year retention and caries rates of UltraSeal XT and FluoroShield light-cured pit and fissure sealants. Gen Dent 1998 March–April;46(2):184-187.
3 UltraSeal XT plus. Reality. Reality Publishing Company, 16 May 2011. <http://www.realityesthetics.com>.

■ Adesività straordinaria

Le nuove proprietà idrofiliche ed adesive di **UltraSeal XT[®] hydro** assicurano risultati clinici eccellenti. La chimica idrofila con caratteristiche tissotropiche "cattura" l'umidità presente a livello microscopico in profondità di solchi e fessure, che nell'uso di sigillanti idrofobi frequentemente è causa di insuccesso della sigillatura. L'evoluta tecnologia adesiva lega in modo sicuro il sigillante allo smalto, migliorandone la ritenzione ai margini e riducendo allo stesso tempo il rischio di microinfiltrazione.

■ Visibile ad ogni controllo

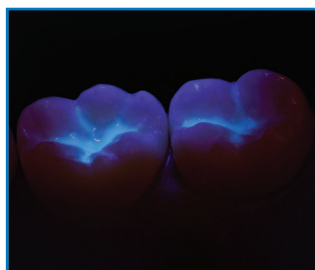

Raccomandiamo le
Lampade Led per la
fotopolimerizzazione
VALO o VALO Cordless
con
LENTE BLACK LIGHT
per transilluminare
il sigillante

Dopo aver eseguito la sigillatura è difficile controllare i margini e la ritenzione. **UltraSeal XT[®] hydro**, grazie alla sua eccezionale fluorescenza risolve questo problema. Infatti è totalmente visibile all'esposizione con LUCE NERA (Black Light) e questa eccezionale fluorescenza consente all'operatore di controllare agevolmente l'integrità della sigillatura al termine del trattamento ed anche in occasione delle successive visite di controllo. A questo scopo raccomandiamo l'uso di VALO o VALO Cordless con la lente Black Light.

*UltraSeal XT hydro ha in dotazione anche **UltraSeal XT[®] hydro BLACK LIGHT** che può facilmente dimostrare l'elevata visibilità del prodotto.



Microinfiltrazione e distacco dai margini: dati comparativi

UltraSeal XT® hydro:




- Nessuna microinfiltrazione • Margini sigillati

Sigillante idrofilo della concorrenza:

- Microinfiltrazione (1) • Distacco dai margini (2)

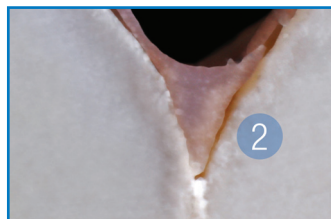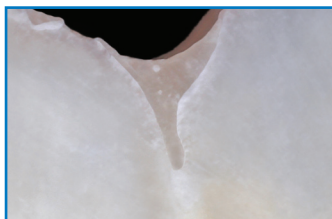

Proprietà fisiche: confronto⁴

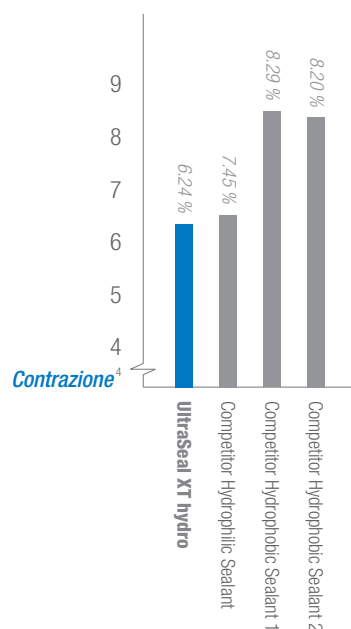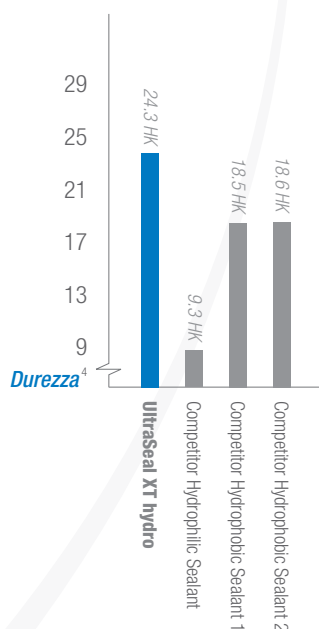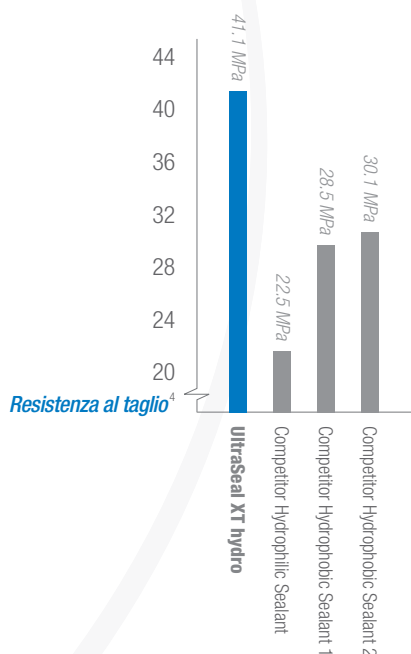


Un'elevata resistenza al taglio è fondamentale per il mantenimento di una straordinaria adesione allo smalto

Un'elevata durezza finale è sinonimo di una perfetta polimerizzazione ed inoltre protegge da eventuali deformazioni


Una bassa contrazione è garante per un'eccellente copertura in fase di applicazione ed in quelle successive

⁴ Data on file

UltraSeal XT® hydro: 3 semplici passaggi applicativi

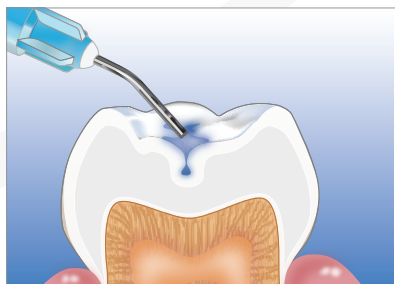

1. Mordenzatura e risciacquo

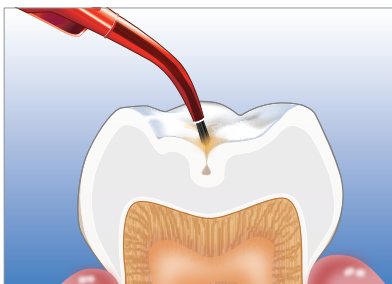

2. Applicazione di UltraSeal XT® hydro



3. Polimerizzazione per 3 sec. con VALO in modalità Xtra Power (3.200 mW/cm²)

SEMPRE SORRIDENTI! E senza carie!



UltraSeal XT® hydro

UltraSeal XT hydro **INTRO** Kit

1 siringa 1,2ml UltraSeal Xt hydro
1 siringa 1,2ml UltraEtch
20 Inspiral Brush Tips, 20 Blue Micro Tips

22 16532 Bianco Opaco
22 16533 Natural

UltraSeal XT hydro **ECONO REFILL**

20 siringhe da 1,2ml UltraSeal Xt hydro

UP 3536 Bianco Opaco

UltraSeal XT hydro **REFILL**

4 siringhe da 1,2ml UltraSeal Xt hydro


22 16532 Bianco Opaco
22 16533 Natural

22 16551 - UltraSeal XT hydro **BLACK LIGHT**

1 portachiavi Black Light

UltraSeal Kids Spazzolini

UP 5854 Spazzolini per bambini
UltraSeal Kids 12 pezzi

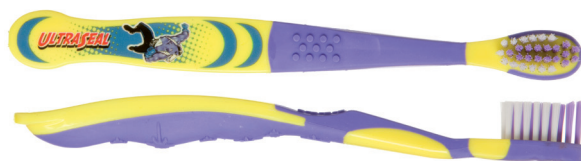

IVAN ILIC' srl

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36512990 | FAX: +39 02 55016646

MAIL: ilic@ilicdental.com

 www.ilicdental.com

 **ULTRADENT**
PRODUCTS, INC