


Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!

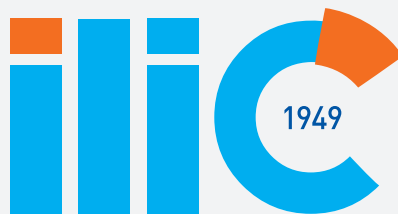

Strumento dentale per la rimozione
di strumenti fratturati all'interno
dei canali radicolari

PRONTI A
TUTTO



Il kit comprende:

- BTR PEN – 1 strumento in acciaio inox
- CALIBRATORE PER BTR – 1 pz.
- PUNTA PER BTR Ø 0,3 – 5 pz.
- MOLLA PER BTR – 2 tipi: morbida e dura (la terza molla centrale è fissata sullo strumento)
- O-RING in silicone per BTR – 3 pz.

È sufficiente una sola

Lo strumento BTR è stato progettato e realizzato secondo i principi dell'ergonomia del lavoro. Il design semplice dello strumento BTR consente di utilizzarlo senza assistenza, con una sola mano.



Punte sostituibili

La disponibilità di tre punte di lavoro consente all'operatore professionale di sceglierne una in base al tipo e alle dimensioni del frammento da rimuovere.



Garanzia a vita

Realizzato con materiali della migliore qualità e resistente ai danni meccanici.



Una presa forte e sicura

La punta sottile e flessibile con memoria di forma consente l'inserimento dello strumento in canali radicolari stretti e curvi senza che sia necessaria una preparazione eccessiva del canale.


TRE PUNTE

UN SOLO OBIETTIVO


Ø 0,3 mm

Ø 0,4 mm

Ø 0,5 mm

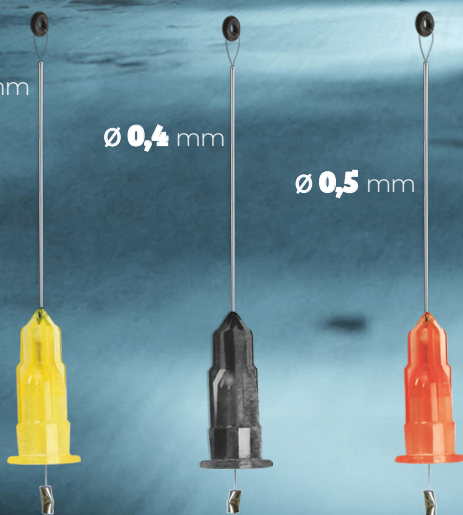

btrPen
GRUPPO UFFICIALE

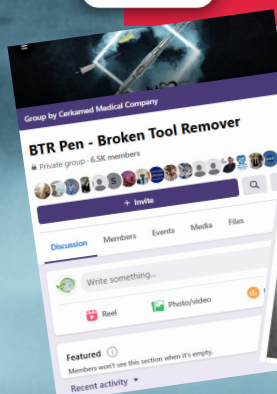

Le punte intercambiabili sono disponibili separatamente, in confezione da 5 pz.

www.btr-pen.com



BTR PEN – Passo dopo passo



*Scausiona il codice QR
e guarda il video!*




- 1** Posizionare il cappuccio del cursore in posizione di partenza – spostarlo completamente verso il basso fino all'impugnatura – parte anteriore.
Per regolare la posizione del cappuccio del cursore, utilizzare la manopola di bloccaggio del passante.



- 2** Inserire la parte in rilievo del filo di nitinolo nel foro dell'impugnatura – parte anteriore.



- 3** Tendere il filo di nitinolo utilizzando la manopola di bloccaggio del passante.

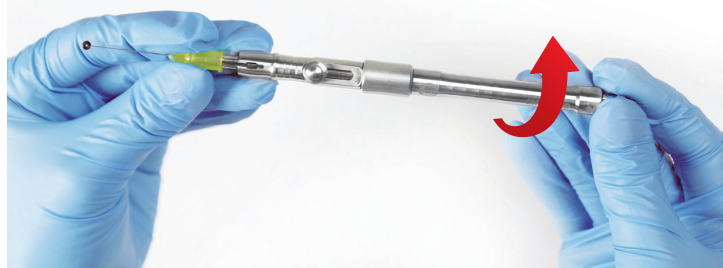

- 4** Spingere il coperchio di plastica della punta verso l'impugnatura – parte anteriore.



- 5** Rimuovere l'o-ring in silicone dal passante in nitinolo – tagliare l'o-ring con le forbici e rimuoverlo dal passante in nitinolo con una pinzetta.




- 6** Piegare la punta con il passante in nitinolo in base all'angolo di curvatura del canale radicolare, in modo da facilitare l'accesso dello strumento al canale radicolare.



- 7** Afferrare la lima rotta – comprimere il passante in nitinolo spostando il cappuccio del cursore verso l'alto.



- 8** Allentare la lima rotta eseguendo i movimenti laterali.
Rimuovere la lima rotta allentata dal canale radicolare, tenendo sempre sollevato il cappuccio del cursore.

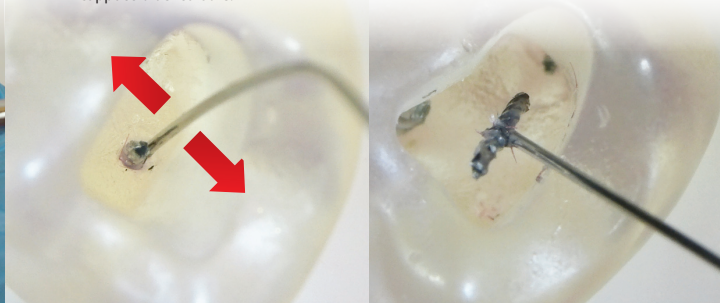

IVAN ILIC' S.r.l.

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 55 016 500 - 02 36 512 990

ilic@ilicdental.com | www.ilicdental.com