

Dental Boutique



Ceramage UP

Composito microibrido fluido, fotopolimerizzabile  
per la tecnica di stratificazione libera



## Diverso in modo convincente

I requisiti richiesti ad un sistema di rivestimento estetico sono in continuo mutamento. I pazienti hanno aspettative molto elevate e desiderano un risultato dall'effetto il più naturale possibile non solo con i restauri in ceramica. Per questo è importante offrire soluzioni perfette anche con materiali a ridotto contenuto di ceramica.

Con un lavoro pluriennale di ricerca e sviluppo è stato messo a punto un composito microibrido di altissima qualità che stabilisce nuovi parametri di riferimento nel campo dei materiali fotopolimerizzabili per rivestimento estetico e per restauri: CERAMAGE UP.


Questo nuovo composito ad alte prestazioni unisce in un unico materiale tutte le caratteristiche positive del composito e della ceramica.

La viscosità tissotropica delle masse pronte all'uso permette inoltre di modellare liberamente le forme dentali direttamente dal dispenser, con una sonda o un pennello.



## Naturalmente indistinguibile

Le proprietà foto-ottiche delle masse opalescenti CERAMAGE UP incisali e traslucenti riprendono quelle dei denti naturali. Il risultato è un restauro dall'aspetto naturale, con una straordinaria brillantezza in ogni condizione di luce.

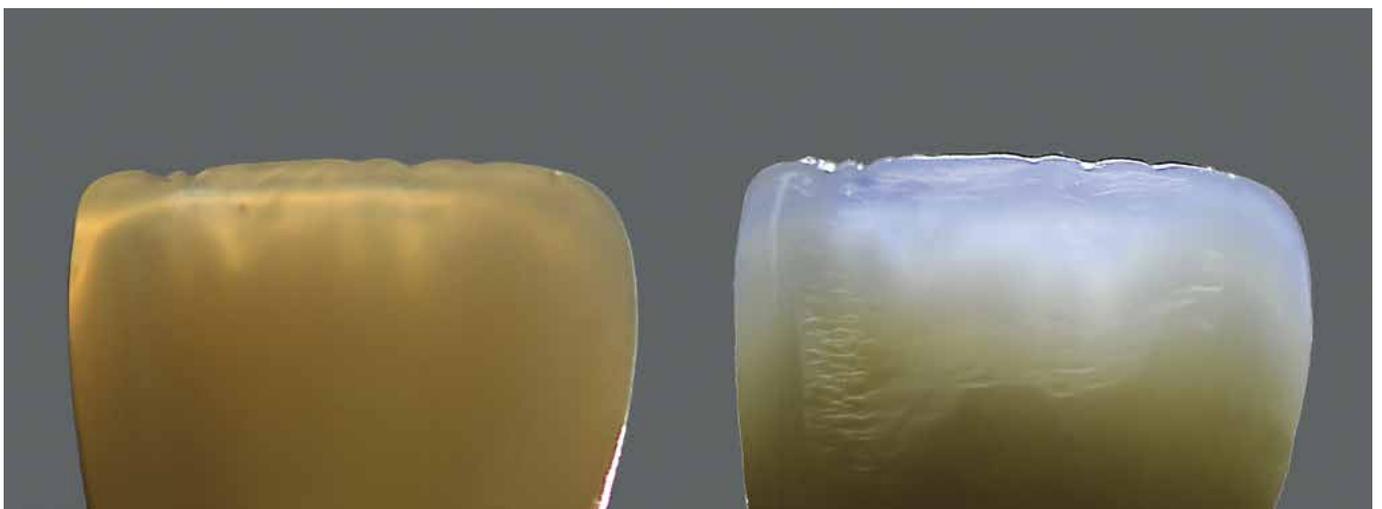

# Un sistema completo per tutte le indicazioni

CERAMAGE UP combina in modo unico i vantaggi di economicità ed efficienza in un sistema completo e compatto. Inoltre questo materiale high-tech è molto stabile, elastico e altamente estetico.

Diversamente dalla ceramica, CERAMAGE UP è in grado di assorbire le forze, una caratteristica positiva nel caso di carichi occlusali elevati.


L'ampio spettro di indicazioni comprende tutti i tipi di restauri estetici per denti anteriori e posteriori, con un elevato comfort per il paziente.

- Corone e ponti totalmente rivestiti
- Strutture telescopiche e sovrastrutture su impianti totalmente rivestite
- Lavori su attacchi
- Rivestimenti occlusali
- Inlay / onlay
- Faccette
- Provisori a lungo termine
- Caratterizzazione di denti per protesi




## Unico

Grazie alla matrice con riempitivi ceramici e alla nanostruttura compattata in modo omogeneo, CERAMAGE UP garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione, alla flessione e stabilità cromatica. La sua composizione rende unico questo materiale da rivestimento estetico.

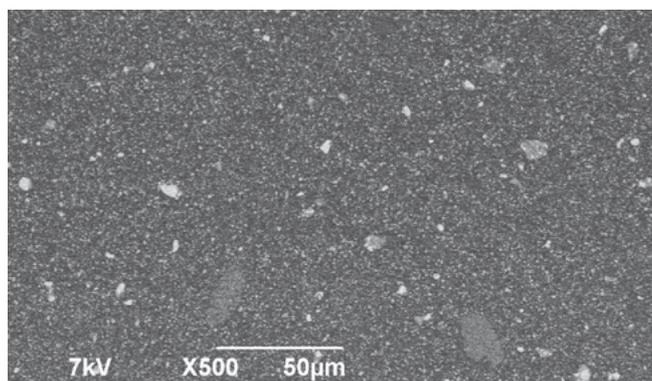

I compositi fluidi convenzionali spesso contengono una quantità ridotta di riempitivi con una distribuzione strutturale non uniforme.

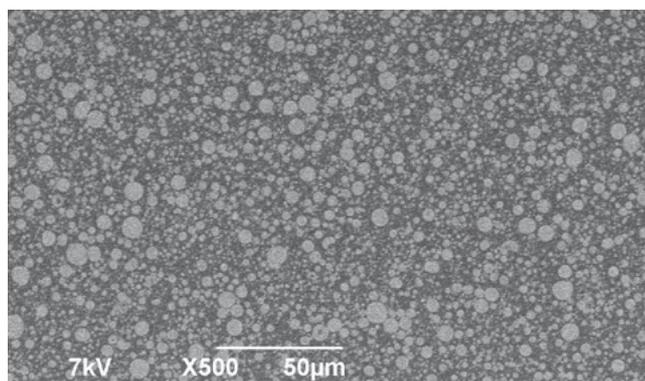

La nanostruttura omogenea e compatta rende CERAMAGE UP fluido e tuttavia stabile.



## Moderno ed efficace

Un composito moderno deve soddisfare diversi criteri: colori naturali per un'estetica convincente, elevata resistenza ed elasticità, nonché un'eccellente lucidabilità e stabilità nel tempo. Con CERAMAGE UP vengono soddisfatti tutti i requisiti di un restauro di elevato valore qualitativo.



## VANTAGGI

Spettro di indicazioni quasi illimitato

Riproduzione facile ed efficiente di tutti i colori della scala VITA\* Classical

Estetica ed opalescenza naturali

Resistenza e comportamento all'abrasione eccellenti

Adesione sicura a tutte le leghe dentali e ai materiali per strutture in ceramica e ceramica ibrida con SHOFU MZ Primer Plus e il sistema adesivo CRB

Eccellente lucidabilità e densità della superficie

Resistenza alla placca e stabilità cromatica

## Individualizzabile e sicuro

Per ottenere un aspetto ancora più personalizzato dei restauri anteriori e posteriori, è possibile miscelare comodamente le singole masse fluide. Nei materiali in pasta la miscelazione provoca spesso la formazione di numerose bolle e una consistenza non omogenea. Le masse fluide CERAMAGE UP offrono massima versatilità e sicurezza.

Miscelandole come le masse ceramiche, è possibile ottenere qualsiasi colore intermedio secondo le esigenze cromatiche individuali.





# Componenti del sistema



## CERAMAGE UP 2 Color Set

Un approccio interessante alla tecnica di stratificazione libera dei restauri nei colori A2 e A3  
PN 2306 \*\*



## CERAMAGE UP 8 Color Set

L'assortimento base per la realizzazione di restauri estetici nei colori VITA\* Classical da A1 a A4, B2, B3 e C2  
PN 2305 \*\*



## Lite Art Full Set

15 supercolori in pasta fluorescenti e fotopolimerizzabili per caratterizzazioni individuali  
PN 1970



## Solidilite V / Sublite V

I potenti apparecchi per una fotopolimerizzazione efficace e delicata  
Solidilite V - PN 5106 / Sublite V - PN 5108



## SHOFU MZ Primer Plus

Per un'adesione sicura dei compositi su tutte le leghe dentali  
PN Y0006



## CRB - Ceraresin Bond

Unioni stabili tra compositi, resine e ceramiche  
PN 1741

\* VITA è un marchio registrato di VITA-Zahnfabrik, Bad Säckingen / Germania.  
\*\* SHOFU MZ Primer Plus deve essere ordinato separatamente.