


PERIODENT[®] by DENTMATE LUMINDEX 3

LED Penlight

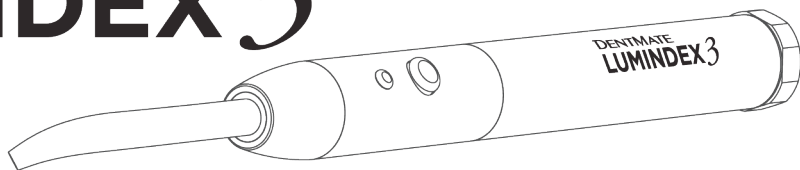

Istruzioni d'uso

Grazie per aver acquistato la lampada a LED LUMINDEX 3. Ricerca e sviluppo avanzati hanno reso LUMINDEX 3 lo strumento superiore progettato per anni di utilizzo senza problemi.



Leggere e comprendere interamente le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo e conservare questo manuale come riferimento. Il manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.



Importatore e Distributore:

IVAN ILIC' srl

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36512990 | FAX: +39 02 55016646

WEBSITE: www.ilicdental.com

MAIL: ilic@ilicdental.com



Avvertenza di pericolo



Luce ad alta intensità



Numero di serie



Codice



Leggere le istruzioni prima dell'uso



Data di fabbricazione




Tenere asciutto



Riciclo



Non smaltire con normale indifferenziata

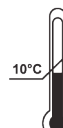

Limiti di temperatura



Pressione atmosferica per conservazione



Livello di umidità di stoccaggio



Attrezzatura ordinaria



Esclusivamente ad uso professionale



Fabbricante



European Representative



Marchio CE


Informazioni sul prodotto.

La lampada è stata prodotta utilizzando LED di luminosità super elevata per essere un efficace ausilio nell'ispezione di carie, tartaro, fratture e nell'individuazione degli orifici canalari durante le procedure terapeutiche e chirurgiche, spesso non necessitando così di radiografie. Il feedback immediato consente di risparmiare tempo, migliora la produttività, il comfort del paziente e la cura

- Circuito automatico di compensazione per potenza costante. Indicatore LED di batteria scarica.
- Spegnimento automatico
- Funzione di spegnimento automatico

Indicazioni per l'uso

LUMINDEX 3 è un transilluminatore ausiliario per diagnosi dentali/medicali e per istruzioni di igiene orale da parte del professionista dentale/medicale. **ESCLUSIVAMENTE PER USO DENTALE/MEDICALE.** Per ottenere un risultato superior, abbassare la luce ambientale e spegnere la lampada del riunito.

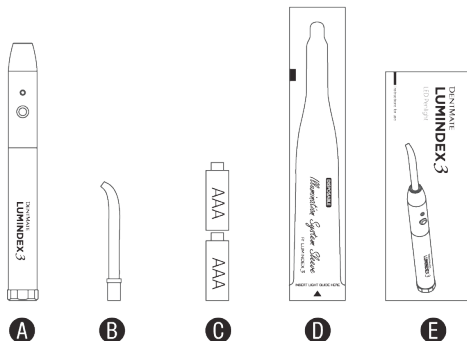

Componenti del sistema

Numero articolo	Descrizione	Quantità Unità
A	LUMINDEX 3 Manipolo	1
B	Guida luminosa da 3mm	1
C	Batterie Alcaline AAA	2
D	Guaine monouso	20
E	Istruzioni d'uso	1

Informazioni sul prodotto

A. ON/OFF Pulsante

Premendo il pulsante si accende la luce ON e si seleziona l'intensità preferita tra le modalità HI-LO-OFF:

- Premere una volta per l'intensità alta.
- Premere nuovamente per l'intensità bassa
- Premere il tasto ancora per spegnere la lampada

B. LED Livello di batteria basso



Quando l'indicatore LED lampeggia ogni 3 secondi, sostituire le batterie con nuove alcaline AAA.

C. Alloggiamento batterie

Istruzioni d'uso iniziali

Passaggio 1: Svitare l'alloggiamento batterie (A) in senso antiorario

Passaggio 2: Inserire 2 batterie AAA (B) seguendo il disegno sull'alloggiamento batterie

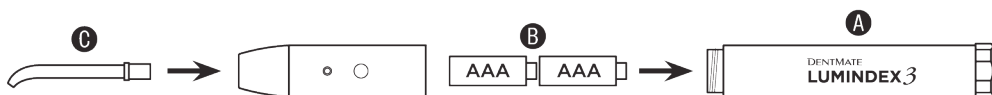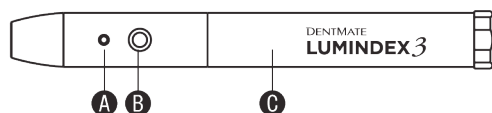

Step 3: Inserire con attenzione la guida luminosa (C) direttamente nel manipolo prestando attenzione a non romperla. **NON FORZARE**

Step 4: Premere il pulsante ON/OFF per l'operatività.

Funzione di spegnimento automatico

LUMINDEX 3 si spegne automaticamente dopo 5 minuti di utilizzo per preservare le batterie.

Detersione, Disinfezione e Sterilizzazione

L'uso delle guaine protettive monouso è un'ulteriore misura precauzionale contro la contaminazione ma non sostituisce la disinfezione del dispositivo. Le guaine monouso sono progettate solo per un solo utilizzo.



Questo strumento deve essere disinfettato come preparazione normale per ciascun paziente. Leggere l'intera sezione prima di procedere alla pulizia dello strumento. Non seguire queste linee guida può causare danni all'apparecchio.

Il corpo dell'apparecchio può essere pulito utilizzando una soluzione disinfettante per superfici. Seguire le istruzioni del fabbricante per ogni soluzione utilizzata. **NON UTILIZZARE UNA SOLUZIONE contenente candegina. NON IMMERGERE.**



Condizioni ambientali

Non conservare lo strumento in ambiente umido. Non tenere lo strumento dove possa entrare in contatto con liquidi. Non esporre lo strumento a qualsiasi fonti di calore.



Smaltimento delle batterie

Per motivi ambientali, si prega di smaltire le batterie in base alle linee guida o alle normative ambientali locali. **NON** gettare le batterie nel fuoco.

Garanzia

DENTMATE garantisce che il prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto, considerata come la data della fattura. A propria discrezione saranno riparate o sostituite le unità restituite a causa di difetti di fabbricazione, entro il periodo di garanzia.



Sono espressamente esclusi dalla garanzia:

- Danni e / o guasti all'apparecchiatura causati da cadute e / o sobbalzi durante la manipolazione dopo l'acquisto e / o durante l'uso normale.
- Danni e / o guasti dell'apparecchiatura causati da disastri naturali, come terremoti, alluvioni, fulmini, inquinamento, tensione elettrica errata e picchi di tensione.

Qualsiasi tentativo di apertura del manipolo invaliderà la garanzia.

Data di fatturazione _____

Specifiche del prodotto

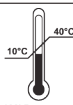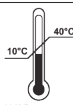Tipo di informazione	Specifiche
Nome del dispositivo	LED Penlight
Numero del modello	LUMINDEX 3
Batteria	2 Batterie Alkaline 1,5V AAA
Sorgente luminosa	LED ad alta potenza
Colore della temperatura	6500°K
Intensità radiante	Modalità LOW (bassa):15,000 lux @ 5mm Modalità HIGH (alta):30,000 lux @ 5mm
Dimensioni del dispositivo	16 mm ø (max) x 135 mm L
Peso del dispositivo	59 g
Protezione da immissione di liquidi	IPX0
Ambiente operativo	Temperatura ambientale  Umidità relative  Pressione atmosferica 
Ambiente di stoccaggio e trasporto	Temperatura ambientale  Umidità relative  Pressione atmosferica 



Fabbricante

DENTMATE TECHNOLOGY CO., LTD.
8F, No. 8-11, Sec. 1, Zhongxing Road,
Wugu District, New Taipei City 24872,
Taiwan

Importatore e Distributore esclusivo:

IVAN ILIC' srl

Via L. Muratori, 46/11
20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36512990

FAX: +39 02 55016646

WEBSITE: www.ilicdental.com

MAIL: ilic@ilicdental.com

ATTENZIONI



Utente

LUMINDEX 3 è un transilluminatore ausiliario destinato alla diagnosi dentale / medica e all'igiene orale da parte di professionisti dentali e medici. SOLO PER USO DENTALE / MEDICALE.



Condizioni ambientali

Non conservare il dispositivo in ambienti umidi. Non posizionare il dispositivo dove potrebbe venire a contatto con liquidi. Non esporre il dispositivo a fonti di calore.

Non utilizzare il dispositivo in presenza di ossigeno libero, sostanze anestetiche o infiammabili.

Non caricare, utilizzare o conservare il dispositivo a temperature elevate. Rispettare le condizioni operative e di conservazione specificate.



Rischio di scosse elettriche

LUMINDEX 3 è un dispositivo elettrico progettato per soddisfare gli standard di sicurezza elettrica in tutto il mondo. Per evitare scosse elettriche:

- Non tentare di aprire o modificare l'unità in alcun modo. Solo i centri di assistenza autorizzati da DENTMATE possono aprire e riparare il dispositivo.
- Non inserire oggetti estranei all'interno del dispositivo.



Rischio di bruciature.

Come nel caso di tutte le luci ad alte prestazioni, l'elevata intensità luminosa determina un certo sviluppo di calore. L'esposizione prolungata vicino alla polpa e ai tessuti molli può causare danni irreversibili. Pertanto, questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da professionisti addestrati.



Pericolo per gli occhi

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi quando si utilizza questo dispositivo.

Non puntare la luce sugli occhi. La luce riflessa dalla superficie dei denti può causare danni agli occhi.



Batteria

Utilizzare solo batterie alcaline AAA. Non mettere in cortocircuito la batteria. Non conservare a temperature superiori a 40° (104°F), a 60° solo per un breve periodo. In caso di non utilizzo per 6 mesi o più, rimuovere le batterie dall'alloggiamento.



Riparazioni e difetti Non utilizzare il dispositivo se si sospetta che sia danneggiato o difettoso. Se le batterie sono difettose, NON trasportare il dispositivo in aereo in nessun caso.

Risoluzione dei problemi

Problema	Risoluzione
Il dispositivo non si accende	Inserire 2 nuove batterie AAA nell'alloggiamento seguendo lo schema.

Componenti del sistema

Utilizzare solo componenti/accessori e ricambi originali DENTMATE

Numero articolo	Descrizione	Quantità/Unità
2402-0012	Guida luminosa da 3 mm.	1 ciascuno
2401-0008	Guaine monouso	100/cf.