

Impronta

Procedura step by step per la colatura di un'impronta Triple Tray e la contemporanea posa in articolatore col sistema Monotrac VSP



1. Articolatore Monotrac VSP per quadranti e base diritta per quadranti. Spruzzare uno strato leggero di spray silicico isolante sull'intera superficie del tray VSP. Porre il tray con l'inserto VSP nella base scelta e, se necessario, preparare lo stop posteriore.



2. L'impronta Triple Tray viene scaricata e provata prima della colatura. Asportare il materiale d'impronta eccedente fino ad una dimensione verticale di 2 cm ca. lavorando paralleli e centrati rispetto al piano oclusale.




3. Colatura dell'impronta Triple Tray dal lato dei monconi e riempimento della base. L'impronta viene girata e posta sulla base.




4. L'impronta posta sulla base ed il gesso viene lasciato indurire.




5. Colatura del lato antagonista dell'impronta. Inserire il lato dell'articolatore dotato di travata sullo stampo per la base antagonista e colare la relativa base. Impegnare i due lati della cerniera e chiudere l'articolatore.

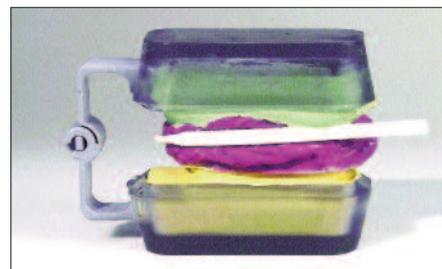

6. Monotrac viene girato fino all'indurimento del gesso dell'antagonista.

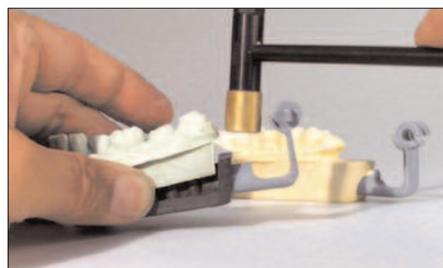

7. Dopo l'indurimento del gesso si rimuovono gli stampi per le basi e l'impronta. Per espellere il modello dall'inserto è sufficiente trattenere il modello con una mano e battere delicatamente sulla parte posteriore dell'inserto con il martello. Per VSP ad arcata completa si batte sul segmento centrale. Per l'agevole rimozione dei detriti di lavorazione il modello può essere asciugato sotto una lampada o in un essiccatore.

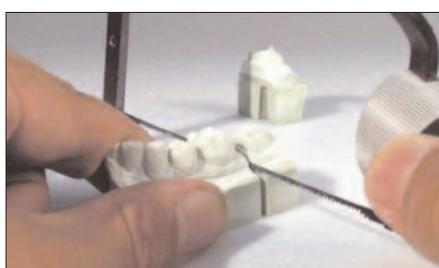

8. Segmentare il modello come desiderato. La sega per monconi Monotrac, opzionale, è dotata di disco diamantato e produce tagli rapidi e dritti dal basso. Ci si ricordi sempre di togliere ogni residuo di polvere e detriti con aria compressa ed un pennello morbido prima di riposizionare i segmenti nell'inserto Monotrac VSP.



9. I modelli Monotrac completati, veduta vestibolare. La sfasatura delle proiezioni ritenitive interne consente la ritenzione di qualunque moncone, anche del più sottile.



Monotrac

Per ulteriori informazioni sul sistema, i kit, gli accessori ed i ricambi richiedeteci il catalogo di laboratorio e gli specifici depliant informativi.

19 7100 Monotrac Kit Introduttivo

- 10 Articolatori VSP arcata completa
- 10 Articolatori VSP a quadrante
- 10 Articolatori Monotrac Horizontal
- 2 Basi medie arcata completa (1 paio)
- 4 Basette diritte (due paia)
- 5 Stop centrici
- 1 Pennello
- 1 Martello
- 1 Modello campione VSP
- 1 Compact disk
- Istruzioni
- € 129