

Sede
20135 MILANO
Viale Umbria 19/a
Tel. 02 55 016 500 r.a.
Fax 02 55 016 646



Filiale
00161 ROMA
Via Morgagni 19
Tel. 06 44 033 50 r.a.
Fax 06 44 033 48

Dr Riccardo Illic spa
import export dental & general medical supplies

NUOVA FASCIA FRONTALE PER LAMPADA LED NATURAL +

Gentile Cliente,

siamo lieti di accludere questa nuova fascia che oltre ad essere più resistente alla precedente in dotazione alla Lampada LED Natural+, consente di posizionare la lampada sulla fronte del paziente, sostenuta dalla fascia stessa.

Come:

- 1 Posizionare la lampada di fronte all'operatore che deve sistemare la fascia in modo da vedere a sinistra il blocco batterie.
- 2 Dall'esterno verso l'interno far passare la fascia attraverso la fessura in modo tale che l'operatore vedrà sulla fascia appena passata frontalmente la scritta verde Natural + (dalla parte opposta il velcro)
- 3 Far scorrere l'intera fascia attraverso la fessura fino a che il cuscinetto non arrivi a ridosso della sporgenza bianca coi "gradini" della Lampada; far passare la spugnette in modo che si infili e ricopra questa parte di plastica fino in fondo in modo che la fibbia nera si posizioni dopo la spugnette
- 4 Passare la fascia all'interno della fibbia nera in modo da formare un cerchio che, una volta stretto sulla fronte del paziente, servirà come sostegno alla Lampada.
- 5 Posizionare bene il braccio della lampada in modo il blocco Luci LED sia all'altezza della bocca del paziente a circa 5-10 cm di distanza; stringere la fascia con il paziente sdraiato in modo da evitare che il peso della lampada possa far perdere la posizione corretta.




La fascia può essere mantenuta pulita se ricoperta da una benda elastica facilmente reperibile in farmacia e larga poco più della fascia.

Cordiali saluti,

Dr. Riccardo ILIC'

Presidente

Dr. Riccardo ILIC' spa

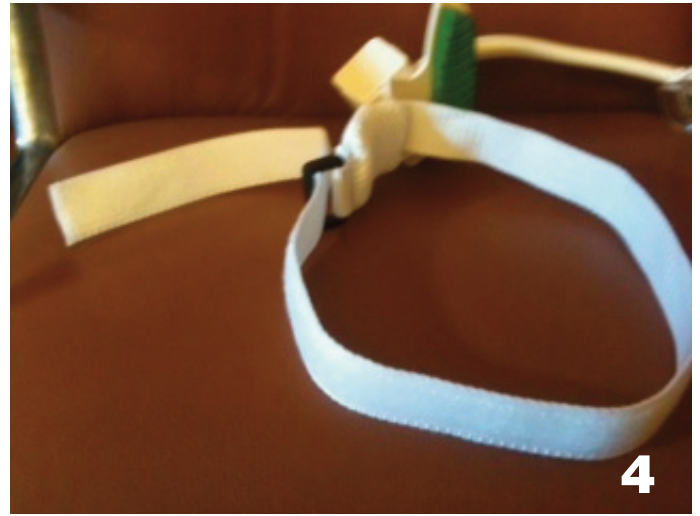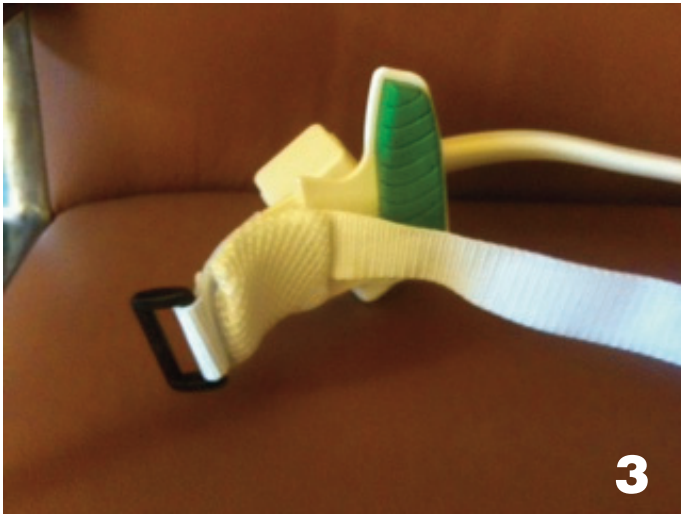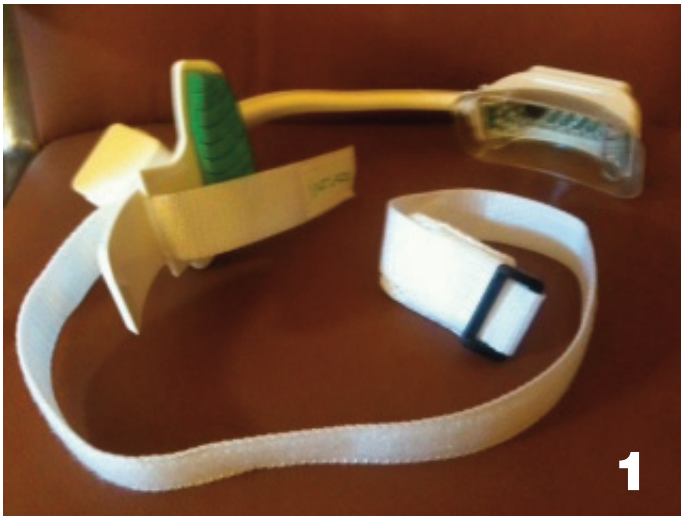

Importatore esclusivo e distributore



Italia

Croazia

Sede 20135 Milano V.le Umbria 19/a tel 02 55 016 500 fax 02 55 016 646

Filiale 00161 Roma Via G.B. Morgagni 19 tel 06 44 033 50 fax 06 44 033 48

52223 Rasa Ul. N. Tesle 18 tel +385 (0) 52 874 452 fax +385 (0) 52 874 454

ilic@ilic.it

www.ilic.it

Azienda Certificata ISO 9001:2000

SOLO PER ORDINI

