

Wintray® Clip *PERIODENT* by Kohler

Porta impronta per implantologia

con 4 segmenti amovibili



NEW WINTRAY Clip NON richiede Chiavette o Viti.



- Predisposto per la tecnica pick-up 9 segmenti occlusali amovibili.
- In acciaio inox chirurgico sterilizzabile fino 200°C.
- Estremamente stabile, per impronte di altissima precisione - forato e con numerose ritenzioni per il materiale da impronta.
- Utilizzabile anche per protesi mobile, protesi fissa a sostegno dentale quando si vuole separare il materiale da impronta dai modelli per non rompere monconi in gesso sottili e fragili.
- Protetto da brevetto internazionale.

Utilizzabile con tutti gli elastomeri

Nuovo Concetto Dott. ri Guillaume e Mazeirat

WINTRAY® Clip permette di estrarre diversi segmenti in corrispondenza degli impianti con una clip. Le pareti basse permettono d'avvicinarsi meglio alla cresta ed avere una sporgenza più netta dei pilastri per impronta nella bocca del paziente. Le pareti più basse s'appoggiano meno sulle gengive e sono meno fastidiose per i pazienti con mascelle edentule. La larghezza della barra permette d'utilizzare il Wintray Clip sulle creste dentali larghe e soprattutto il prelievo del pickup con assi angolati, molto utile per le protesi su più denti.

Pulizia e Sterilizzazione

Wintray Clip è in acciaio chirurgico, sterilizzabile e conforme alle esigenze di rintracciabilità della sterilizzazione. Prima della sterilizzazione il porta impronta ed i segmenti vanno lavati con detergenti adeguati. Tutti i segmenti estraibili vanno riposizionati con attenzione e precisione, inserendo per primi i perni nelle perforazioni. Infine sterilizzare i WINTRAY® Clip come di consueto (max. 200°C/398°F).

Porta impronta Wintray Clip € 148			
Superiore	07 55520 WINTRAY Clip U3 Superiore Small 66 x 53 mm	07 55521 WINTRAY Clip U4 Superiore Medium 69 x 57 mm	07 55522 WINTRAY Clip U6 Superiore Large 73 x 62 mm
Inferiore	07 55523 WINTRAY Clip L3 Inferiore Small 72 x 54 mm	07 55524 WINTRAY Clip L4 Inferiore Medium 74 x 57 mm	07 55525 WINTRAY Clip L6 Inferiore Large 78 x 61 mm
Misure indicate in mm: larghezza bordo posteriore / larghezza antero posteriore			

Wintray Clip - Procedura clinica

Il successo delle ricostruzioni a supporto implantare dipende dal rilievo di un'impronta adeguata dell'analogo implantare e dal suo uso nella produzione del modello di lavoro.

I porta impronta di serie o individuali in plastica non soddisfano i requisiti biomeccanici degli impianti. Wintray, grazie alla struttura in acciaio inox ed alle aperture occlusali a segmenti è invece in grado di far fronte a queste necessità in modo preciso, rapido e semplice.



Dopo aver scelto il Wintray Clip della misura adatta si rimuove il segmento a L in corrispondenza degli impianti.



L'apertura vestibolare ottenuta con i segmenti ad L consente l'impronta anche con impianti inclinati vestibolarmente.



Gli impianti, in posizione svasata, sono pronti per ricevere l'analogo per impronta.



Gli analoghi per impronta inseriti sui pilastri implantari.



Rilievo dell'impronta in silicone. Le viti degli analoghi sporgono occlusalmente. **NON USARE ADESIVI SUI WINTRAY New!**



L'impronta mascellare eseguita con il Wintray Clip appena estratta dalla bocca, dopo l'allentamento delle viti di fissaggio degli analoghi.



Veduta laterale dell'impronta in prossimità degli analoghi implantari.



Veduta superiore dell'impronta in prossimità degli analoghi implantari.

Protesi Mobile su Impianti

Per le protesi mobili su impianti è possibile togliere alcuni, o tutti i segmenti. L'uso risulta analogo.

