

Ecoscarico[®]

Pro-Kit



IVAN ILIC' srl


Via L. Muratori, 46/11
20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36512990

FAX: +39 02 55016646

www.ilicdental.com

ilic@ilicdental.com

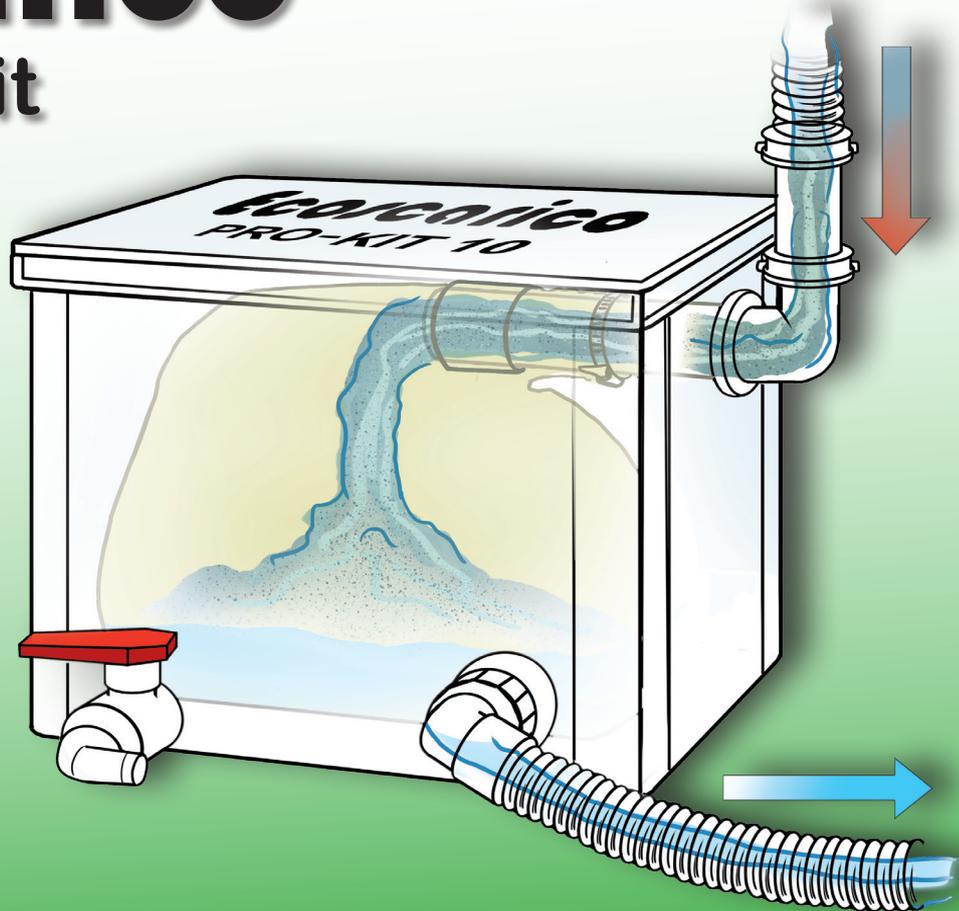


FUNZIONI

- L'**Ecoscarico** Pro-Kit è stato realizzato per trattenere i rifiuti solidi che defluiscono dal lavello e dalla squadramodelli
- Preserva le tubazioni di scarico da ingorghi
- Velocizza la rimozione dei fanghi agevolando la manutenzione
- Specifico per trattenere gesso, cera, residui di fusione, ecc..(non trattiene rifiuti chimici)
- L'**Ecoscarico** Pro-Kit 10 con un solo sacchetto di filtraggio, è adatto ad un laboratorio/studio con massimo tre addetti ed un volume di 150 modelli rifiniti al mese.
- Per volumi superiori è raccomandato il Pro-Kit DOUBLE che grazie al funzionamento contemporaneo di due sacchetti garantisce un maggior volume d'acqua filtrata

INSTALLAZIONE

- All'interno del Pro-Kit è già presente tutta la raccorderia necessaria per un montaggio standard.
- Posizionare l'**Ecoscarico** come in figura
- Tagliare il tubo flessibile a misura cercando di evitare la formazione di inutili curve.
- Utilizzare il silicone in dotazione nel kit per sigillare tutti gli accoppiamenti tra il tubo flessibile e gli appositi raccordi.
- Durante il funzionamento l'acqua all'interno della cassetta deve rimanere all'altezza dello scarico.
- Lo scarico fognario deve essere posizionato ad un'altezza minore o uguale allo scarico della cassetta
- N.B: la durata del sacchetto è direttamente proporzionale al dislivello presente tra il lavandino e lo scarico della cassetta.


Modello: Pro-Kit 10

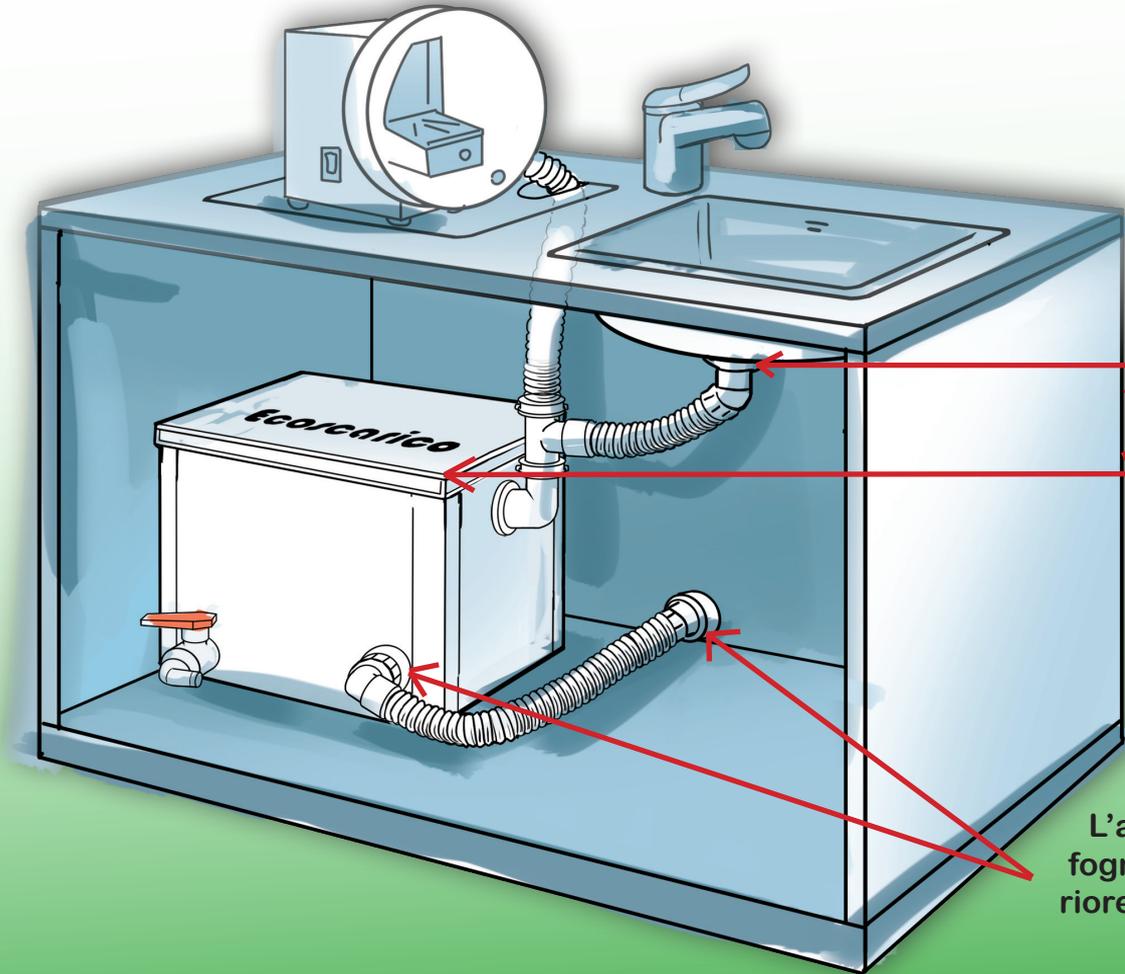

Lasciare almeno 20 cm di spazio tra il fondo del lavello e il bordo superiore della cassetta

L'altezza dello scarico fognario dev'essere inferiore o uguale allo scarico della cassetta


Modello: Pro-Kit Double

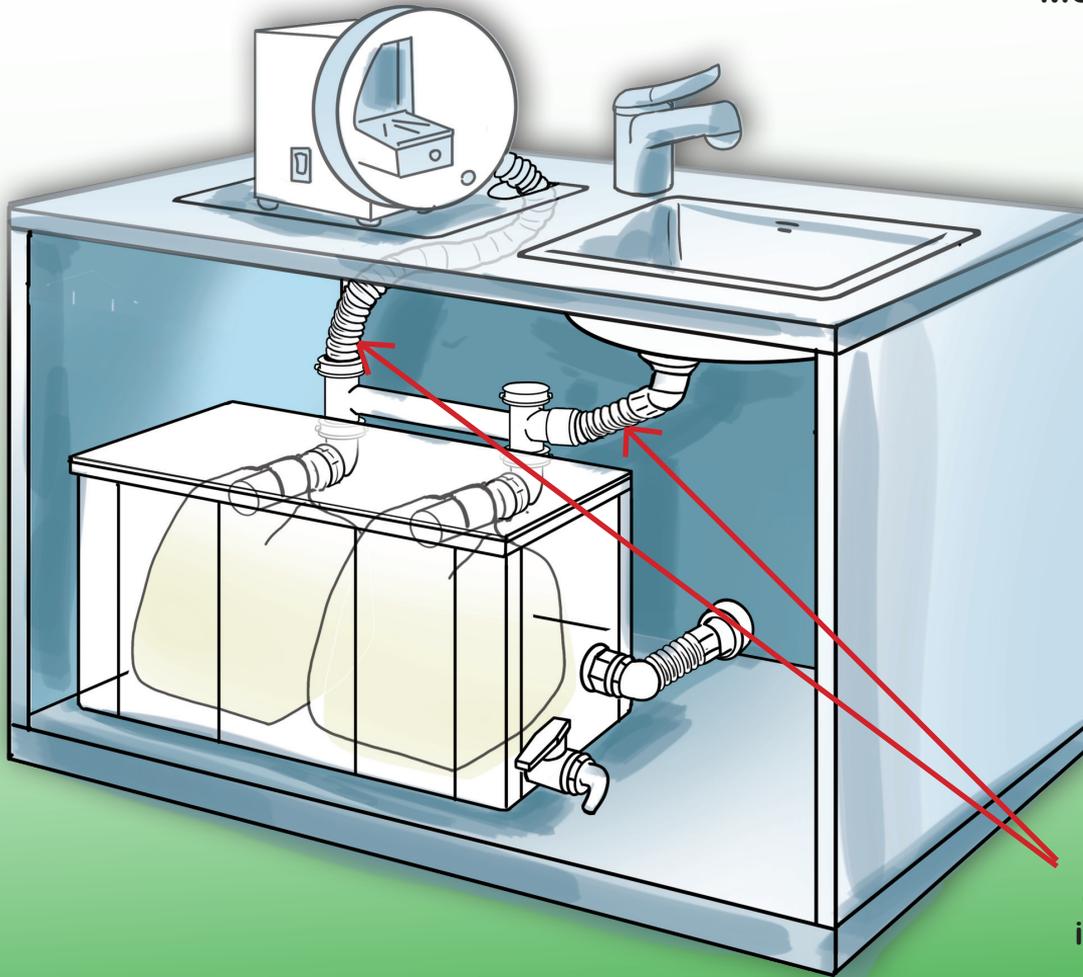

Scarico squadramodelli
e scarico lavello vanno
collegati in modo che
confluiscono in entrambi
i sacchetti per aumentare
la capacità filtrante

USO

- Sostituire il sacchetto quando l'acqua comincia a defluire dal lavello lentamente
- Drenare gli eventuali fanghi depositatisi sul fondo della cassetta utilizzando il rubinetto e riversarli nel lavandino.

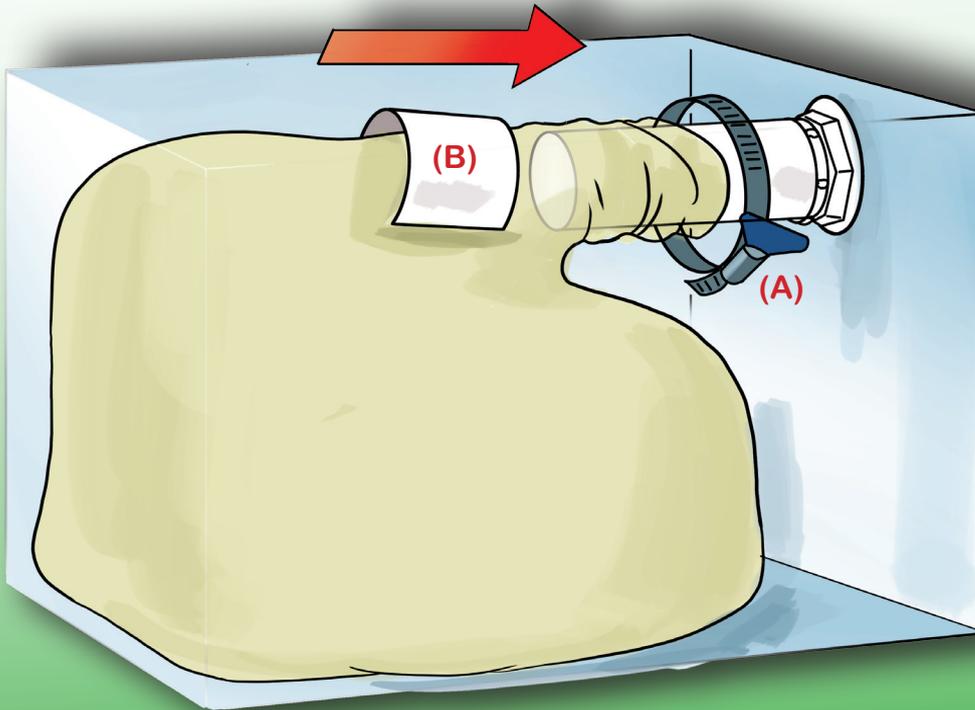


Infilare il sacchetto sul tubo e stringere la fascetta metallica (A) sopra di esso fino a sigillarlo ermeticamente. Arruffare il sacchetto in eccesso sul tubo in modo da posizionarlo centralmente alla cassetta e bloccarlo con l'apposita fascetta plastica (B).

AVVERTENZE


- I sacchetti non trattengono rifiuti classificati come organici o chimici
- Non scaricare acqua con temperatura superiore ai 70 °C
- Non interporre altre vasche di decantazione prima o dopo l'**ecoscarico**
- Non riutilizzare i sacchetti
- Non scaricare sostanze gelatinose che potrebbero intasare il sacchetto
- Parzializzare l'acqua di lavaggio al disco della squadramodelli
- Alternare il lavoro con la squadramodelli per permettere al sacchetto di far defluire al meglio l'acqua filtrata

DIMENSIONI

Le misure riportate sulle frecce in centimetri, indicano lo spazio minimo per il montaggio e sono comprensive dell'ingombro dei raccordi di collegamento, quelle sotto ai rispettivi disegni sono le quote della sola cassetta di raccolta acqua.

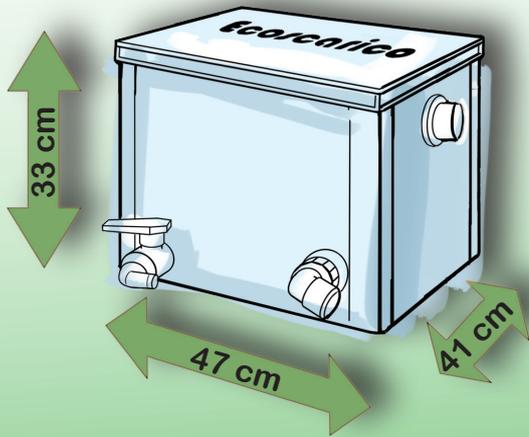

L: 40, P:30, H: 33

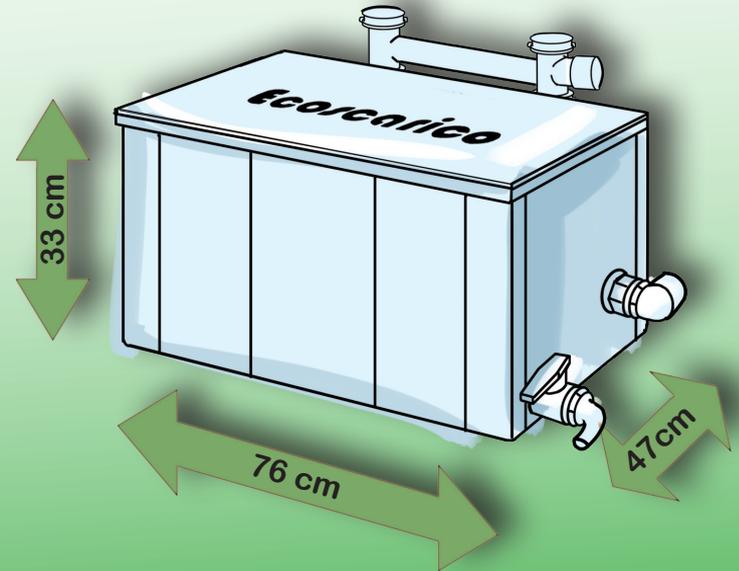

L: 69, P:41, H: 33

GARANZIA

La cassetta **Ecoscarico** è coperta da garanzia di 24 mesi e prevede la sostituzione del particolare difettoso.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da incuria e utilizzo inadeguato dell'attrezzatura.



BERTLAND S.n.c di Sergio Landini & C.

42019 SCANDIANO (RE) Via Munari, 9 Tel. +39 0522/857449 Fax. +39 0522 765686

www.bertland.it info@bertland.it

con la presente dichiara che i sistemi di filtraggio denominati **Ecoscarico** Pro-Kit sono idonei al trattamento delle acque di scarico come previsto dal D.lgs 152/2006 e come certificato dalle prove tecniche effettuate dall'ARPA di Reggio Emilia con protocollo n° 16141/00

Sergio Landini
Sergio Landini