

# Tempi di polimerizzazione

Procedimento	Sublite V	Solidilite LED	Solidilite V
Polimerizzazione di SHOFU Universal Pre-Opaque	-----	30 sec.	60 sec.
Polimerizzazione di SHOFU Universal Opaque	-----	90 sec.	180 sec.
Fissaggio	10 sec. / 2 cicli	-----	-----
Polimerizzazione preliminare	-----	30 sec.	60 sec.
Polimerizzazione di elementi intermedi di ponti	-----	90 sec.	180 sec.
Polimerizzazione finale	-----	90 sec.	180 sec.

