

Manutenzione EyeSpecial C-IV

- Pulire l'esterno della fotocamera con un panno morbido, pulito e asciutto. Per la disinfezione, passare delicatamente con una salvietta inumidita con disinfettante. Se la fotocamera entra in contatto con della sabbia, evitare di toglierla manualmente e pulirla invece con aria compressa.
- Per rimuovere polvere e sporco dall'obiettivo usare aria compressa. Se l'obiettivo è molto sporco, passare un panno morbido bagnato di detergente per obiettivi o un'apposita salvietta con un movimento circolare. Non versare mai il detergente direttamente sull'obiettivo.
- Non usare diluenti, benzene o qualsiasi solvente organico per pulire l'obiettivo.
- Non toccare l'obiettivo direttamente con le dita.

Conservazione

- Conservare la fotocamera in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da polvere e sostanze chimiche. Prima di riporre la fotocamera per un lungo periodo di inutilizzo, inserirla in un contenitore ermetico. È consigliabile inserire nel contenitore anche una bustina di essiccante (silica gel).
- Prima di riporre la fotocamera per un lungo periodo di inutilizzo, rimuovere le batterie e la scheda di memoria SD.
- Anche se la fotocamera non viene utilizzata, premere ogni tanto il pulsante di scatto per alcune volte per controllare che la fotocamera funzioni correttamente.

Deterioramento della qualità delle immagini

- La qualità delle immagini non peggiora anche dopo alcuni anni di normale utilizzo della fotocamera. Tuttavia, se si prova a fotografare il sole e se il sensore CMOS viene esposto a luce intensa o se vengono scattate troppe foto, la qualità delle immagini potrebbe peggiorare. Contattare il proprio rivenditore SHOFU per la manutenzione e la riparazione della fotocamera.

Resistenza all'acqua e agli agenti chimici

- EyeSpecial C-IV ha un grado di resistenza all'acqua IPX4. Ciò significa che resiste agli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione e può essere pulita con una salvietta inumidita con disinfettante (etanolo per disinfezione), ma non deve mai essere immersa in nessun liquido.
- Non toccare le batterie o la scheda di memoria SD con le mani bagnate.

Varie

- Non esercitare forze eccessive su questa fotocamera.
- Spegnerla la fotocamera quando viene trasportata nell'apposita borsa.
- Non esporre l'obiettivo alla luce solare diretta per evitare danni ai componenti interni.

Protezione contro l'accesso da liquidi

Livello	Resistenza
IPX2	Protetto da caduta di gocce d' acqua con inclinazione massima 15°
IPX3	Protetto dalla pioggia
IPX4*	Protetto da spruzzi
IPX4k	Protezione contro spruzzi d' acqua sotto pressione, vale solo per veicoli stradali

***IPX4** è un codice IP o Marchio di protezione dell'ingresso.

Questo è uno standard di classificazione che valuta il grado di protezione contro le intrusioni.

Un codice IP è costituito dall'identificazione IP e da due cifre che descrivono il livello di protezione.