

## MATERIALE TISSOTROPICO PER REGISTRAZIONI OCCLUSALI

### Istruzioni d'uso

**SureBite ABR** è un materiale per registrazioni occlusali estremamente duro a presa rapida, con formula a base di esteri metacrilici multifunzionali. Grazie alla cartuccia AUTOMIX SureBite ABR può essere erogato direttamente sui denti. La resistenza appena percettibile durante l'occlusione garantisce un registrato affidabile. Grazie all'elevatissima durezza finale SureBite ABR è tagliabile e sagomabile con facilità.

### Preparazione della cartuccia

Rimuovere e gettare il cappuccio della siringa (NON riutilizzare!). Collegare al suo posto la cannula di miscelazione fornita con un movimento di rotazione laterale per bloccarla in sede. Caricare la pistola applicatrice con la cartuccia preparata. A questo punto si è pronti per l'applicazione.

Nota: Gettare l'estrusione iniziale, delle dimensioni di una perla, della cannula di miscelazione. La miscela che segue è perfetta. Questa operazione deve essere eseguita per ogni nuova miscela.

Lasciare la cannula per miscelazione usata sulla cartuccia in quanto serve da cappuccio.

### Registrazione occlusale

Nota Importante: SureBite ABR è per la registrazione occlusale di 3-4 denti.

Per la registrazione di intere arcate usare SureBite ABR a segmenti.

Ogni struttura in acrilico va isolata adeguatamente (es. Vaseline).

Chiudere eventuali sottosquadri a livello di intermedi di ponte.

Applicare SureBite ABR direttamente sulle superfici occlusali (lung. max. materiale 3-4 cm). La chiusura del morso deve avvenire entro 30 sec. dall'inizio dell'estrusione (temp. ambiente di 23°C). Dopo 30-45 sec. in bocca il paziente deve aprire leggermente il morso e richiudere per facilitare la successiva

# Sure Bite - Istruzioni d'uso

rimozione del registrato. Dopo circa 1:30 min. dall'inizio della miscelazione la polimerizzazione è completa ed il registrato viene rimosso dalla bocca.

Nota: Evitare il contatto con soluzioni di retrazione, i cui residui possono allungare il tempo di presa. Perciò, sciacquare bene prima della registrazione occlusale.

## Disinfezione

Prima di utilizzare soluzioni disinfettanti standard rimuovere lo strato di inibizione dell'ossigeno con alcol oppure utilizzare direttamente un disinfettante contenente alcol.

## Articolazione

SureBite ABR permette il controllo visivo durante il fissaggio dei modelli di gesso in articolatore. I registrati in Sure-Bite ABR possono essere conservati per mesi senza che si contraggano.

## Avvertenze

SureBite ABR non contiene metil metacrilato ma contiene altri acrilati.

Nei pazienti sensibili la sensibilizzazione a SureBite ABR non può essere esclusa.

Smettere l'uso di SureBite ABR nel caso si osservino reazioni allergiche.

Non utilizzare per pazienti con reazioni allergiche verso gli acrilati.

Evitare il contatto con pelle, membrane mucose e occhi.

Nel caso il materiale entri a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua e sapone.

Nel caso il materiale entri a contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con molta acqua ed eventualmente richiedere l'intervento di un medico.

## Conservazione

Non conservare sopra i 25°C.

Non usare dopo la data di scadenza.

Tenere lontano dalla portata dei bambini!

Prodotto destinato esclusivamente all'uso odontoiatrico professionale!

 [ilicdental.com](http://ilicdental.com)



**IVAN ILIC' srl**

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36512990 | FAX: +39 02 55016646

MAIL: [ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com)