

In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone.

- Le coppette monodose contengono abbastanza pasta per una procedura completa. Ogni coppetta deve essere utilizzata una volta e solo per un solo paziente. Il riutilizzo della coppetta non esaurita per un altro paziente può provocare contaminazione crociata.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PRECAUZIONI

- Le paste per profilassi contenenti fluoro non sono considerate sostitutive ad altre terapie a base di fluoro.
- Le paste per profilassi **Quartz** devono essere utilizzate solo da persone professionalmente addestrate a eseguire la profilassi dentale.
- Durante l'uso, indossare occhiali e guanti protettivi.

ISTRUZIONI PASSO-PASSO

Quando si usa la pasta in barattoli, è necessario prelevare e mettere in un dappen/

contenitore pulito la quantità sufficiente per la procedura. Le coppette monodose contengono abbastanza pasta per profilassi per una singola procedura. Ogni coppetta deve essere utilizzata una sola volta per un singolo paziente.

Il riutilizzo della coppetta non esaurita per un altro paziente può provocare contaminazione crociata. Usando un contrangolo monouso per profilassi come "Twist" o una coppetta per profilassi convenzionale, riempire la coppetta premendo la faccia della stessa nella pasta ruotando a bassa velocità.

Durante tutta la procedura, mantenere sufficiente pasta nella coppetta per evitare il surriscaldamento della superficie del dente. Si raccomanda l'aspirazione della saliva per evitare un'eccessiva diluizione e deglutizione della pasta.

CONSERVAZIONE

Quando si usano barattoli, richiudere immediatamente dopo l'uso per evitare la perdita di umidità.

Non conservare oltre i 25 ° C (77 ° F). Tenere lontano dalla luce solare diretta.

DATA DI SCADENZA E NUMERO LOTTO

Il numero di riordino, il numero di lotto e la data di scadenza devono essere indicati in tutta la corrispondenza che richiede l'identificazione del prodotto. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

SCHEDA DI SICUREZZA

La scheda di sicurezza è disponibile sul nostro sito Web, www.ilicdental.com, o verrà inviata richiedendola via e-mail a: ilicdental.com, o contattando il nostro servizio clienti al numero **+39 02 550165001-877-833-3725**.

Importatore esclusivo e distributore:




IVAN ILIC' srl Milano (Italy)
Via L. Muratori, 46/11 - 20135
TEL: +39 02 36 512 990
ilic@ilicdental.com

Manufactured by:



DHARMA
RESEARCH, INC. | 100% made in USA

www.ilicdental.com

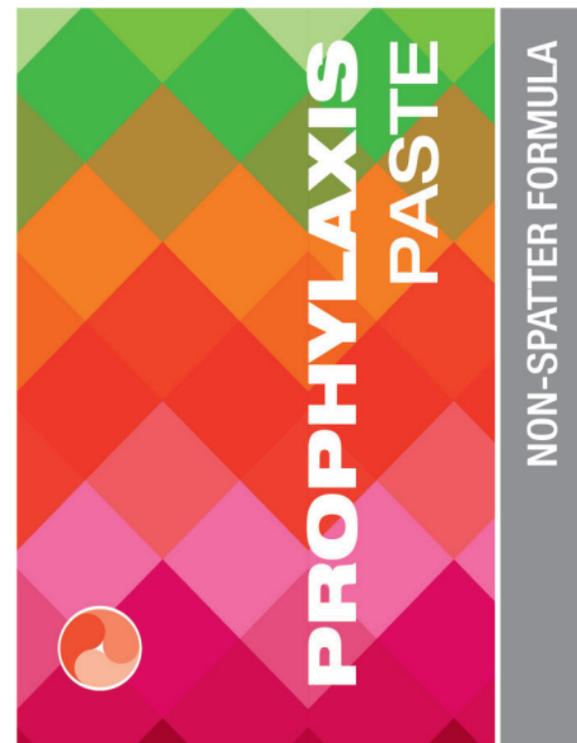

Quartz, pasta per profilassi con fluoruro o senza fluoro.

Quartz è una pasta per profilassi di alta qualità contenente una miscela unica di agenti lucidanti e detergenti che rimuove delicatamente placca e le macchie.

Disponibile in formulazioni contenenti fluoro, senza fluoro e senza coloranti. La pasta per profilassi **Quartz** è solo per uso professionale ed è progettata per l'applicazione durante le normali procedure di igiene dentale professionale.

Queste istruzioni valgono per tutte le grane e tutti gli aromi della pasta per profilassi **Quartz**.

La pasta per profilassi Quartz è disponibile nelle seguenti grane:

- **Fine:** ideale per pazienti più giovani e procedure di profilassi che richiedono una minima abrasività.
- **Media:** ideale per la maggior parte delle procedure di profilassi in cui si desidera un

maggior livello di rimozione di placca, pulizia e lucidatura.

- **Grossa:** ideale per i pazienti con notevole accumulo di macchie e strato, dovuti a fumo o all'uso eccessivo di bevande macchianti.

- **X-Coarse:** ideale per la rimozione di macchie pesanti difficili da rimuovere con la tradizionale pasta per profilassi.

INDICAZIONI PER L'USO

Da utilizzare per il trattamento professionale di igiene orale per pulizia e lucidatura dei denti.

Utilizzare Quartz senza fluoro prima della sigillatura di solchi e fossette.

CONTROINDICAZIONI

La pasta per profilassi al quarzo con e senza fluoruro è controindicata in pazienti con allergia nota a uno qualsiasi degli ingredienti elencati di seguito.

INGREDIENTI

Ingrediente attivo: fluoruro di sodio (ione fluoruro 1,23%)

Altri ingredienti: pomice, glicerina, silicato di sodio, fosfato monosodico, carbossimetilcellulosa di sodio, sodio saccarina, biossido di titanio, xilitolo, magnesio alluminun silicato, acqua, aroma e i seguenti coloranti:

Bubble Gum: D&C Red No. 27

Cherry: D&C Red No. 28

Menta: FD&C Green N. 3, FD&C Yellow N. 5

Arancio: FD&C giallo n. 6, D&C rosso n. 28

Vitigno: FD&C Red No. 3, FD&C Blue No. 1

Lampone: FD&C Blue No. 1, D&C Red No. 28

Pina Colada: FD&C Yellow No.5, FD&C Yellow No. 6

AVVERTENZE

- L'ingestione eccessiva di fluoro può causare nausea. Pertanto, le paste contenenti fluoro devono essere espettorate e non ingerite. In caso di ingestione accidentale di quantità abbondanti, consultare un medico o contattare immediatamente un centro antiveleni.

Dare immediatamente abbondanti quantità di latte o acqua se il latte non è disponibile. • La pasta per profilassi al contatto con gli occhi può causare irritazione. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua per 15 minuti. Richiedere assistenza medica se persiste irritazione o fastidio.

- In caso di gravidanza o allattamento, chiedere a un professionista della salute prima dell'uso.

- Evitare il contatto ripetuto della pelle con la pasta, poiché un'esposizione cronica ripetuta può causare dermatite.