

## ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO AL POSSO DI DISASSEMBLY

Più a lungo è stata usata una sedia, più difficile sarà rimuovere il pompa sollevatore.  
Non arrendetevi se il sollevamento non si allenta immediatamente: continuate a provarci.  
Prima o poi verrà via. Per sollevamenti molto ostinati, spruzzate il giunto con WD-40 e lasciatelo agire durante la notte, quindi riprovate.

### 1. Proteggi la sedia.

Lavora su una superficie pulita e ricoperta di moquette o metti un grande asciugamano pulito sul pavimento su cui lavorare. Copri il sedile e lo schienale con sacchetti di plastica o vecchie magliette per proteggerli dall'abrasione.

**2. Prendi un martello di gomma.** Se non hai un martello di gomma, puoi usare un martello, ma dovrai imbottire il colpo con un po' di asciugamano spesso per non danneggiare la sedia.

### 3. Abbassa il sedile il più possibile, quindi solleva leggermente la sedia da terra.

Potresti chiedere a qualcun altro di tenere la sedia per te.




### 4. Per rimuovere la base, martellala più volte finché non si stacca dal sollevatore.

Dirigi i colpi il più vicino possibile al sollevatore. Se stai usando un martello, ricordati di imbottire la base prima di colpire. Se le rotelle saltano via, non preoccuparti. Rimettile semplicemente nella base quando hai finito.

Se è attaccato un anello per il sollevamento con i piedi, allentalo e rimuovilo ora.

### 5. Per rimuovere il sedile, capovolgilo e afferra il sollevatore con la sella leggermente sollevata dal pavimento. Quindi martella con forza la parte metallica piatta del meccanismo di inclinazione del sedile nel punto in cui si collega al sollevatore.

Alla fine il sedile "salta" via dal sollevatore. Devi colpire con forza. Non basterà picchiare. Se usi un martello, ricordati di imbottire il meccanismo prima di colpire. Potresti chiedere a qualcun altro di tenere il sedile per te.

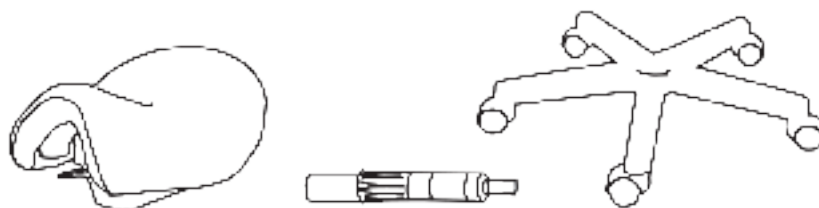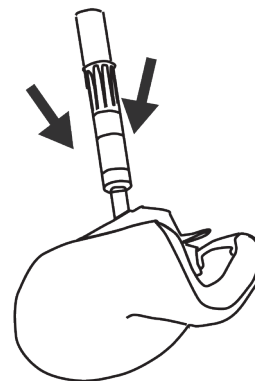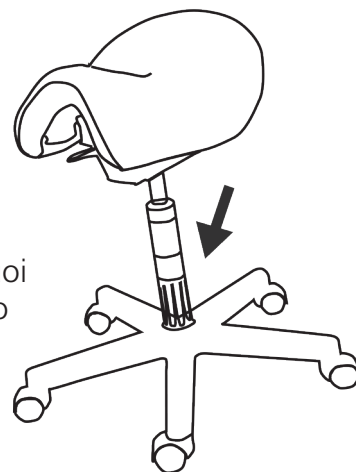

# Cataloghi ILIC' Prodotti&Procedure per linea, aggiornati



<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>SBIANCAMENTO &amp; TERMOFORMATURA</b></p> <p>Domiciliari, alla poltrona, tal da • Lucidanti • Desensibilizzanti • Maschere</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>	<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>INGRANDIMENTO &amp; Gestione delle immagini</b></p> <p>Ingrandimento • Transilluminazione • Diagnosi mucose Fotografia • Specchi • Radiografia</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>	<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>ANESTESIA</b></p> <p>Anestesia elettronica • Aghi • Siringhe • Scatole anestetico • Accessori</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>	<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>EMOSTASI &amp; RETRAZIONE</b></p> <p><b>TRATTAMENTO DEI TESSUTI</b></p> <p>Emostasi e Retrazione, prima dell'impronta</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>
<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>DIGA &amp; ISOLAMENTO</b></p> <p>Tecnica della diga • Diga chimica • Retrattori labiali • Ausili speciali Apprezzeria • Canale</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>	<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>CONSERVATIVA</b></p> <p>Adesione • Ricostruzione</p> <p>Diga • Matrici • Adesione • Compositi • Polimerizzazione • Ritrattura • Lucidatura</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>	<p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>ENDODONZIA</b></p> <p>Endodontica • Microchirurgia Hi-Tech</p> <p>Diagnostica • Imaging • Anestesia • Diga • Strumentazione Irrigazione • Materiali • Otturazione canalare Chirurgia endodontica • Polimerizzazione</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>Luglio 2024</p> <p>www.ilicdental.com</p>	<p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>PUNTE APPLICATIVE</b></p> <p>Punte applicative a penetra, per emostasi • Punte con cannula metallica, plastica • Punte per irrigazione endodontica • Siringhe monouso • Micro applicatori • Punte per igiene • Puntali per impronta</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>
<p><b>Diga e Isolamento</b></p>	<p><b>Conservativa e Adesione</b></p>	<p><b>Endodonzia</b></p>	<p><b>Punte applicative Aghi e Siringhe</b></p>
<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>PROTESI</b></p> <p>Fibra Ribbandi • Faccette • Stalze per provvisori • Cementi Strumenti rotanti e lucidanti • Strumentario • Resine per ribbandare • Cere</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>	<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>GNATOLOGIA</b></p> <p>Agganciatori • AFR • Mini-Ring • Occlusione • Inuli • Diga • Occlusor Arti-Bru • Bio-ink • Xxxx • Xxxx • Arti Spray • Bausch • Check-Film • Dinar</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>	<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>STRUMENTARIO &amp; AFFILATURA</b></p> <p>Identificazione • Organizzazione • Affilatura • Specchietti • Poligrafia Diagnostici • Anestesia • Diga • Operativi • Compositi • Endodontica Parodontologia/Chirurgia • Pratici • Endodontica • Laboratorio Suture • Ingrandimento</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>	<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>STRUMENTI ROTANTI</b></p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>
<p><b>Protesi e Cementazione</b></p>	<p><b>Gnatologia e Articolazione</b></p>	<p><b>Strumentario</b></p>	<p><b>Strumenti rotanti</b></p>
<p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>ERGONOMIA A COLORI</b></p> <p>Gestione Strumentario e Materiali</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>al.com</p>	<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>BARRIERE &amp; MONOUSO</b></p> <p>Termometri • Camici • Guanti • Maschere • Visiere • Tovaglioli Puntali • Tempore • Aspirazione • Puntali</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>	<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>PREVENZIONE alle Infezioni nello Studio</b></p> <p>MEDESEPT • PERIODONT • MEDICOM • VERIFY • DE MARCO</p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>	<p>Ricerca e Selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p><b>IGIENE &amp; PROFILASSI</b></p> <p>ilic QUALITY &amp; VALUE</p> <p>dal 1949 al servizio della comunità odontoiatrica ricerca e selezione Qualità &amp; Soluzioni per voi!</p> <p>om</p>
<p><b>Ergonomia a colori</b></p>	<p><b>Barriere e Monouso</b></p>	<p><b>Controllo delle Infezioni</b></p>	<p><b>Igiene e Profilassi</b></p>

grafica e impaginazione: laura.alexandrello@gmail.com



**IVAN ILIC' S.r.l.** Import Export Dental&General Medical Supplies  
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)  
TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646  
ilic@ilicdental.com | www.ilicdental.com