

Sede legale:

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano Italy

Contatti:

T. (+39) 02 55016500

IMPORT EXPORT - DENTAL & GENERAL MEDICAL SUPPLIES

BROKEN TOOL REMOVER PEN Strumento odontoiatrico per la rimozione dal canale radicolare di frammenti di strumenti endodontici rotti

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE

IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI
IL PRODOTTO E' **CONFEZIONATO NON STERILE**

Lo strumento è realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO BTR PEN:

Lo strumento in acciaio inossidabile può essere riutilizzato, mentre il terminale con circuito per BTR PEN è un prodotto monouso.

PROCEDURA PER IL TERMINALE CON CIRCUITO PER BTR PEN

Il terminale con circuito per BTR PEN viene fornito non sterilizzato. Prima di utilizzare il terminale, sterilizzarlo utilizzando guaine standard adatte alla sterilizzazione in autoclave. Conservare in un luogo pulito e asciutto.

Attenersi alle istruzioni dell'autoclave fornite dal produttore.

Il terminale con circuito per BTR PEN è un prodotto monouso.

I prodotti non sterilizzabili, monouso, utilizzati devono essere affidati ad un'azienda di smaltimento.

Procedura per gli strumenti in acciaio inossidabile

Nel processo di produzione sono stati utilizzati trattamenti volti a garantire la resistenza alla corrosione, tuttavia la durata dello strumento dipende da un uso e una manutenzione corretti.

Pulizia, risciacquo e lavaggio

Gli strumenti vengono forniti non sterilizzati. Gli strumenti nuovi di fabbrica prima della prima sterilizzazione e dopo essere stati estratti dalla confezione, devono essere lavati accuratamente in acqua calda con l'aggiunta di un detergente. Prima di ogni utilizzo sul paziente successivo, gli strumenti devono essere sterilizzati.

Sterilizzazione **STERILIZZARE SENZA COPERCHIO!**

Prima della sterilizzazione, tutti gli strumenti (riutilizzabili) devono essere disinfettati, lavati per rimuovere il disinfettante e asciugati. Si consiglia la pulizia ad ultrasuoni perché più efficace ed efficiente. Gli strumenti devono essere sterilizzati in conformità con i requisiti nazionali applicabili.

Metodo	Parametri minimi:
Autoclave a vapore	134°C per 5 minuti

Sede legale:

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano Italy

Contatti:

T. (+39) 02 55016500

IMPORT EXPORT - DENTAL & GENERAL MEDICAL SUPPLIES

PRECAUZIONI

Seguire le istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti.

In caso di grave incidente legato al dispositivo medico, notificare l'evento al produttore e al proprietario dell'ente statale di competenza per il luogo di residenza dell'utente o del paziente.

CONSERVAZIONE

Conservare gli strumenti a una temperatura compresa tra i 5 e i 30°C e in un ambiente con umidità relativa non superiore al 70%. Prima di ogni utilizzo, verificare che lo strumento non presenti sporczia, danni alla struttura del materiale (crepe, curvature, rotture, sfaldature).

Il mancato rispetto delle regole di cui sopra ridurrà significativamente la durata dello strumento e ne ridurrà la vita utile.

Data ultimo aggiornamento: 12.01.2023/1