

dal 1949 al servizio
della comunità odontoiatrica
ricerca e selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!



FORUMTEC



SuperTabs-Chlor Forumtec

Eliminazione semplice e veloce dei microrganismi.

5 motivi per usare i SuperTabs-Chlor Forumtec: **Efficace:** eliminando oltre il 99% dei virus, batteri e funghi. **Veloce:** grazie a una modalità di azione unica.

Preciso: 1 pastiglia si dissolve in 1 litro di acqua producendo una soluzione di 1000 PPM. **Facile:** basta spruzzarlo su qualsiasi superficie. **Sicuro:** può essere utilizzato anche su superfici alimentari.

SuperTabs-Chlor sono ideali per ospedali, laboratori, cliniche e persino per uso domestico.
Mantieni la superficie di lavoro pulita e sanizzata.

Istruzioni d'uso. Una compressa effervescente deve essere sciolta in 1 litro di acqua potabile per produrre una soluzione contenente 1000 PPM di cloro attivo. Misurare la quantità di acqua accuratamente al fine di massimizzare l'efficienza della soluzione.

È possibile preparare diverse soluzioni disinfettanti sciogliendo le compresse nella quantità di acqua potabile indicata nella tabella sottostante e ottenere la prescrizione medica desiderata.



Diluizione	Concentrazione desiderata ppm
1 compressa per 10 litri	100
1 compressa per 4 litri	250
1 compressa per 2 litri	500
1 compressa per 1 litro*	1000
2 compresse per 1 litro	2000
10 compresse per 1 litro	10000

* Nostra raccomandazione

SuperTabs-U Forumtec

Pastiglie pratiche a doppia azione
per lavaggio ad ultrasuoni

Conveniente • Efficiente • Potente



Economia. Le pastiglie concentrate sono economiche rispetto altre soluzioni disponibili. **Facili da usare.** Elimina la necessità di movimentazioni pesanti contenitori. **Modalità a doppia azione.** Una potente combinazione di ossigeno effetto sbiancante e attività enzimatica per il massimo risultato.

Economizza la procedura di pulizia nelle vasche ad ultrasuoni

Pastiglie per detersione ad ultrasuoni

Istruzioni d'uso. 1. Una compressa 3 litri di soluzione. Sono disponibili anche compresse di dimensioni maggiori per uso ospedaliero. 2. Non miscelare con altri prodotti per la pulizia o disinfezione. 3. Lascia cadere una compressa per 3 litri d'acqua, direttamente nel serbatoio. 4. Riempire con acqua di rubinetto calda 40-50 ° C, la temperatura dell'acqua non dovrebbe superare i 60 ° C. 5. Attivare l'ultrasuoni per almeno 10 minuti per ottenere la pulizia degli strumenti. 6. Lo strumento non deve essere immerso nella soluzione per più di 24 ore. 7. Per le pulitrici ad ultrasuoni, seguire le raccomandazioni del produttore. 8. Asciugare gli strumenti prima di procedere con il processo di sterilizzazione. 9. Sostituire la soluzione quando diventa visibilmente opaca, o almeno una volta al giorno.

Attenzione. È raccomandato l'utilizzo dei guanti durante la manipolazione dei tablet. Tenere fuori dalla portata di bambini. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Lavarsi bene le mani dopo aver toccato le compresse. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua corrente continua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste, consultare il medico. In caso di ingestione accidentale, non provocare il vomito, bere grandi quantità di acqua e consultare un medico.

Informazioni. In caso di ingestione accidentale, non provocare il vomito, bere grandi quantità di acqua e consultare il medico.

www.ilicdental.com

Sicura manutenzione dell'autoclave



SuperTabs-A Forumtec

Potente detergente per autoclavi

Sicuro • Facile • Efficace

Ottimo funzionamento dell'autoclave con Le nuove SuperTabs- A Forumtec

Sicurezza. Pastiglie concentrate senza rischio di liquidi o polveri pericolosi. **Super efficacia.** Gestione di corrosione e sedimenti, a garanzia della massima efficienza. **Valore.** Funzione corretta e longevità dell'autoclave per autoclavi di classe S e N.

Comprese per la pulizia dell'autoclave

Istruzioni per l'uso. Detergente e decalcificazione progettato specificamente per la pulizia e la rimozione di depositi di ossidi d'acqua e altri sedimenti che si formano nelle autoclavi a vapore. I principi attivi sono una combinazione di sali acidi e altri detergenti. • Usa 1 Tab per pulire la tua autoclave. • Trattamento ogni 20 cicli o una volta alla settimana. • Adatto per autoclavi di classe S e N.

Procedura di pulizia. 1. Rimuovere tutti gli strumenti e i vassoi dalla camera. 2. Rimuovere l'acqua dal serbatoio. Riempire con acqua distillata. 3. Inserire compressa nella camera fredda. 4. Eseguire un ciclo "non avvolto" selezionare 30 minuti a 134 ° C - 137 ° C, non c'è bisogno di asciugare. 5. Rimuovere l'acqua dal serbatoio alla fine del ciclo. 6. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua distillata. 7. Eseguire un nuovo ciclo "non avvolto", selezionare 30 minuti a 134 ° C - 137 ° C, non è necessario utilizzare un tablet. 8. Scaricare nuovamente l'acqua dal serbatoio. 9. Spegnerne l'autoclave e attendere che la camera sia fredda. 10. Pulisci la camera, fare attenzione che sia fredda!! 11. Scaricare nuovamente l'acqua dal serbatoio. 12. Riempire solo con acqua distillata. 13. L'autoclave è ora pulita e pronta per l'uso. **IMPORTANTE:** non sterilizzare gli strumenti durante il processo di pulizia !!!

Attenzione. Si raccomanda l'uso di guanti durante la manipolazione delle compresse. Tenere fuori dal portata dei bambini. Contiene ingredienti leggermente acidi. Evitare il contatto con pelle, occhi o vestiti. Lavarsi bene le mani dopo aver toccato le compresse. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua corrente continua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste, consultare il medico. **Attenzione.** In caso di ingestione accidentale, non provocare il vomito. Bere grandi quantità di acqua e consultare il medico.

Per ordinare: ilic@ilicdental.com - tel +39 02 36 512 990 - fax 02 55 016 646

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna				Codice SDI
P.IVA	C.Fisc.	e-mail		

PRODOTTO	CODICE	CONTENUTO	Prezzo iva esc.	OFFERTA LANCIO	Q.TÀ
SuperTabs-Chlor 150 pz.	54 521TC	SuperTabs-Chlor 150 pz.	€ 110,00	-25%	
SuperTabs-A	54 537TA	SuperrTabs-A 12 pz	€ 125,00	-25%	
SuperTabs-U	54 535TU	SuperrTabs-U 60 pz	€ 179,00	-25%	

+iva a norma di legge

Giorni di apertura: **Mattino** L M M G V S **Pomeriggio** L M M G V S

Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 130,00 (IVA esc.) nessun contributo spese

Ordine fino a € 130,00 (i.e.) + € 12,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,00

PAGAMENTO: Ordini inf. a € 130,00 (i.e.): Contrassegno (+ € 6,50) Bonifico anticipato Carta di credito o POS

Ordini sup. a € 130,00 (i.e.): Contrassegno (+ € 6,50) R.B. 30 gg. d.f. Carta di credito o POS

IBAN Ivan Ilic' srl: IT50N056960162500003415X03

IBAN Cliente:

Carta di credito o POS Visa Mastercard Numero

Scadenza

DATA

TIMBRO E FIRMA